



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TERMOMETRO DIGITALE BL3 - AMPIO SCHERMO
BL3 DIGITAL THERMOMETER - WIDE SCREEN
DIGITAL THERMOMETRE BL3 - ÉCRAN LARGE
TERMÒMETRO DIGITAL BL3 - PANTALLA ANCHA
TERMÒMETRO DIGITAL BL3 - ECRÁ AMPLO
ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ BL3 - ΕΥΡΕΙΑΣ ΟΘΟΝΗΣ

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guia de uso
Guia para utilização - Οδηγίες χρήσης

PORTUGUÊS

ESPECIFICAÇÕES

Intervalo:	32,0-43,9°C (89,6-111,1°F) Abaixo de 32,0°C (89,6°F) apresenta L°C (°F) Acima de 43,9°C (111,1°F) apresenta H°C (°F)
Resolução:	0,1°C (°F)
Precisão:	±0,1°C (34,0°C a 42,0°C); ±0,2°C (outro intervalo) ±0,2°F (93,2°F a 107,6°F); ±0,4°F (outro intervalo)
Peso:	O cristal líquido apresenta 3 ½ dígitos
Ecrã:	CR2032 (3V)
Bateria: (incluída)	0,40 mil-litro no modo de medição
Consumo de alimentação:	Mais de 160 horas de funcionamento contínuo
Vida útil da bateria:	Aprox. 117mmx30mmx16mm
Dimensões:	Aprox. 20 gramas incluindo bateria
Beeper:	Aprox. 5 segundos de sinal sonoro quando a temperatura máxima é atingida
Memória:	Memória incorporada permitindo a apresentação do valor anteriormente medido
Condições de trabalho:	Temperatura: 10-40°C (50-104°F) Humidade relativa: 15-95% não condensante
Condiciones de almacenamiento:	Temperatura: -25-55°C (-13-131°F) Humidade relativa: 15-95% não condensante
Garantia de Calidad:	Certificação ISO 13485 Cumpra as normas ASTM-E1112, EN12470-3, EN60601-1
Clasificación del Producto:	Equipamento tipo BF 

COMO UTILIZAR

- Desinfete a sonda com álcool etílico (esfregando) antes de a utilizar.
- Prima o botão ON/OFF. No ecrã irá ler-se  → Última Memória  ou 
- Solte o interruptor de alimentação e o ecrã irá mostrar L°C (L°F) com °C (°F) intermitente.  ou 
- Coloque a sonda na posição apropriada (boca, axilas ou reto).
- Uma vez que o sinal dos graus °C (°F) pare de piscar, a temperatura correta é indicada. A leitura da temperatura não se irá alterar após °C (°F) parar de piscar.
- A unidade irá desligar-se automaticamente dentro de 1 minuto. Contudo, para prolongar a vida útil da bateria, convém desligar o termómetro premindo o botão ON/OFF após a temperatura ter sido registada.

Funcionalidades especiais:

Alarme de temperatura normal irá soar um alarme quando a temperatura de pico for registada e estiver pronta para ler. O alarme de "temperatura normal" (quatro bipes rápidos seguidos de uma pausa) irá soar rapidamente durante aproximadamente 10 segundos.

Recuperação da memória da última temperatura Ligue o termómetro e soará um curto bipe. Em simultâneo, o termómetro efetua um teste de autoverificação, durante o qual todos os segmentos digitais aparecem no LCD.

Após isso, o valor da última leitura irá aparecer automaticamente e 37,0°C (98,6°F) no LCD durante 2 segundos. A leitura só é sobrecrita quando um novo valor de temperatura for registado.

Para modelos com alarme de febre: se a temperatura registada for superior a 38,0°C (100,4°F), o alarme de febre (um som tipo bipe rápido que ocorre continuamente durante cerca de 10 segundos) irá soar quando a temperatura de pico tiver sido registado. Além disso, o resultado irá permanecer no LCD até o termómetro ser desligado.

Para modelos com comutação entre Fahrenheit e graus centígrados: Prima o botão ON/OFF até °C ou °F aparecer. Após °C ou °F ter sido comutado, o botão é libertado e o termómetro ficará no modo de "pronto para medição".

NOTA: Desinfete sempre o termómetro antes de o utilizar.

NOTA: Se a temperatura ambiente for inferior a 32,0°C (89,6°F), será apresentado em vez de L°C (ou L°F).

NOTA: Pode colocar uma proteção de plástico sanitária de sonda na ponta do sensor, para impedir infeções e contaminações cruzadas. A utilização da proteção da sonda pode resultar em 0,1 °C (0,2 °F) de diferença em relação à temperatura real. Elimine a eventual proteção de sonda usada e armazene a unidade num local seguro.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

- Quando o símbolo  aparecer, a bateria deve ser substituída.



 **Eliminação:** O produto não deve ser eliminado junto com outros detritos domésticos. Os utilizadores devem levar os aparelhos a serem eliminados junto do pontos de recolha indicados para a reciclagem dos aparelhos elétricos e eletrónicos.

REF	IT Codice prodotto GB Product code FR Code produit ES Código producto PT Código produto GR Κωδικός προϊόντος	IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente PT Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente GR Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (εντοπίσεις)
LOT	IT Numero di lote GB Lot number FR Numéro de lote ES Número de lote PT Número de lote GR Αριθμός παρτίδας	
	IT Fabricatore GB Manufacturer FR Fabricant ES Fabricante PT Fabricante GR Παραγωγός	
	IT Rappresentante autorizzato nella Comunità europea GB Authorized representative in the European community FR Représentant autorisé dans la Communauté européenne ES Representante autorizado en la Comunidad Europea PT Representante autorizado na União Europeia GR Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση	
	IT Conservare in luogo fresco ad asciutto GB Keep in a cool, dry place FR A conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco PT Armazenar em local fresco e seco GR Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον	
	IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight FR A conserver à l'abri de la lumière du soleil ES Conservar al amparo de la luz solar PT Guardar ao abrigo da luz solar GR Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία	
	IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture FR Date de fabrication ES Fecha de fabricación PT Data de fabricacão GR Ημερομηνία παραγωγής	
CE		   

REF 25554 / YD-203

Wenzhou Yosun Medical Technology Co., Ltd.,
No. 17, Shaozhong Road, Lingmen Beibaixiang Town,
Yueqing Wenzhou - 325603 Zhejiang, China,
Made in China

Lotus N.L. B.V. Koninngin Julianaplein 10, 1e Verd,
2695AA, The Hague, Netherlands

