

SCHERMO FACCIALE ANTI-NEBBIA MONOUSO - ANTI-FOG DISPOSABLE FACE SHIELD - ÉCRAN FACIAL ANTI-BUÉE JETABLE - PANTALLA FACIAL DESECHABLE ANTINEBLA - PROTETOR FACIAL DESCARTÁVEL ANTI-FOG - ANTI-BESCHLAG-EINWEG-GESICHTSSCHILD - ANTIΟΜΙΧΛΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - JEDNORAZOWA OSŁONA TWARZY ANTYFOGOWA - ECRAN FACIAL DE UNICĂ FOLOSINȚĂ ANTI-ABURIRE - JEDNORÁZOVÝ OBLIČEJOVÝ ŠTÍT PROTI ZAMLŽOVÁNÍ - ANSIKTSVISIR MED ANTI-IMBILDNINGSFUNKTION FR ENGÅNGSBRUK - KERTAKÄYTTÖINEN HUURTEENESTOKA-SVOSUOJA - JEDNORAZOVÝ TVÁROVÝ ŠTÍT ODOLNÝ VOČI ZAHMLIEVANIU - ANTICONDENS GELAATSSCHERM VOOR EENMALIG GEBRUIK - JEDNOKRATNI VIZIR PROTIV MAGLJENJA - PÁRAMENTES EGYSZER HASZNÁLATOS ARCVÉDŐ - PÁRAMENTES EGYSZER HASZNÁLATOS ARCVÉDŐ - DUGFRI ANSIGTSSKÆRM TIL ENGANGSBRUG - ЛИЦЕВ ЩИТ ПРОТИВ ЗАМЪГЛЯВАНЕ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА - NERASOJANTIS VIENKARTINIS APSAUGINIS VEIDO SKYDELIS - VIENREIZĒJĀS LIETOŠANAS PRETAIZSVĪŠANAS SEJAS AIZSARGS - UDUVASTANE ŪHEKORDNE NĀOKAITSE - TÅKEHEMMENDE ANSIKTSKJERM TIL ENGANGSBRUK - درم لام عتس الال بابضلل داضم هجو ورد

PORTUGUÊS **Descrição:** O protetor facial antiembaçante é composto por uma peça de película PET com uma peça de película de proteção, um suporte de espuma e uma fita elástica.

Indicações de utilização: O protetor facial antiembaçante é usado para ajudar a proteger todo o rosto contra a potencial contaminação por patógenos do sangue, fluidos corporais ou respingos de produtos químicos nocivos durante a inspeção ou tratamento.

Contraindicações: Nenhumas.

Efeitos colaterais do produto: Este produto não tem efeitos colaterais.

Aviso:

1. A exposição num ambiente de alta humidade pode causar a perda de eficácia do efeito antiembaçante.
2. Suspenda o uso em caso de dano ou cedência durante o uso.
3. Durante o uso, tente não tocar no centro da lente.
4. Os materiais que possam entrar em contacto com a pele do utilizador podem causar reações alérgicas em indivíduos sensíveis.

Operação:

Passo 1: Remova a película protetora interna.

Passo 2: Puxe a fita elástica e coloque na cabeça.

Armazenamento: Armazene o produto em local seco a 0-30 °C. Mantenha afastado da luz solar.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

:

