

QUEBRA-COMPRIMIDOS




Pulveriza comprimidos de qualquer medida

- 1) Colocar o comprimido na cavidade transparente
- 2) Rosquear a parte azul até o fundo
- 3) Dissolver o medicamento em pó em leite, água...



ATENÇÃO: Não quebrar cápsulas a libertação temporizada, em caso de dúvida consultar o próprio farmacêutico.

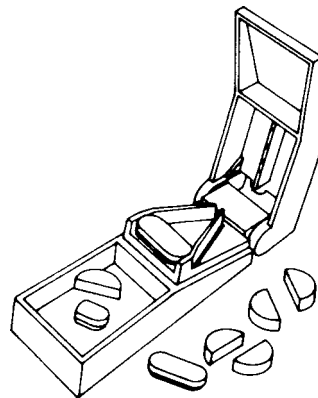

CORTA-COMPRIMIDOS



Corta em dois pedaços comprimidos de qualquer medida

- 1) Colocá-lo sobre uma superfície horizontal li
- 2) Colocar o comprimido na “V” de modo que comprimido toque as duas pontas da “V”
- 3) Abaixar suavemente a tampa até fechar o corta-comprimido
- 4) Guardar as partes não usadas no espaço específico



ATENÇÃO: lâmina afiada, guardar fora do alcance das crianças



GIMA

TAGLIAPILLOLE - FRANTUMAPILLOLE
PILL SPLITTER - PILL PULVERIZER
COUPE-PILULE - BROYEUR DE PILULES
CORTAPÍLDORAS - TRITURADOR DE PÍLDORAS
CORTA-COMPRIMIDOS - QUEBRA-COMPRIMIDOS
ΚΟΜΜΑΤΙΑΣΤΗΣ ΧΑΠΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΧΑΠΙΩΝ

مكسر لأقراص الدواء - قاطع لأقراص الدواء

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.

الحذر: على العمال قراءة وفهم هذا اللليل بكامله قبل البدء باستعمال المنتج.



M25730-M-Rev.2-03.10

GIMA Spa - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italia

ITALIA: Tel. 199 400 401 (8 linee r.a.) - Fax 199 400 403

E-mail: gima@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

INTERNATIONAL: Tel. ++39 02 953854209 - Fax ++39 02 95380056

E-mail: export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com