


- I Semi-maschere filtranti monouso
- GB Single-use filtering half-masks
- D Partikelfiltrierenden Einweg-Halbmasken
- F Demi-masques filtrants jetables
- E Semimáscaras filtrantes desechables
- P Semi-máscaras filtrantes de utilização única
- TR Tek kullanımlık filtreli yarım yüz maskeleri
- NL Halvegeleatsmasker met filter voor eenmalig gebruik
- S Filtrerande halvmasker för engångsbruk
- FIN Suodattavat kertakäyttöiset puoli-naamarit
- CZ Filtrační polomaska na jedno použití
- PL Maski ochronne jednorazowego użycia
- GR Ημιμάσκες διήθησης μιας χρήσης
- HR Polu-maske s filtrom za jednokratno upotrebu

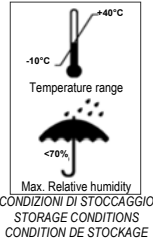

PORTUGUÊS INSTRUÇÕES DE USO

IMPORTANTE: as semi-máscaras filtrantes de utilização única descritas neste folheto são classificadas em 3 classes - FFP1, FFP2 e FFP3. Antes do uso, verifique a qual classe a máscara pertence segundo a norma EN149:2001+A1:2009 e se a mesma é apropriada para o contexto de utilização – a indicação da classe está presente na caixa e na semi-máscara. A data limite de utilização do produto está indicada na embalagem do mesmo.

APLICAÇÕES: protecção contra pó e aerossóis sólidos e líquidos (por ex. névoas oleosas)



Aconselha-se a verificar a integridade da máscara antes do uso. Se notar a presença de lacerações e/ou manchas, solicite uma máscara substitutiva. O símbolo NR na marcação indica que a máscara não é reutilizável e que deve ser deixada fora no fim do turno de trabalho. O símbolo D indica que as máscaras foram aprovadas no ensaio de obstrução com pó de dolomita.

A protecção oferecida por uma semi-máscara filtrante FFP3 ou FFP2 inclui a oferecida pela classe FFP1.

INSTRUÇÕES PARA A COLOCAÇÃO DA MÁSCARA:

1. Introduza um dedo na máscara. Dobre a ponte nasal à volta do dedo para lhe dar a forma do nariz.
2. Segurando a máscara com a mão, coloque a porção inferior do elástico na cabeça, atrás da nuca, arrumando-a abaixo das orelhas.
3. Levante a secção superior do elástico e coloque-a na parte superior da cabeça, acima das orelhas.
4. Utilizando ambas as mãos, modele o clipe, se presente, à volta do nariz e regule a tensão das porções superior e inferior do elástico mediante o passante próprio, quando presente, para garantir uma boa aderência ao rosto.
5. (a) Teste de verificação do posicionamento correcto da máscara sem válvula: coloque as mãos sobre a máscara, conforme mostrado na figura 5, e expire vigorosamente. (b) Teste de verificação do posicionamento correcto da máscara com válvula: coloque as mãos sobre a máscara, conforme mostrado na figura 5, e inspire vigorosamente. Se o ar sair pelas bordas da máscara ou se penetrar no interior da mesma pelas bordas, arrume a posição da semi-máscara no rosto e, se for necessário, aperte o elástico quando estiver provido de passante/irantes.
6. Substitua a máscara imediatamente se tiver dificuldades de respiração ou se a máscara sofrer danos, ou ainda se houver problemas de aderência ao rosto. Respeitar estas instruções atentamente é essencial para uma utilização segura do respirador.

ADVERTÊNCIAS: [EPI – Equipamento de Protecção Individual]

Se for impossível obter uma adesão adequada da máscara ao perfil do rosto, não entrar em ambientes com risco potencial. /

Não respeitar as prescrições contidas nesta nota pode acarretar uma utilização errada do EPI e causar doenças e morte. /

Um respirador escolhido adequadamente é essencial para proteger a saúde do operador. Antes de utilizar o EPI, consultar uma pessoa formada em Higiene Industrial ou pessoal experiente em Segurança Ocupacional para determinar a idoneidade ou não idoneidade à utilização. / Este produto não fornece oxigénio. Deve ser utilizado somente em ambientes adequadamente ventilados com teor de oxigénio suficiente para manter a vida. Os limites referentes à presença de oxigénio num determinado contexto para a utilização destas máscaras podem variar de país a país, pelo que pedimos que se faça referência aos parâmetros definidos no país de utilização. Em todo caso, a Eleco s.r.l. desaconselha uma utilização em ambientes com concentrações de oxigénio inferiores a 19,5%. / Não utilizar quando as concentrações de contaminantes forem imediatamente perigosas para a saúde ou para a vida. / Não utilizar em atmosfera onde houver perigo de explosão. / Abandonar imediatamente a área de trabalho se (a) tiver dificuldades de respiração, ou (b) se notar uma sensação de angústia ou vertigens. / Pelos de barba e afecções respiratórias podem reduzir a eficiência destas semi-máscaras filtrantes. / Não modificar nem alterar a semi-máscara filtrante de nenhuma forma. / Apenas para utilização única. Não necessita de manutenção. / Eliminar a semi-máscara depois de cada utilização. / Conservar as semi-máscaras ainda não utilizadas na respectiva embalagem íntegra em ambiente distante da luz do sol. – O código de identificação do modelo está indicado na embalagem do produto.