

VÁLVULA BIOSAFE

PT

INDICAÇÕES:

A válvula Biosafe é um dispositivo para a colheita e infusão de líquidos sem agulha. A válvula é compatível com os seguintes dispositivos médicos providos de ligações luer macho:

Conjuntos de administração,
Prolongadores, Seringas/seringas
preenchidas, Cateteres venosos centrais,
Rampas de torneiras, Torneiras.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

1. Abrir a embalagem pelo ponto de abertura e tirar a cápsula de proteção (Fig.1).

2. Ligar o conector luer fêmea do cateter ou do prolongador ao fecho luer macho da válvula Biosafe (Fig. 2).

3. Limpar o lacre de silicone aplicado no LL/fêmea da válvula Biosafe para garantir uma maior segurança. Ao efetuar esta operação, tomar cuidado para não contaminar o dispositivo.

4. Ligar a conexão terminal macho do dispositivo de infusão ou da seringa à válvula Biosafe, primeiro exercendo pressão e depois girando o dispositivo até obter a respetiva fixação. Manter os dois dispositivos coaxiais durante esta operação. Não usar agulhas.

5. Para desligar, girar o dispositivo de infusão ou a seringa no sentido inverso até obter a respetiva separação. Não remover a válvula Biosafe do cateter do doente ou do dispositivo de infusão (Fig. 3).

6. Desinfetar a válvula Biosafe com solução não alcoólica após cada utilização para uma melhor técnica asséptica.




Biosafe é um sistema fechado e não necessita de cápsulas de proteção.

Produto estéril e apirogénico.

ADVERTÊNCIAS:

- Adotar uma técnica asséptica.
- Não utilizar com agulhas.
- Utilizar somente se a embalagem estiver intacta.
- Esterilização garantida só se a embalagem estiver intacta.
- Este dispositivo deve ser utilizado uma só vez, num único doente, e deve ser descartado imediatamente após o uso. A reutilização não está prevista porque o dispositivo perde a esterilização. O risco associado com a sua reutilização é a contaminação do próprio dispositivo, podendo levar à infeção do doente, causa possível de doença ou de morte dele.

A ARIES ressalta a importância de uma utilização correta do dispositivo segundo as instruções de uso indicadas e somente por pessoal médico autorizado, para evitar danos no doente ou no próprio utilizador/operador.

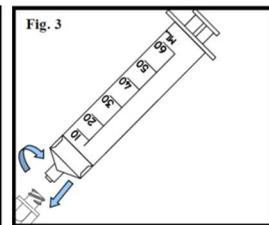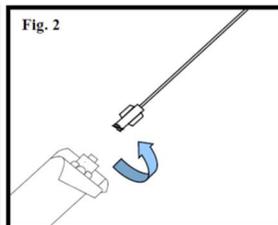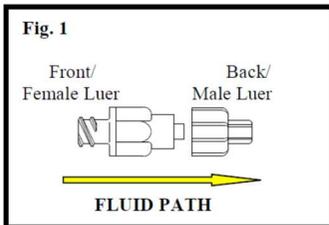

REF = Catalogue number

LOT = Batch code

= Use-by date

= Manufacturer

STERILE **EO** = Sterilized using Ethylene Oxide

= Disposable device. Do not re-use

= This device does not contain latex

Read instruction for use carefully

= Date of manufacture

= Fragile

= High

= Keep between 0+40 °C

= Keep dry

= Keep away from sunlight