

CAMPO DE UTILIZAÇÃO: Roupas de proteção contra riscos de leve entidade. N.B.O produtor/distribuidor NÃO assume-se a responsabilidade de proteção contra riscos derivantes de usos diferentes daqueles contemplados no campo de utilização.

USO: Roupa profissional para uso genérico só para riscos mínimos. Cumpre o Regulamento da UE 2016/425.

EMBALAGEM E ARMAZENAGEM: As roupas são embaladas cada peça numa bolsa de polietilene com indicação do campo de utilização. Devem ser armazenadas na embalagem original, num lugar limpo e enxuto, longe de fontes luminosas e de calor.

ADVERTÊNCIAS: As roupas NÃO protegem contra nenhuma contaminação química, bacteriana, térmica, etc. As roupas NÃO são anti-incêndio, isolantes, impermeáveis, estéreis, etc. A GIMA e os seus distribuidores NÃO assumem-se qualquer responsabilidade pelos usos impróprios do produto. A responsabilidade de identificação e escolha do DPI (Dispositivo de Proteção Individual) adequado ao tipo de risco presente no ambiente de trabalho é tarefa do empreendedor, (características do dispositivo e categoria de pertinência), portanto é necessário que, antes de usar, seja verificada a idoneidade das características do presente modelo com respeito às próprias exigências. Antes de usar controlar que a roupa esteja em perfeitas condições, íntegra e limpa. No caso a roupa estivesse descosturada, rasgada ou suja, substituí-la.

LAVAGEM: Ver etiqueta costurada dentro da roupa. Em caso de suspeita de contaminação, lavar separadamente com luvas e outro equipamento de protecção das vias aéreas e dos olhos; adicionar ao detergente um aditivo desinfectante antibacteriano e virucida.