




# GIMA

## ZOCCOLO PROFESSIONALE PROFESSIONAL CLOG

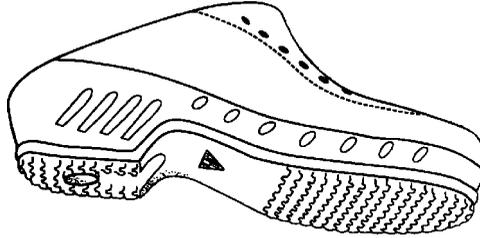

**MANUALE D'USO E MANUTENZIONE  
USE AND MAINTENANCE BOOK  
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN  
BETRIEBS UND WARTUNGSANWEISUNGEN  
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO  
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO  
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
دليل الإستعمال والرعاية**

**ATTENZIONE:** Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

**ATTENTION:** The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

**AVIS:** Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

**ACHTUNG:** Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und verstanden haben, bevor sie das Produkt benutzen.

**ATENCIÓN:** Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

**ATENÇÃO:** Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes de usar o produto.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.

**الحذر:** على العمال قراءة وفهم هذا الدليل بكامله قبل البدء باستخدام المنتج.

CE





## INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO



Controlar a integridade da sola antes de usar os tamancos. Recomenda-se vivamente de lavar as solas com água e uma escôva macia, e enxugá-las bem antes de usar os tamancos pela primeira vez.

Limpar estes tamancos só com água e uma escova macia. Nunca usar álcool e derivados de petróleo como gasolina, diluentes, petróleo, nem agentes químicos. Estas substâncias poderiam danificar os materiais de composição, provocando um enfraquecimento não visível imediatamente, comprometendo as características de proteção originais. 

Manter os tamancos enxutos e limpos, num lugar adequado, em temperatura ambiental. nunca por os tamancos molhados em contacto com uma fonte de calor, mas pô-los sempre para enxugar num lugar bem ventilado, em temperatura ambiental.

Com a colaboração de uma equipe de técnicos modeladores, moldadores e peritos no sector, foi feito este **tamanco** altamente **tecnológico**, cujas características são:

- 1) **Unisex** – para homem, mulher, jovem
- 2) **Anatômico** para perfeito apôio do pé
- 3) **Anti-escorregamento**, graças ao desenho especial da planta-salto.
- 4) **Antiestático** para descarregar a eletricidade do corpo.
- 5) **Esterilizável** em autoclave a **135 graus**.



6) **Arejado** através de furos na parte superior e na sola.

Estas características técnicas, unidas ao conforto, a leveza, a resistência ao desgaste, permitiram de obter a homologação **Europa CE**.