



Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

---

**BACINELLE IN PLASTICA AUTOCLAVABILI**  
**AUTOCLAVABLE PLASTIC BASINS**  
**CUVES EN PLASTIQUE STÉRILISABLES EN AUTOCLAVE**  
**CUBETAS DE PLÁSTICO PARA AUTOCLAVE**  
**BACIAS EM PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEIS**  
**KUNSTSTOFFSCHALEN IN AUTOKLAVEN STERILISIERBAR**  
**ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ**  
**أحواض بلاستيكية قابلة للتعقيم بالأوتوكلاف**

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guía de uso - Guia para utilização  
Gebrauchs- und instandhaltungsanleitung - Οδηγίες χρήσης - دليل الإستعمال والرعاية

Antes de proceder à utilização do produto, proceda à esterilização.

O produto é autoclavável até uma temperatura máxima de 137°C; mas, antes de proceder a esta operação, é aconselhável lavá-lo em máquinas de lavar louça segundo as normas ISO 15883. Coloque o produto limpo e livre de forma a que tanto na lavagem como durante a esterilização não existam obstruções para a circulação correta de água e vapor. Evite a esterilização a seco e a utilização de solventes ou substâncias abrasivas para a limpeza, utilize apenas produtos compatíveis com polipropileno. Não conserve abaixo dos 4°C. Vida útil do produto de cerca de 36 meses.



No fim do ciclo de vida do produto, cumpra as normas em vigor em matéria de eliminação. Não disperse no ambiente!

**REF****26630 - 26631 - 26632 - 26633 - 26635  
26636 - 26638 - 26639 - 26640**

Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1  
20060 Gessate (MI) Italy  
Made in UK

