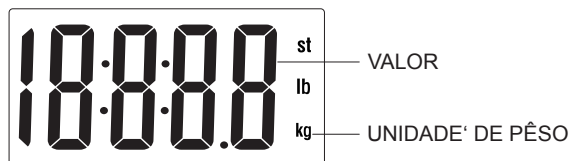


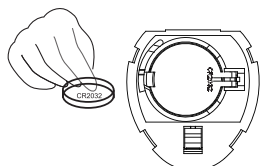
**BILANCIA IN PLASTICA ULTRASOTTILE
ULTRA SLIM PLASTIC BODY SCALE
BALANCE EN PLASTIQUE ULTRA MINCE
ULTRADÜNNE PERSONENWAAGE
BÁSCULA DE PLÁSTICO ULTRA FINA
BALANÇA DE PLÁSTICO SUPER FINA
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΗ
WAGA PLASTIKOWA ULTRACIENKA**

ميزان من البلاستيك رقيق جدا

**MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN
BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI I KONSERWACJI
دليل الإستعمال والرعاية****ATTENZIONE:** Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.**ATTENTION:** The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.**AVIS:** Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.**ACHTUNG:** Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und verstanden haben, bevor sie das Produkt benutzen.**ATENCIÓN:** Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.**ATENÇÃO:** Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes de usar o produto.**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.**UWAGA:** przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu operatorzy muszą przeczytać podręcznik i upewnić się, iż wszystko to, co jest w nim napisane jest dla nich jasne i zrozumiałe**الحذر:** على العمال قراءة وفهم هذا الدليل بكامله قبل البدء باستعمال المنتج.**REF** 27262Teme l'umidità
Keep away from humidityConservare al riparo della luce solare diretta
Protect against direct sunlightFabbricante
ManufacturerGima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Made in P.R.C.

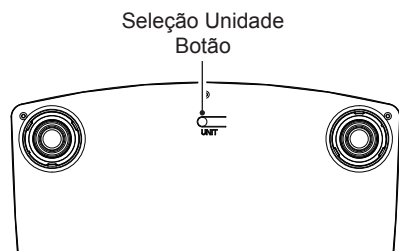
DISPLAY LCD FULL**CARACTERÍSTICAS & ESPECIFICAÇÕES**

- Auto ON
- LCD Extra Large 74x38mm
- Unidades de Pêso: kg, lb, st:lb
- Capacidade: 150kg/330lb/23st:8lb
- Escala: 0.1kg/0.2lb/0.2lb (1lb, ≥ 20 st)
- Mensagem de sobrecarga: “ — — — — ”
- Mensagem de pilha sem carga: “Lo”
- Bateria: 1 x CR2032

PARA TROCAR A PILHA

- Verificar que os pólos +/- estejam na posição certa.
- Usar um instrumento adequado para facilitar a remoção da pilha do seu alojamento se necessário.

Remover a fita isoladora antes de usar.

TECLAS DE FUNÇÃO**INSTRUÇÕES DE USO**

- 1) Apertar ao botão **UNIT** para ligar e selecionar a unidade de medida.
- 2) Colocar a balança sobre uma superfície sólida e plana, deixar que a balança se desligue automaticamente.
- 3) Subir sobre a base da balança. O display pisca até que se completa a pesagem. Após 10 segundos desliga-se automaticamente.
- 4) Se não for usada, se desliga automaticamente
- 5) Quando não se usa o produto, guardá-lo em posição horizontal sem apoiar em cima nenhum objeto.

**Advertências:**

- Não usar a balança sobre um tapete
- Para garantir a leitura exacta do peso, depois de ter movido a balança para um outro lugar, é aconselhável ligá-la (ou tocá-la) e aguardar que se desligue automaticamente. Depois disto podem subir novamente sobre a balança para medir o vosso peso. Em caso contrário, a balança poderia ler um peso maior do que o real.



Eliminação: O produto não deve ser eliminado junto com outros detritos domésticos. Os utilizadores devem levar os aparelhos a serem eliminados junto do pontos de recolha indicados para a re-ciclagem dos aparelhos elétricos e eletrônicos.

Para maiores informação sobre os locais de recolha, entrar em contacto com o próprio município de residência, com o serviço local de eliminação de detritos ou com a loja onde foi comprado o produto. Em caso de eliminação errada, poderiam ser aplicadas multas conforme às leis nacionais.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Parabéns por ter adquirido um nosso produto. Este produto responde à padrões de qualide elevados seja quanto ao material que para a fabricação. A garantia fica válida por 12 meses a partir da data de fornecimento GIMA. Durante o período de validez da garantia, serão consertadas ou trocadas gratuitamente todas as partes com defeito de fábrica bem verificados, excepto as despesas de mão de obra ou eventuais despesas de trasferimento, transportes e embalagens.

São excluídas da garantia todas as partes desgastáveis. A troca ou o conserto feito durante o período de validez da garantia não tem o efeito de prolongar a duração da mesma.

A garantia não é válida em caso de: conserto feito por pessoal não autorizado ou com sobressalentes não originais, avarias ou estragos provocados por negligência, choques ou uso errado. GIMA não responde de malfuncionamentos de aparelhos eletrônicos ou software provocados por factores exteriores como: quedas de tensão, campos electro-magnéticos, interferência de ondas rádio, etc. A garantia decai se quanto acima não for respeitado e se o número de matrículaçãõ (se presente) tiver sido retirado, cancelado ou alterado.

Os produtos considerados defeituosos devem ser deolvidos só e exclusivamente ao revendedor que fez a venda. O material enviado directamente à GIMA será rejeitado.