



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CARRELLO EXCEL
EXCEL TROLLEY
CHARIOT EXCEL
CARRO EXCEL
CARRINHO EXCEL
WAGEN "EXCEL"
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ EXCEL

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guía de uso
Guia para utilização - Gebrauchs ungsanleitung - Οδηγίες χρήσης

REF 27440 - 27441



Distribuito da / distributed by / distribué par / distribuido por /
vertrieben von / distribuído por / Διανέμεται από:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in Italy

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante
/ Hersteller / Κατασκευαστής:

SCROSATI ARREDAMENTI METALLICI SRL

Via Vittorio Veneto 95, 21015 Lonate Pozzolo (VA)
scrosati@scrosati.com

INTRODUÇÃO

Aconselha-se a leitura atenta deste manual antes de utilizar o equipamento.

DESCRIÇÃO

Este artigo é um carrinho produzido em aço pintado com 3 ou 4 prateleiras fixas. É um carrinho de serviço para uso hospitalar.

O carro Excel é um carro prático adequado para sustentar e/ou transportar mequenos aparelhos médicos.

COMPONENTES


- 3 prateleiras cód.27440
- 4 prateleiras cód.27441
- 2 pernas

Saco com material de montagem:

- 4 rodas



- 12 parafusos TTBE 8X25 cód.27440
- 16 parafusos TTBE 8x25 cód.27441
- 12 anilhas 8X16 cód.27440
- 16 anilhas 8X16 cód.27441
- 12 parafusos TT 8X16 FE cód.27440
- 16 parafusos TT 8X16 FE cód.27441
- 2 CHAVES ALLEN

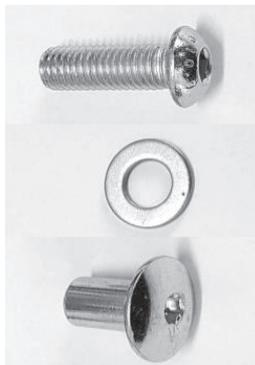


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Inicie a fase de montagem preparando um plano de trabalho horizontal e estável.

Aparafuse as rodas na base de ambas as pernas.

Para fixar as prateleiras na estrutura, comece de um lado e pegue nos parafusos de junção.

Parafusos de junção	Parafuso e anilha para inserir no interior da prateleira	Parafusos TT para inserir na estrutura no lado exterior da perna

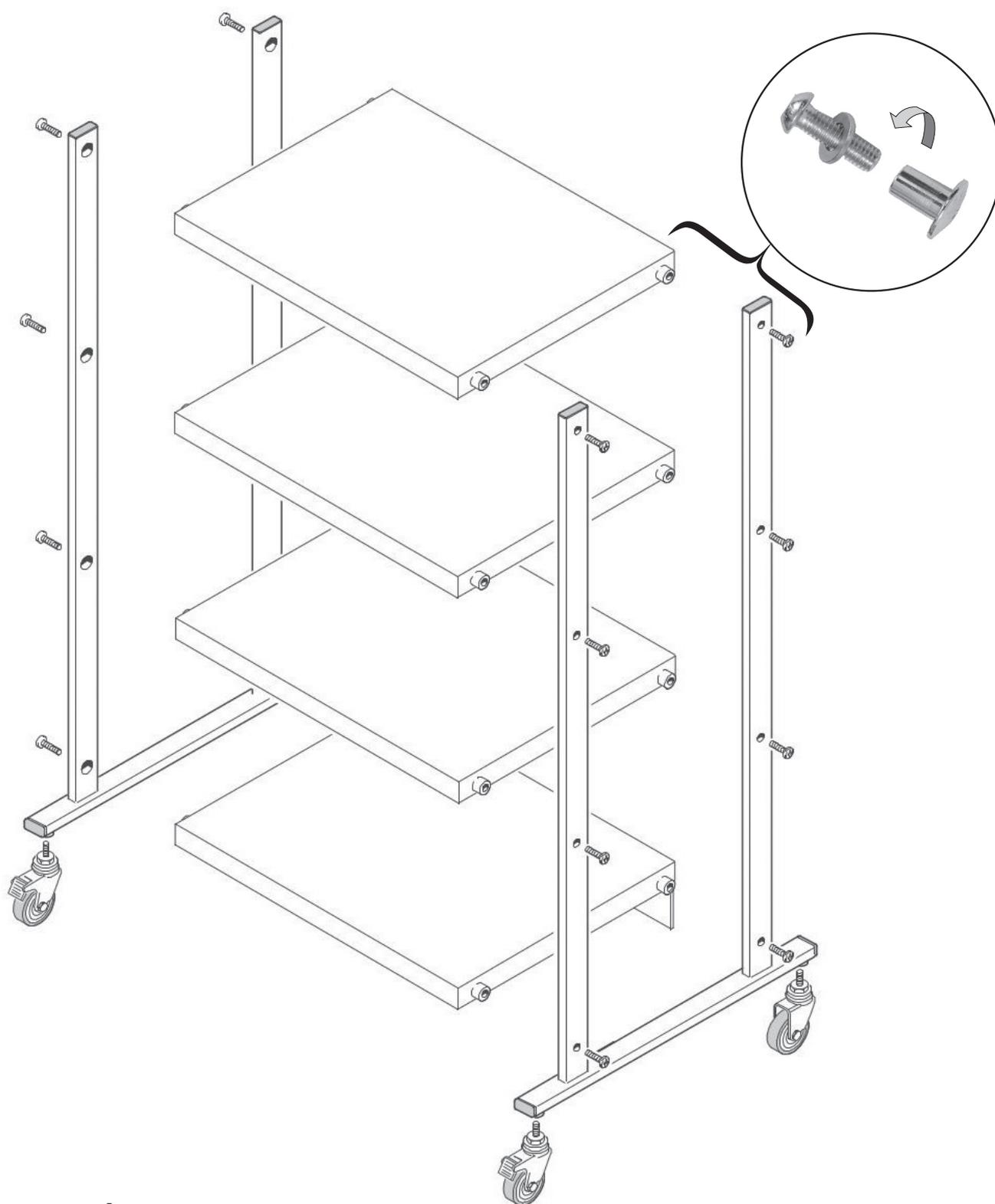

FICHA TÉCNICA

Medidas	Carrinho de 3 prateleiras: 66x68x h 81 cm Carrinho 4 prateleiras: 66x68x h 111 cm Prateleira: 60 x 45 x h 2,5 cm Caixa: 96,5 x 18,5 x h 74 cm
Peso	Carrinho de 3 prateleiras: 27 kg (28,8 kg com caixa) Carrinho de 4 prateleiras: 35,5 kg (37,3 kg com caixa)
Capacidade máxima	80 kg

AVISOS DE UTILIZAÇÃO

- Verifique se as contraporcas estão bem apertadas.
- Respeite as capacidades máximas indicadas nas fichas técnicas.
- Evite o contacto direto com feridas abertas.
- Não está adequada para uso ao ar livre.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Utilize apenas peças sobressalentes originais.
- Inspeccione periodicamente todos os pontos de fixação.
- Para a conservar nas melhores condições, é aconselhável evitar a exposição prolongada à luz solar, o contacto com ambientes salinos e o armazenamento em ambientes muito húmidos.
- Lave as superfícies de aço inoxidável com água e sabão e use desinfetantes específicos.
- Enxagúe com um pano molhado e seque com cuidado.
- Não deite nas superfícies detergentes à base de cloro ou amoníaco, substâncias gordurosas e oleosas.
- Na limpeza não use utensílios que contenham ferro. Se for necessária a desinfestação, use apenas produtos adequados não corrosivos.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.