

**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1  
20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com  
export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

**REF** 27735 - 27737  
27740 - 27741

 **Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1  
20060 Gessate (MI) Italy  
Made in Italy



IT - Manuale d'uso  
GB - User instructions  
SI - Navodila za uporabo  
ES - Instrucciones de usuario  
PT - Instruções de montagem  
GR - Αλτςζηηθό ηηπαιέηαο  
DK - Brugervejledning  
PL - Instrukcja Użytkowania  
FR - Instructions de  
fonctionnement  
NL - Gebruikershandleiding  
DE - Gebrauchsanweisungen

### Instruções de limpeza

Todos os componentes podem ser lavados a água quente e sabão neutro.

Em alternativa, o alteador pode ser totalmente imerso em água e/ou esterilizado (sem as dobradiças) por autoclave a 85°C durante 1 minuto.

### Precauções

Não exceda a capacidade máxima de carga: 225 kg. Assegure-se sempre que o alteador está fixado com segurança antes de usar.

Não se apoie no alteador para se levantar ou baixar.

### PT - Instruções de montagem

Encaixe as 2 dobradiças em forma de "L" no alteador de sanita Gima: vire o artigo ao contrário numa superfície plana e insira as dobradiças nas ranhuras. Empurre com cuidado a dobradiça e rode o manípulo no sentido dos ponteiros do relógio até que o fio se prenda. Posicione as dobradiças deixando uma distância considerável em relação à sanita.


Levante o assento da sanita existente e coloque o alteador Gima directamente na sanita, posicionando as dobradiças contra a parte posterior da sanita e a parte frontal contra a frente da sanita. Rode os fixadores de ajuste no sentido dos ponteiros do relógio até os amortecedores de borracha ficarem apertados com firmeza à sanita.

**ATENÇÃO!** Os fechos laterais foram especialmente concebidos para serem facilmente rodados/apertados.

Assim sendo, não continue a rodar quando sentir alguma resistência, visto que isto indica que o fecho lateral já está seguro.

Assegure-se que o alteador está fixado com segurança antes de usar.

Dettagli tecnici - Technical Details - Tehnicne lastnosti  
Datos técnicos - Especificações técnicas - Σεινικά υαράκηρηρήςα  
Tekniske detaljer - Dane Techniczne - Détails techniques  
Technische info - Technische Daten

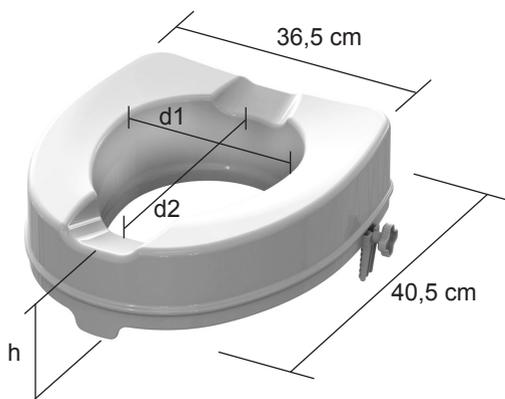

<b>h</b>	10 cm	14 cm
<b>d1</b>	20,5 cm	20,5 cm
<b>d2</b>	25,5 cm	25,5 cm