



Bolsa de água quente



Bolsa de água quente

Instruções para o uso

Para garantir uma longa duração, aconselhamos de seguir as instruções abaixo. Não usar água fervente e encher a bolsa só até o ¼ da sua capacidade. Antes de fechar com a tampa, fazer sair o vapor. Enxugar a bolsa e guardar longe de fontes de calor.

Recomendações para a utilização em segurança da bolsa de água quente

Encher de água a uma temperatura não superior a 45 graus centígrados. Não apertar a bolsa durante a sua utilização. Conservar a bolsa a uma temperatura compreendida entre os 10 e os 27 graus centígrados. Verificar sempre o estado de conservação da borracha e a estanqueidade antes de cada utilização. Certificar-se de que a tampa está bem apertada. Evite manter a bolsa em contacto directo com a pele ao consumi-la, insira-a em um recipiente de tecido. É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

MD

Dispositivo medico
Medical Device
Dispositif medical
Medizinprodukt
Izoporno vovokoyed robitel
Producto sanitario
Dispositivo medico

Sacchetti
Enny
Dasi mite
Fist
Baqile
Focha tope
Prato de entrega



28600-M-Rev.1.10.21

REF **28600**

LOT **000013**



8 023279 286007



Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China



05
PP



508489
Size 22x44.5 cm