



G I M M A

Bolsa de água quente

Instruções para o uso

Par garantir uma longa duração, aconselhamos de seguir as instruções abaixo, Não usar água fervente e encher a bolsa só até o $\frac{3}{4}$ da sua capacidade, Antes de fechar com a tampa, fazer sair o vapor, Enxugar a bolsa e guardar longe de fontes de calor. Prazo de validade 3 anos

Recomendações para a utilização em segurança da botija de água quente

Encher de água a uma temperatura não superior a 45 graus centígrados - Não apertar a botija durante a sua utilização
Conservar a botija a uma temperatura compreendida entre os 10 e os 27 graus centígrados - Verificar sempre o estado de conservação da borracha e a estanquidade antes de cada utilização. Certificar-se de que a tampa está bem apertada. Evite manter a bolsa em contato direto com a pele; ao contrário, insira-a em um recipiente de tecido. É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

MD

Dispositivo medico
Medical Device
Dispositif médical
Medizinprodukt
Ιατροτεχνολογικό προϊόν
Producto sanitario
Dispositivo médico

REF 28601

LOT 000011



Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Gima S.p.A - Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) - Italy
Made in China



S09293
Size 22x44,5 cm