

---

**PORTUGUESE**

## **SACOS DE URINA**

### **UTILIZAÇÃO PREVISTA**

- Utilizar apenas para recolha de urina e drenagem.
- Não utilize como instrumento de medição e para testes de laboratório.
- As indicações do volume são aproximadas

### **MODO DE USO E CONSERVAÇÃO**

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.











- Verificar a integridade do produto e a data de validade antes de utilizar (Se o produto foi indevidamente conservado e uti-

lizado de forma inadequada, a Gima não assumirá nenhum tipo de responsabilidade que daí possa advir).

- A bolsa deve ser sempre pendurada num suporte, posicionando-a abaixo do nível da bexiga urinária para evitar o refluxo, na posição vertical e com o tubo de adução voltado para cima.
- O modelo do saco de perna tem de ser fixado à perna por meio de bandas elásticas, posicionando-o abaixo do nível da bexiga, para evitar o refluxo
- Durante a utilização, evite de apertar, beliscar ou estrangular o tubo para não interromper o fluxo de urina para a bolsa.
- Guardar os sacos longe de solventes, produtos químicos e fontes de calor.
- Não utilizar com utensílios aguçados.
- Na eventualidade do saco ter ar, esvaziá-lo antes de utilizar.
- Para garantir o uso de todo o volume do saco, evite a presença de ar também durante a utilização.
- Verificar se a válvula de despejo está bem fechada antes de utilizar.
- A reutilização da bolsa pode comportar um risco de infeção.
- A bolsa deve ser substituída antes de atingir o nível máximo.
- Fixe firmemente o conector à sonda ou ao adaptador para o pénis.

### INDICAÇÕES PARA A ELIMINAÇÃO

- Utilizar luvas de protecção.
- O saco é de uso único. Eliminar o saco depois de ter sido utilizado ao abrigo das disposições legais em vigor.

	Fabricante	<b>REF</b>	Código produto
	Data de fabrico	<b>LOT</b>	Número de lote
	Dispositivo descartável, não reutilizar		Data de validade
	Distribuído por		Consulte as instruções de uso
	Guardar ao abrigo da luz solar		Armazenar em local fresco e seco
	Não estéril	<b>MD</b>	Dispositivo médico
	Dispositivo médico em conformidade com a regulamentação (UE) 2017/745		

### CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

<b>REF</b>	800160	(GIMA 28688)
	800161	(GIMA 28690)
	800162	(GIMA 28689)
	800163	(GIMA 28692)
	802220	(GIMA 28694)
	802221	(GIMA 28691)
	802222	(GIMA 28695)
	802223	(GIMA 28693)
	804257	(GIMA 28707)
	804258	(GIMA 28708)

 **TECNOCLINIC, S.A.**  
Ctra. de Prats de Lluçanès, Km. 2.300 P.I.  
La Llanera 08208 Sabadell (Barcelona) - Spain  
Made in Spain

 **Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

