




www.led.it

(PT) KIT ASPIRAÇÃO para o ASPIRADOR DE FUMAÇAS CIRURGICAS

REF 00900.02

LED SpA
Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

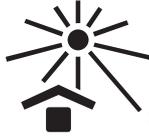

50°C
0°C
RH
20% - 80%



(IT) (EN) (ES) (FR) (DE) (PT) (TR)

IA00900-01Ar2
ed.05/2012 2012 (C) LED SpA

Verifique status do produto antes de usar.

Produto descartável. Não reutilize.

Não inalar líquido.

O produto tem que ser eliminado conforme com os procedimentos da eliminação de residuos hospitalares.

As conexões devem ser realizados por pessoal treinado.

O produto é fornecido para a aspiração de cirurgias a fumaças duranteas intervenções "a céu aberto" (por exemplo, laparotomia). A conexão típica é:

- conexión sobre 00900.01 (disponível separadamente) (im. A -part. 4)
- conexión sobre série XXX00900.XXX (disponível separadamente) (im. A -part. 2)

Para a conexão a um acessorio endoscopico (es. intervenção de laparoscopia) o outro sistema de captação compatível para diametro de conexão (22mm).


FIG.-IM.-BILD-GRAFIC A

1




XXX00900.XXX

3

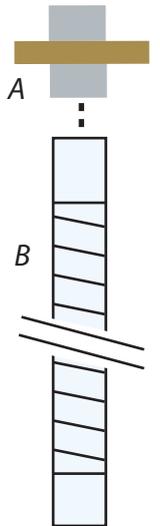

00900.02


5

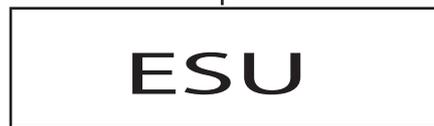

ESU

4

00900.01

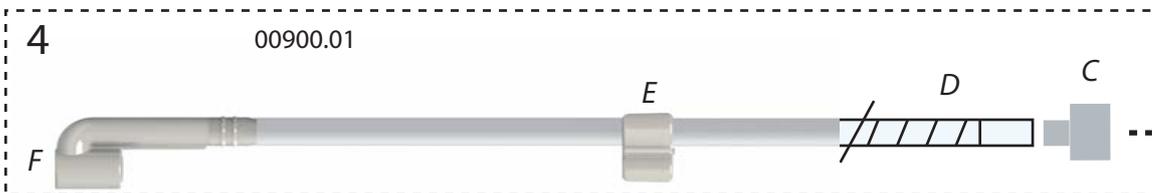

F

E

D

C

1 ASPIRADOR DE FUMAÇA* série XXX10200.10 - XXX10200.10/115V

2 FILTRO* série XXX00900.XXX

3 KIT ASPIRAÇÃO (00900.02) - A Filtro - B Tubo dia. 22mm largura 2,4 mt

4 4 KIT ASPIRAÇÃO CANETA (00900.01)* C Adaptador 10mm/22mm . D Tubo dia. 10 mm Largura 1,8 mt E Clipa para o fisaje do tubo na caneta - F Adaptador para a caneta

5 Detalhe da caneta* com 00900.01, a caneta tem que ser conectada à sua unidade electrocirurgica (ESU *). * Não incluído

(PT)



REF 00900.02

LED SpA
Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

IA00900-02Ar2
ed.05/2012 2012 (C) LED SpA