


# **FOOTSWITCH**

REF 00304.00



1-2 cc  
4 nc  
3-5 switch

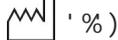

IP 67  
WATER PROOF



MADE IN ITALY

**LED SpA**  
Via M.T. Cicerone 138 03100  
Frosinone (FR) - ITALY



-10°C - 50°C



IT EN ES FR DE PT PL

IA00304.00c\_ML1  
ed.2022-11 2022 (C) LED SpA

**(PT)** PEDAL À PROVA DE ÁGUA (5 pin)

O produto é projetado para o controle remoto das unidades eletrônicas compatíveis a través do pedal.

Verifique o status do produto antes de usalo. Desperdiçar os produtos defeituosos.

Este produto é compatível com versões de equipamentos que incluem -lo, consulte as instruções da unidade.

As conexões devem ser realizados por pessoal treinado.

Instalação:

- Insira o conector no conector produto específico da unidade eletrônica, prestando atenção à direcção de inserção (fig. A - parte 1-2).
- para fixar o produto na unidade girar a ponteira (fig. A - parte 3).

Vire a unidade para operação de teste ativando o pedal (fig. A - parte 4).

FIG.-IM.-BILD-GRAFIC-RYS. A



**(PT)** PISAR = ACTIVAÇÃO / SIN PISAR = NENHUMA ACTIVAÇÃO