


FOOTSWITCH UDI 8 03 36 38 3 2 0 7 3 0

REF 00305.04 L-E cut N-E coag IP 67 WATER PROOF 1

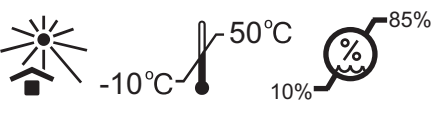

cable 5 mt
LED SpA
Via M.T.Cicerone 138
03100 Frosinone (LT) - ITALY



IT EN ES FR DE PT PL IA00305-04W_ML1 ed. &S %' 20'' (C) LED SpA

(PT) DUPLO PEDAL Á PROVA DE ÁGUA (300-400)

O produto é projetado para o controle remoto das unidades eletrônicas compatíveis a través do pedal.

Verifique o status do produto antes de usalo. Desperdiçar os produtos defeituosos.

Este produto é compatível com versões de equipamentos que incluem -lo, consulte as instruções da unidade.

As conexões devem ser realizados por pessoal treinado.

Instalação:

- Insira o conector no conector produto específico da unidade eletrônica, prestando atenção à direcção de inserção (fig. A - parte 1-2).
- para fixar o produto na unidade girar a ponteira (fig. A - parte 3).

Vire a unidade para operação de teste ativando o pedal (fig. A - parte 4).

FIG.-IM.-BILD-GRAFIC-RYS. A



(PT) PISAR = ACTIVAÇÃO / SIN PISAR = NENHUMA ACTIVAÇÃO
AMARELO = CORTE / AZUL = COAGULAÇÃO