



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CASCHETTO 2 LED CON 5 LENTI

**2 LED HEADBAND ILLUMINATED MAGNIFIER
WITH 5 LENSES**

**LOUPE LUMINEUSE FRONTALE 2 LED
AVEC 5 LENTILLES**

LUPA ILUMINADA FRONTAL 2 LED CON 5 LENTES

**LUPA COM FAIXA DE CABEÇA, ILUMINADA
POR 2 LED, COM 5 LENTES**

2-LED-KOPFBANDLUPE MIT 5 LINSEN

**2 PANNBAND FÖRSTORINGSGLAS MED LED-LJUS
MED 5 LINSER**

**ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ
2 LED με 5 φακούς**

REF MG8001-H (GIMA 31168)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante /
Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής / Tillverkare
NINGBO ANMAS OPTOELECTRONIC CO., LTD
A-1507, Sunshine International, Yuyao, Zhejiang, China
Made in China

Importato da/Imported by/ Importé par/
Importiert von/ Importado por/ Importado por/
Εισάγεται από:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com


www.gimaitaly.com

CE



LUPA COM FAIXA DE CABEÇA, ILUMINADA POR 2 LED, COM 5 LENTES (Com caixa de lanterna a LED destacável portátil e 11 tipos de ampliações)


Obrigado por comprar esta lupa de cabeça de regulação bimodal multifuncional com patente mais recente! Este produto pode ser utilizado para a pesca, leitura, jardinagem, intervenções de manutenção mecânica, eletrónica etc. Leia atentamente estas instruções para garantir a utilização correta.

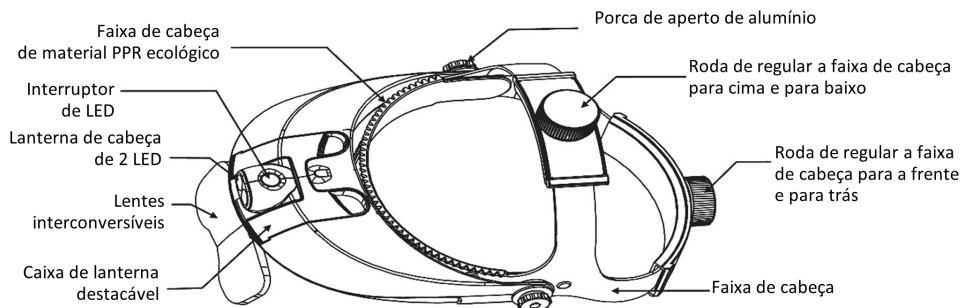


Caraterísticas principais:

1. A lupa comum para utilização na cabeça adota o modo de regulação de tensionamento dianteiro-traseiro. A utilização prolongada da lupa pode causar certa pressão nas orelhas e fazer com que as orelhas fiquem doloridas. Esta faixa de cabeça adota a regulação bimodal para resolver o problema acima.
2. A bainha de couro da faixa de cabeça da lupa de cabeça comum é feita de couro artificial de PVC, que endurece facilmente no inverno frio e é à prova de ar no verão quente, causando assim desconforto. A bainha da faixa de cabeça deste produto é formada na íntegra de PPR ecológico, e o design semiesférico na sua superfície é permeável ao ar e é confortável. A bainha da faixa de cabeça também não tem arestas cortantes.
3. A lupa comum para utilização na cabeça é fornecida apenas com quatro lentes intercambiáveis. Mas esta lupa de cabeça tem cinco lentes (com diferentes ampliações), o que pode garantir 11 tipos de ampliações diferentes e maior variedade de aplicação.


Como utilizar a caixa da lanterna destacável portátil:

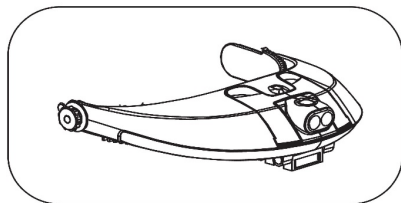


O suporte da lâmpada não pode ser rodado quando a caixa da lanterna não está puxada para fora;

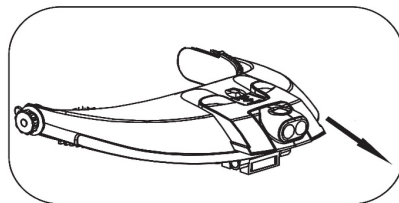

Pressione os dois pontos côncavos na caixa da lanterna com o dedo e, em seguida, puxe a caixa da lanterna ligeiramente para fora;

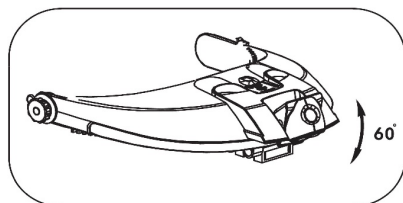

Neste momento, o suporte da lâmpada LED pode ser rodado para cima e para baixo;

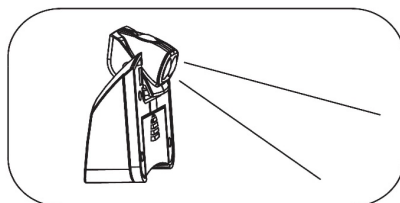

A caixa da lanterna pode ser utilizada separadamente como lanterna após ser desmontada


Instalação e desmontagem das lentes:

1. Instalação das lentes


- Limpe a superfície da lente com papel ou pano macio e limpo para evitar arranhar a superfície da lente;
- Coloque a superfície convexa da lente para fora e a superfície plana para os olhos;
- Só é necessário inserir um lado da lente (com a superfície do arco) para baixo no orifício de inserção da lente.

2. Desmontagem da lente: execute este procedimento de acordo com a ordem inversa do método acima.

3. Aquando da instalação e desmontagem da lente com frequência, coloque ou mova a lente paralelamente; caso contrário, a parte superior da lente pode ser facilmente danificada se for colocada aleatoriamente após ser retirada.

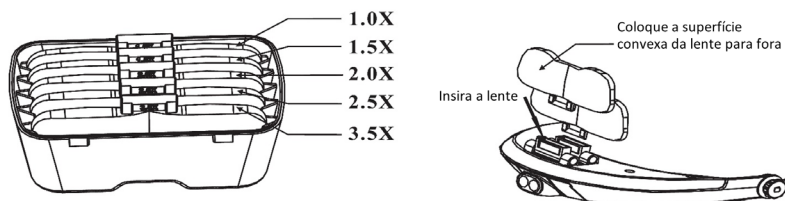



Lente de 5 tipos de ampliações

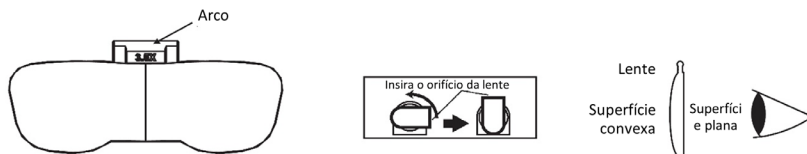


Método de regulação da faixa de cabeça:

1. Rode o manípulo de ajuste do tamanho da cabeça (A) para a amplitude apropriada enquanto ajusta o tamanho da cabeça.
2. E gire o manípulo de ajuste alto-baixo (B) para a amplitude apropriada aquando do ajuste da altura da faixa de cabeça.
3. A porca de alumínio de fixação (C) pode ajustar a posição da lente para cima e para baixo

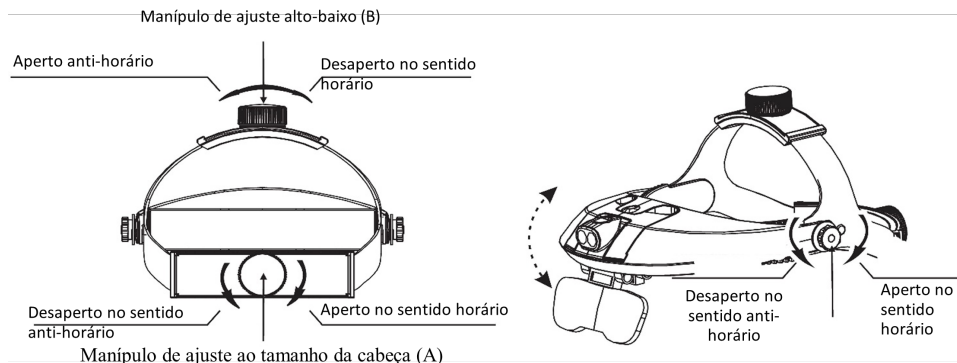


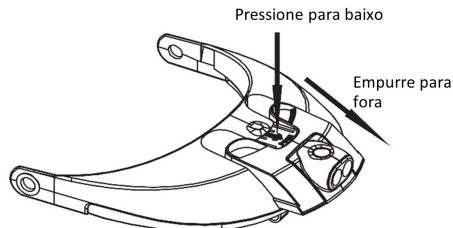Substituição da lente:


Pressione a fivela marcada com "PUSH"; empurre a caixa da lanterna para fora

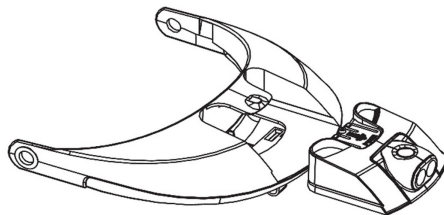

Tire para fora a caixa da lanterna

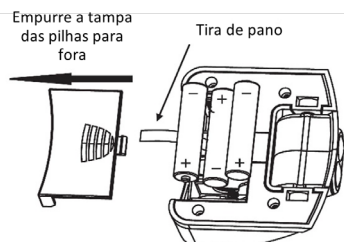

1. O derrame das pilhas, o aquecimento e as rachaduras são um dos motivos que causam avarias e danos nos LED;
2. Não utilize pilhas com tamanho, forma e desempenho diferentes;
3. Retire as pilhas quando a lâmpada LED não for utilizada durante muito tempo.

Empurre a tampa das pilhas para fora de acordo com o sentido da seta, puxe a tira de pano para cima para retirar as 3 baterias usadas e coloque baterias novas dentro.

Ampliações	Distância para os objetos observados
1.0x	300~350 mm
1.5x	240~260 mm
2.0x	215~235 mm
2,5x	205~225 mm
3.0x	160~180 mm
3,5x	135~145 mm
4.0x	125~135 mm
4.5x	110~130 mm
5.0x	100~120 mm
5.5x	80~95 mm
6.0x	60~85 mm

Ampliações da lente:









1. As ampliações da lente de placa individual são 1,0x, 1,5x, 2,0x, 2,5x, 3,5x.
2. As ampliações da lente de placa dupla são 3,0x, 4,0x, 4,5x, 5,0x, 5,5x, 6,0x.
3. As ampliações estão marcadas no meio da lente.
4. A tabela da direita mostra a proporção da distância entre as ampliações e os objetos observados.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses



Eliminação: O produto não deve ser eliminado junto com outros detritos domésticos. Os utilizadores devem levar os aparelhos a serem eliminados junto dos pontos de recolha indicados para a re-ciclagem dos aparelhos elétricos e eletrónicos

	<p>IT - Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB - Caution: read instructions (warnings) carefully FR - Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES - Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente PT - Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente DE - Achtung: Anweisungen (Warnings) sorgfältig lesen SV - Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga GR - Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενοστάσεις)</p>
	<p>IT - Codice prodotto GB - Product code FR - Code produit ES - Código producto PT - Código produto DE - Erzeugniscode SV - Produktkod GR - Κωδικός προϊόντος</p>
	<p>IT - Numero di lotto GB - Lot Number FR - Numéro de lot ES - Número de lote PT - Número de lote DE - Chargennummer SV - Satsnummer GR - Αριθμός παρτίδας</p>
	<p>IT - Data di fabbricazione GB - Date of Manufacturing FR - Date de fabrication ES - Fecha de fabricación PT - Data de fabrico DE - Herstellungsdatum SV - Tillverkningsdatum GR - Ημερομηνία παραγωγής</p>
	<p>IT - Conservare in luogo fresco ed asciutto GB - Keep in a cool, dry place FR - À conserver dans un endroit frais et sec ES - Conservar en un lugar fresco y seco PT - Armazenar em local fresco e seco DE - An einem kühlen und trockenen Ort lagern SV - Förvara på svalt och torrt ställe GR - Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον</p>
	<p>IT - Conservare al riparo dalla luce solare GB - Keep away from sunlight FR - À conserver à l'abri de la lumière du soleil ES - Conservar al amparo de la luz solar PT - Guardar ao abrigo da luz solar DE - Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern SV - Skyddas från solljus GR - Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία</p>
	<p>IT - Smaltimento RAEE GB - WEEE disposal FR - Disposition DEEE ES - Disposición WEEE PT - Disposición WEEE DE - Beseitigung WEEE SV - Avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) GR - Διάθεση WEEE</p>
	<p>IT - Prodotto conforme alla Direttiva Europea GB - Product complies with European Directive FR - Ce produit est conforme à la directive européenne ES - Producto conforme a la Directiva Europea PT - Produto em conformidade com a Diretiva Europeia DE - Produkt gemäß EU-Richtlinie SV - Produkt som överensstämmer med EU-direktiv GR - Προϊόν σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία</p>