




GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

MONOFILAMENTO
MONOFILAMENT
MONOFILAMENT
EINZELFADEN
MONOFILAMENTO
MONO-FILAMENTO
MONOMHMATIO

ديجولنا طيخنا

GIMA

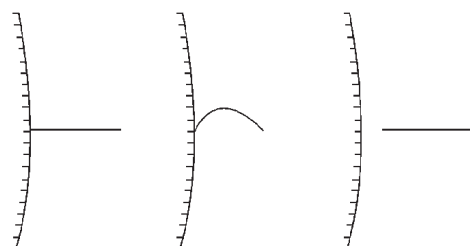

PICTURE 1

PICTURE 2

PICTURE 3



RIGHT

LEFT

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China



REF 31282

GIMA

sensorial que pode ser causada, por exemplo, pela diabetes. O pé é uma das partes do corpo afetadas pelos danos causados pela neuropatia, pois a percepção sensorial periférica é comprometida; o monofilamento pode detectar a capacidade do paciente de perceber pressões moderadas.

O MONOFILAMENTO dobra a uma pressão de 10 gramas por pelo menos 50/60 vezes antes de dobrar para uma força menor; recomenda-se trocar o fio após o uso em 6/15 pacientes e permitir repouso de pelo menos 24 horas antes de ser reutilizado.

Pode funcionar perfeitamente a uma temperatura de 20/26°C com 30/50% de umidade sem deformar. Com temperatura acima de 33°C e com umidade em torno de 80%, o filamento pode se deformar e tornar o diagnóstico menos preciso.

O filamento foi testado para determinar a precisão da flexão em 10 gramas e a força de deformação foi reconhecida em +/- 10%. Substitua definitivamente o filamento após dobras 150/200.

Segure o filamento exercendo uma pressão moderada perpendicular à pele e use um movimento suave ao testar.

Fazer uma sequência de três etapas que inclua (1) tocar a pele (2) curvar o filamento e (3) levantá-lo da pele (ver figuras 1.3). Não fazer movimentos rápidos. A aproximação, contacto com a pele e o afastamento do filamento deveriam durar aproximadamente 1,5 segundos.

Pedir ao paciente de responder "sim" quando sente o filamento. Se o paciente não responde quando se toca um certo ponto do pé, continuar num outro ponto.

Quando tiver completado a sequência, REPITIR na área onde o paciente não sentiu o filamento.

Usar o filamento numa sequência casual.

A PERDA DE SENSACÃO PROTETIVA NUM QUALQUER DOS OITO PONTOS (ilustrados no esquema acima) INDICA QUE O PÉ CORRE RISCO GRAVE.

Recomenda-se desinfetar o produto após cada aplicação no paciente através do uso de desinfetante antibacteriano não alcoólico.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

PORTUGUESE

MONO-FILAMENTO

Mostrar o filamento ao paciente e encostá-lo à sua mão ou ao seu braço, para que ele perceba que não machuca.

Usar o filamento de 10 gr. para testar a sensibilidade nos pontos indicados de cada pé, como ilustrado. Usar o filamento ao longo do contorno da ulceração, calo, cicatriz ou tecido necrotizado. NÃO directamente sobre a parte.

Manter o filamento perpendicular para com a pele, e fazer um movimento delicado durante o exame.

O monofilamento é um instrumento de diagnóstico preliminar de neuropatia

M31282-M-Rev.7-12/21

REF	GB - Product code FR - Code produit IT - Codice prodotto DE - Erzeugniscode ES - Código producto PT - Código produto GR - Καθώς προϊόντος PL - Numer katalogowy SE - Produktkod RO - Cod produs HU - Termékkód SA - كود المنتج	GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 DE Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 ES Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745 PT Dispositivo médico em conformidade com o regulamento (UE) 2017/745 GR Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745 PL - Wyrob medyczny zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 SE - Den medicintekniska produkten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745 RO - Dispozitiv medical realizat în conformitate cu prevederile regulamentului (UE) 2017/745 HU - A 2017/745/EU rendeletheek megfelelő orvostechnikai eszköz SA - جهاز طبي يتوافق مع التوجيه (UE) 2017/745
LOT	GB - Lot number FR - Numéro de lot IT - Numero di lotto DE - Chargennummer ES - Número de lote PT - Número de lote GR - Αριθμός παρτίδας PL - Kod partii SE - Satsnummer RO - Număr de lot HU - Tételszám SA - رقم الدفعة	
	GB - Keep in a cool, dry place FR - À conserver dans un endroit frais et sec IT - Conservare in luogo fresco ed asciutto DE - An einem kühlen und trockenen Ort lagern ES - Conservar en un lugar fresco y seco PT - Armazenar em local fresco e seco GR - Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον PL - Przechowywać w suchym miejscu SE - Förvara på svalt och torrt ställe RO - A se păstra într-un loc răcoos și uscat HU - Száraz, hűvös helyen tárolandó SA - يحفظ في مكان بارد وجاف	
	GB Keep away from sunlight FR À conserver à l'abri de la lumière du soleil IT Conservare al riparo dalla luce solare DE Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern ES Conservar al amparo de la luz solar PT Guardar ao abrigo da luz solar GR Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία PL Przechowywać z dala od światła słonecznego SE Skyddas från solljus RO A se păstra ferit de razele soarelui HU Napfénytől védve tárolandó SA - يحفظ بعيدا عن أشعة الشمس	
	GB - Manufacturer FR - Fabricant IT - Fabricante DE - Hersteller ES - Fabricante PT - Fabricante GR - Παράγωγος PL - Producent SE - Tillverkare RO - Producător HU - Gyártó SA - الشركة المصنعة	MD
		SA - جهاز طبي GB - Consult instructions for use FR - Consulter les instructions d'utilisation IT - Leggere le istruzioni per l'uso DE - Gebrauchsanweisung beachten ES - Consultar las instrucciones de uso PT - Consulte as instruções de uso GR - Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης PL - Przeczytaj instrukcję użytkowania SE - Läs bruksanvisningen RO - Citii instrucțiunile de utilizare HU - Olvassa el a használati utasításokat SA - اقرأ بصفة وحرص تعليمات الاستخدام