



GIMA

**GUIDA RAPIDA DI PRONTO SOCCORSO
PALLONE RIANIMATORE PORTATILE**

***PORTABLE RESUSCITATOR BAG
FIRST AID BASIC GUIDE***

**BALLON DE RÉANIMATION PORTATIF
GUIDE RAPIDE DE PREMIER SECOURS**

***BALÓN REANIMADOR PORTÁTIL
GUÍA RÁPIDA DE URGENCIAS***

**BALÃO DE REANIMAÇÃO PORTÁVEL
GUIA RÁPIDA DE PRONTO SOCORRO**

***ΦΟΡΗΤΟ ΜΠΑΛΟΝΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
Γρήγορος οδηγός πρώτων βοηθειών***

**كرة مطايطية منعشة سهلة النقل
دليل سريع للإسعاف الأولي**

GIMA Spa - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italia

ITALIA: Tel. 199 400 401 (8 linee r.a.) - Fax 199 400 403

E-mail: gima@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

INTERNATIONAL: Tel. ++39 02 953854209 - Fax ++39 02 95380056

E-mail: export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com




Balão de reanimação portátil Guia rápida de pronto socorro




1 – Verificar que o paciente esteja longe de fontes de perigo: fumaça, chamas, água, gás, exalações, fios elétricos em tensão, etc.

2 – Controlar que as vias respiratórias estejam livres. No caso haja corpos estranhos, água ou saliva, retirar usando se disponível uma cunha abre-boca, colocando-a entre os dentes do paciente para evitar feridas aos dedos.

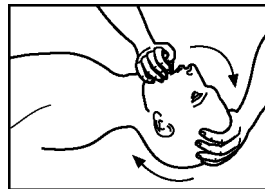

3 – Colocar a cabeça do paciente para trás, empurrando as maxilas para cima para distender o pescoço e abrir as vias respiratórias.



4 - Controlar se o paciente respira e se a cor da pele volta à normalidade. No caso seja presente a respiração e a cor normal, virar o paciente sobre o estômago (ou com a barriga para baixo) em posição “de coma”, com os pés em posição elevada (sobre um plano inclinado ou apoiando-os sobre um objeto) e a cabeça para baixo. Chamar um médico ou uma ambulância.

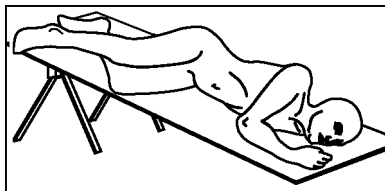

No caso a respiração não recomece autonomamente, intervir com a respiração artificial, sem interrupção, até que o paciente não respira sozinho ou até que não chegar um médico.

5 – Respiração artificial com o Balão Gima

Apertar a máscara sobre o rosto do paciente, cobrindo a boca e o nariz. Manter a cabeça completamente para trás, e com a mão que segura a máscara empurrar as maxilas para a frente. Apertar o balão a fundo e controlar que o tórax se expanda. Para manter abertas as vias respiratórias, pode ser usado usar um dos tubos fornecidos, colocando-o sob a máscara. Prestar atenção que a garganta não fique obstruída pela língua, em caso de obstrução usar a pinça especial para tirá-la fora.

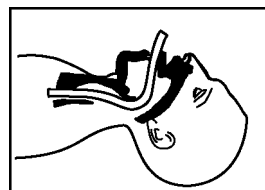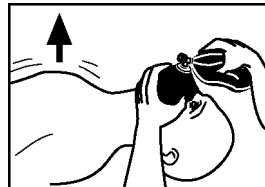


6 – Soltar o balão e aguardar que o tórax se esvazie. Repetir a operação 10-20 vezes por minuto. Se houver disponibilidade de oxigênio, introduzi-lo através do conector especial, em quantidade máxima de 2 – 4 litros por minuto.

Controlar sobre o pescoço do paciente a presença da pulsação cardíaca.

Se a pulsação é presente: Continuar a respiração artificial até que o paciente volta a respirar autonomamente.

Se a pulsação não é presente: O coração parou. Agir com a máxima urgência pois após 4 minutos o cérebro poderia ficar danificado.

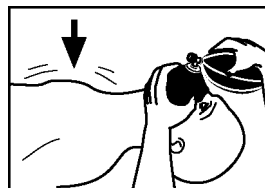

7 – No caso de parada do coração é necessário fazer a massagem cardíaca.

Com as duas mãos postas sobre o tórax na altura do coração, empurrar para baixo com força 60-70 vezes por minuto. Durante a compressão deve ser sentida a pulsação no pescoço. **ATENÇÃO:** Nas crianças comprimir com menos força e com uma mão só. Cada 5 – 8 compressões efectuar uma insuflação de respiração artificial. Continuar a massagem até que as pulsações do coração são bem definidas e de qualquer forma por uma hora. Mesmo depois que o coração terá voltado a bater poderá ser necessária a respiração artificial mesmo por um tempo considerável.

