

Instruções de Uso

Lâminas para laringoscópios HEINE com iluminação de fibra ótica feitas de aço inoxidável ou de SANALON+®

Leia estas instruções atentamente antes de utilizar as lâminas para laringoscópio HEINE, e mantenha-as em lugar seguro para futura utilização.

Informações de segurança

Aplicações: As lâminas de laringoscópios foram concebidas apenas para intubação endotraqueal.

Segurança na Utilização: Para assegurar que o instrumento funcione corretamente, utilize apenas cabos para laringoscópios com sinal verde de identificação.

O brilho da lâmpada pode reduzir durante o uso se não foi carregada suficientemente antes do uso. Nós recomendamos uma recarga mínima de 10 minutos para as baterias HEINE nos carregadores HEINE.

Depois de alguns minutos em uso a lâmpada do laringoscópio estará quente.

Segurança geral: Para evitar infecção e contaminação, os laringoscópios devem ser limpos, desinfetados e esterilizados após cada utilização. (Ver instruções de limpeza).

Se os laringoscópios forem utilizados regularmente, recomendamos que mantenha sempre lâmpadas e pilhas para substituição, bem como instrumentos suplentes.

Limpeza, desinfecção e esterilização.

As seguintes instruções devem ser incorporadas nos procedimentos do hospital. Guias e regulamentações nacionais (por ex.: CJK / vCJK) assim como padrões relevantes e leis devem ser postos em prática.

Estes procedimentos devem ser conduzidos por pessoal adequadamente qualificado.

Procedimento depois do uso

Remova todos os rastros de contaminação imediatamente depois do uso a fim de se evitar incrustação.

Limpeza manual / desinfecção

Use só produtos de limpeza e desinfecção que são recomendados pelo fabricante para uso com fibra ótica e plásticos (SANALON+®). Siga as exatamente as instruções dos fabricantes quanto a concentração e duração do uso. Depois deste processo, enxágüe a lâmina com água desmineralizada e assegure de que nenhum depósito permaneça sobre elas.

Advertindo: O uso de métodos de limpeza ou produtos de desinfecção errados podem causar danos irreparáveis ao laringoscópio.

Limpeza ultra-sônica não é permitida!

Limpeza automática / desinfecção

O laringoscópio pode ser limpo ou desinfetado de modo térmico em até 93 °C em uma máquina automática. Use somente produtos de limpeza que são recomendados para uso com aço inox e plástico (SANALON+®). O procedimento de enxágüe tem de assegurar que nenhum depósito é deixado no produto. Só use água desmineralizada para o enxágüe final.

Esterilização

O produto pode ser autoclavado com vapor saturado a 134 °C durante 5 minutos. Esterilização durante 18 minutos também é possível. Pode haver em longo prazo, uma redução na transmissão de luz com repetidas esterilizações a vapor, particularmente se a qualidade da esterilização não é a ideal. Qualquer cheque de função deveria incluir este parâmetro. Esterilização protoplasma é permitida solo para o laringoscópio F.O. HEINE Classic+®.

Normativas aplicáveis: EN ISO 7376

Garantia

Nós garantimos estas lâminas de laringoscópios por 5 anos até 4000 ciclos de autoclave de 134°C / 5 min. a partir da data da compra. Nós garantimos o funcionamento adequado desta unidade provida desde que usada conforme o pretendido pelo fabricante e de acordo com as instruções para o uso. Serão reparados quaisquer defeitos ou falhas que ocorram durante o período de garantia gratuitamente desde que causados por falhas no material, desenho ou mão-deobra. No caso da reclamação de defeito no produto durante o período de garantia, o comprador deverá provar de que o defeito se fazia presente no produto no momento em que foi despacho. A usual garantia legal e nossa garantia não se aplicam para o uso incorreto, uso de partes, peças ou acessórios não originais HEINE (Especialmente lâmpadas, pois estas são projetadas com ênfase nos seguintes critérios: Cor, temperatura, expectativa de vida, segurança, qualidade ótica e desempenho). Também exclui os reparos ou modificações feitos por pessoas não autorizadas por HEINE ou casos onde o consumidor não siga as instruções de uso supridas com o produto. Qualquer modificação de um produto HEINE com partes ou partes adicionais em não conformidade com as especificações originais HEINE invalidarão a garantia para a correta função do produto e adiante invalidará qualquer reclamação de garantia a qual resulte da troca ou modificação. Outras reclamações, em particular as reclamações por danos não diretamente relacionadas ao produto HEINE, estão excluídas.

Para **reparos**, por favor, contate seu fornecedor, que encaminhará a mercadoria para nós ou agente autorizado.

Adquirido através de

Data



CE 93/42/EWG/CEE/EEC