

PT UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA ISTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

INDICAZÕES:

Humidificador para administração terapêutica de oxigénio através da boca e do nariz.

PREPARAZÃO E INSTALAZÃO

Modelo: OS/17-6 (HB-72462) ; OS/17-6LN (HB-72465)

Ligue o debitômetro ao conector de rosca situado no topo da tampa. Ligar os óculos nasais ao conector do humidificador. Encher com água destilada abaixo do nível máximo indicado e fechar bem a tampa.

Ajustar o fluxo e a concentração de oxigénio conforme a prescrição do seu médico.

Para evitar o fornecimento de oxigénio não humidificado, certifique que o tubo colocado no interior do humidificador fica imerso. Caso contrário, encha novamente.

Um fluxo de oxigénio superior a 10 litros por minuto pode provocar uma possível passagem de líquido, proveniente do humidificador, para a mistura administrada ao paciente.

De modo a testar a administração de oxigénio, verifique se as conexões estão correctas e certifique que o líquido não entra nos óculos nasais ou na máscara.

CONTRA-INDICAZÕES

Não são descritas contra-indicações para a oxigenoterapia.

AVISOS:

Este produto é de uso único. Caso seja reutilizado, poderá originar o seguinte:

1. Possível presença de resíduos biológicos que poderão causar contaminações cruzadas.
2. Alteração dos materiais.
3. Perda das funcionalidades iniciais do produto.

Antes de ligar à fonte de oxigénio, verifique o seu correcto funcionamento.

Quando a pressão interna da garrafa exceder 6 PSI, é emitido um alarme acústico.

Todos os modelos acima indicados são de uso único (paciente único) e não podem ser utilizados de modo contínuo por um período de tempo superior a 30 dias.

A fonte de oxigénio deverá estar em conformidade com as regulamentações vigentes.

O dispositivo deve ser instalado e activado por pessoal qualificado.

ARMAZENAMENTO











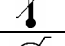
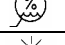

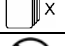


O produto deve conservar-se na sua embalagem original e as condições ambientais (temperatura e humidade relativa) indicadas na etiqueta. Não coloque pesos sobre a embalagem porque poderiam danificar o produto.

NOTAS GERAIS

Se durante a utilização deste dispositivo, ou como resultado da sua utilização, tiver ocorrido um incidente grave, comunique o mesmo ao fabricante e à autoridade competente do seu país. Para qualquer mau funcionamento ou defeito do dispositivo, informe o Serviço de Qualidade do Fabricante.

ELIMINAÇÃO

Resíduos provenientes de estruturas de saúde devem ser eliminados conforme a regulamentação em vigor.

	IT	EN	DE	ES	FR	PT
	Conforme alla vigente normativa Europea sui Dispositivi Medici	Compliant with current European legislation on Medical Devices	Entspricht der aktuellen europäischen Gesetzgebung für Medizinprodukte	Cumple con la legislación europea vigente sobre dispositivos médicos	Conforme à la législation européenne en vigueur sur les dispositifs médicaux	Em conformidade com a legislação europeia em vigor sobre Dispositivos Médicos
	Dispositivo medico	Medical Device	Medizinprodukte	Producto sanitario	Dispositif médical	Dispositivo médico
	Identificativo unico del dispositivo	Unique Device Identifier	Einmalige Produktkennung	Identificador único del producto	Identifiant unique des dispositifs	Identificação única do dispositivo
	Consultare le istruzioni d'uso	Consult instructions for use	Gebrauchsanweisung lesen	Consulte las instrucciones de uso	Consulter les instructions d'utilisation	Consulte as instruções de utilização
	Fabbricante	Manufacturer	Hersteller	Fabricante	Fabricant	Fabricante
	Numero di catalogo	Catalogue number	Katalognummer	Número de Catálogo	Code de référence	Número de Catálogo
	Numero di lotto	Batch code	Posten-Nummer	Número de Lote	Numéro de lot	Número de Lote
	Data di produzione	Date of manufacture	Herstellungsdatum	Fecha de Producción	Date de production	Data de Fabrico
	Scadenza	Use by	Verfalldatum	Fecha de Caducidad	Date de péremption	Prazo de Validade
	Non riutilizzare	Do not reuse	Nicht wiederverwenden	No reutilizar	Ne pas reutiliser	Não reutilizar
	Limiti di temperatura	Temperature limitation	Temperaturbereich	Límites de Temperatura	Limites de température	Limites de Temperatura
	Limiti di umidità	Humidity limitation	Feuchtigkeitsbereich	Límites de Humedad	Limites d'humidité	Limites de Humidade
	Proteggere dalla luce solare	Keep away from sunlight	Vor Sonnenlicht schützen	Mantener alejado de la luz solar	Tenir à l'abri de la lumière du jour	Manter longe da luz solar
	Numero di pezzi	Quantity of pieces	Stückzahl	Cantidad de piezas	Nombre de pièces	Quantidade de peças
	Non contiene lattice di gomma naturale	Do not contain natural rubber latex	Enthält kein Naturlatex	No contiene LÁTEX de goma natural	Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel	Não contém latex de borracha natural
	Distributore	Distributor	Verteiler	Distribuidor	Distributeur	Distribuidor