



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

PACCHETTO TEST BOWIE DICK
BOWIE DICK TEST PACK
PACK TEST DE BOWIE DICK
PAQUETE DE PRUEBA BOWIE DICK
PACOTE DE TESTE BOWIE DICK
BOWIE-DICK-TESTPAKET
ΠΑΚΕΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ BOWIE DICK

- Manuale d'uso e manutenzione
- Use and maintenance book
- Instructions de fonctionnement et entretien
- Manual de uso y mantenimiento

- Manual de uso e manutenção
- Betriebs und wartungsanweisungen
- Εγχειρίδιο χρήσης και συντηρησης

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

CUIDADO: Os operadores devem ler e compreender este manual completamente antes de usar o produto.

VORSICHT: Bediener müssen dieses Handbuch vollständig lesen und verstehen, bevor sie das Produkt verwenden.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χειριστές πρέπει να διαβάσουν και να κατανοήσουν πλήρως αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση του προϊόντος..

GIMA 35950



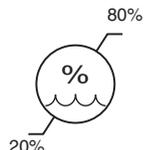
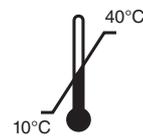
SP Medikal San Ltd. Sti
Deliklikaya Mah. Cubuklu Cad. 39
Arnavutkoy Istanbul Turkey
info@spmedikal.com
Made in Turkey

REF

102.002.0020



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Indicação para utilização**Nome do produto:**

Pacote de Teste Bowie Dick

Referência do produto:

102.002.0020 Pacote de teste Bowie Dick ECO

Conteúdo:

- 1 Indicação para utilização
- 2 Exemplos de interpretação

Pacote de Teste Bowie Dick - Instruções de utilização

O Teste Bowie Dick é um teste obrigatório a realizar no início de cada dia. Antes de iniciar um Teste Bowie Dick, o esterilizador a vapor deve ser aquecido primeiro.

Coloque o Pacote no bastidor inferior do seu carrinho de carregamento, de modo central e junto do dreno. Não adicione qualquer carga, pois pode afetar o teste.

Execute um ciclo de pré-vácuo a 134 °C - 3,5 minutos (ciclo de teste Bowie Dick padrão)

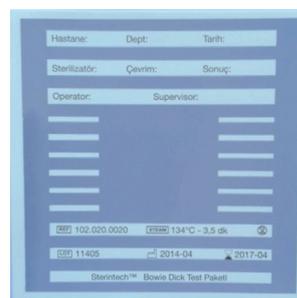
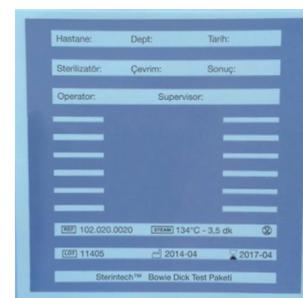
Após a conclusão do ciclo, abra o esterilizador e retire o pacote. Abra a caixa por cima e retire a folha indicadora que se encontra no meio do pacote. Examine a mudança de cor.

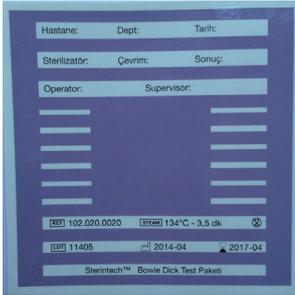
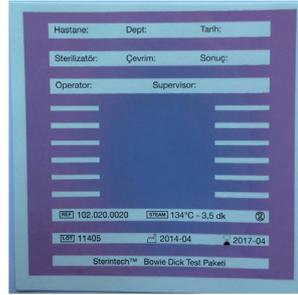
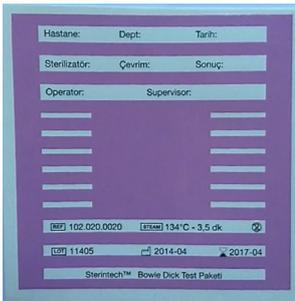
⚠️ Aviso: O pacote pode ainda estar quente!! Tome precauções ao manuseá-lo com cuidado para evitar qualquer ferimento.

Após a avaliação, registre os dados preenchendo todos os campos da folha Indicadora com os dados relativos e guarde a folha indicadora para referência futura.

A caixa inclui as folhas de cartão que podem ser eliminadas como resíduos de papel normal.

Para interpretação da folha indicadora do Pacote de Teste Bowie Dick, consulte a nossa folha de dados técnicos.

Resultados do teste:*Color original**Calor seco 140 °C - resultado de 30 min*

Sem vácuo**Apenas um impulso de vácuo****Dois impulsos de vácuo****Ciclo completo - três impulsos de vácuo****Símbolos:**

	Conservar em un lugar fresco y seco		Armazenar em local fresco e seco
	Fabricante		Guardar ao abrigo da luz solar
	Código produto		Limite de temperatura
	Código produto		Limite de humidade
	Data de validade		Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente
	Importado por		Consulte as instruções de uso

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses