



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

NOME DO PRODUTO: INDICADOR DE INTEGRAÇÃO DE OE TIPO 5 (IE3501)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: As Tiras de indicador de integração de OE Tipo 5 de Teste de Esterilização da PMS são concebidas para utilização em esterilizadores de Óxido de Etileno com condições operacionais de 60 % ($\pm 10\%$) de humidade, 37 °C ($\pm 0,5$ °C) e 90 minutos ou 54 °C ($\pm 0,5$ °C) 30 minutos na concentração de 600 ± 30 mg/L de OE.

Após a exposição à esterilização EO, o indicador químico fornecerá uma confirmação visual precisa por mudança de cor, indicando que as condições de esterilização foram alcançadas.

Os indicadores de integração de OE Tipo 5 de Teste de Esterilização da PMS são classificados como Tipo-5 de acordo com a norma EN ISO 11140-1.


Durante a exposição à esterilização com Óxido de Etileno nas condições especificadas, a cor do indicador mudará de **Branco** para Amarelo mostarda.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Coloque a Tira de Indicador Químico de Teste de Esterilização da PMS em cada pacote, saqueta ou bandeja a ser esterilizada por Óxido de Etileno. A tira deve ser colocada num local da embalagem que seja considerada a área mais difícil de ser alcançada pelo Óxido de Etileno.
- Processe a embalagem normalmente num esterilizador OE.
- No final do ciclo de esterilização, verifique se o indicador mudou de cor e passou a amarelo mostarda.
- Se a mudança de cor não for visível ou não uniforme, as condições de esterilização podem ser inadequadas e os itens devem ser reprocessados com tiras indicadoras novas/não processadas.
- Os produtos armazenados nas condições recomendadas têm prazo de validade na prateleira de 3 (três) anos a partir da data de fabrico.
- O fabricante, data de validade e número do lote estão impressos na caixa do produto.
- Não reutilize as Tiras de Indicador Químico usadas.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

- Armazene no máximo a 35 °C e humidade máxima de 70 % RH.
- As Tiras de Indicador Químico devem ser mantidas afastadas do calor direto, luz solar e excesso de humidade.

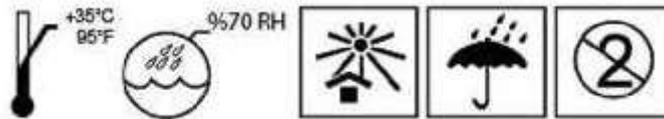

PMS Tıp Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 12. Cad. No:2
Huzurkent/Mersin/TURKEY

Telefone: +90 324 238 7042 | Fax: +90 324 238 6549

pms@pmsmedikal.com | www.pmsmedikal.com