

TUBOS DE ENSAIO DE CENTRIFUGAÇÃO

DISPOSITIVO PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO CE
Para uso sanitário profissional

Tipo de amostra: sangue, soro ou urina

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- 1) Verificar as informações do produto e a integridade da embalagem.
- 2) Escrever na etiqueta as informações adequadas (nome do paciente, ensaio, amostra, etc.).
- 3) Abrir o tubo de ensaio de centrifugação.
- 4) Utilizando o instrumento apropriado, introduzir a amostra no tubo, para diluição, armazenamento, centrifugação, cultura de bactérias ou outras aplicações.
- 5) Fechar muito bem o tubo de ensaio com a sua tampa, para evitar fugas durante a centrifugação.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Dispositivo destinado ao uso por profissionais de saúde;
- Usar luvas de proteção.
- Não colocar o dispositivo perto de chamas.
- Não utilizar o produto após o prazo de validade indicado, se estiver danificado ou se a embalagem estiver aberta.
- Não alterar o uso previsto, qualquer outro uso é considerado impróprio.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar o dispositivo apenas com os acessórios adequados.
- Armazenar em local seco, longe de fontes de calor e da luz solar direta.
- Eliminar este produto de acordo com os regulamentos locais, num recipiente para resíduos com risco biológico.
- O dispositivo é descartável. A reutilização do dispositivo implicaria a perda de todos os desempenhos e características.
- Qualquer ocorrência grave com o dispositivo deve ser comunicada ao fabricante e à Autoridade Competente do Estado de residência do paciente.



F.L. Medical s.r.l. Unipersonale – Via Enrico Mattei, 20- 35038 Torreglia (PD) – Italy
Phone +390495211475 – Fax +390495212566 – mail info@flmedical.com

