




GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

KIT PODOLOGIA CON ASTUCCIO RIGIDO - 7 STRUMENTI - PODIATRY STEEL FRAME KIT - 7 PIECES
KIT PODOLOGIE AVEC ÉTUI RIGIDE - 7 UNITÉS - SET PODOLOGIE MIT FESTEM ETUI - 7 INSTRUMENTE
KIT DE PODOLOGÍA CON ESTUCHE DE ACERO - 7 UNIDADES - KIT DE PODOLOGIA COM ARMAÇÃO
EM AÇO - 7 PEÇAS

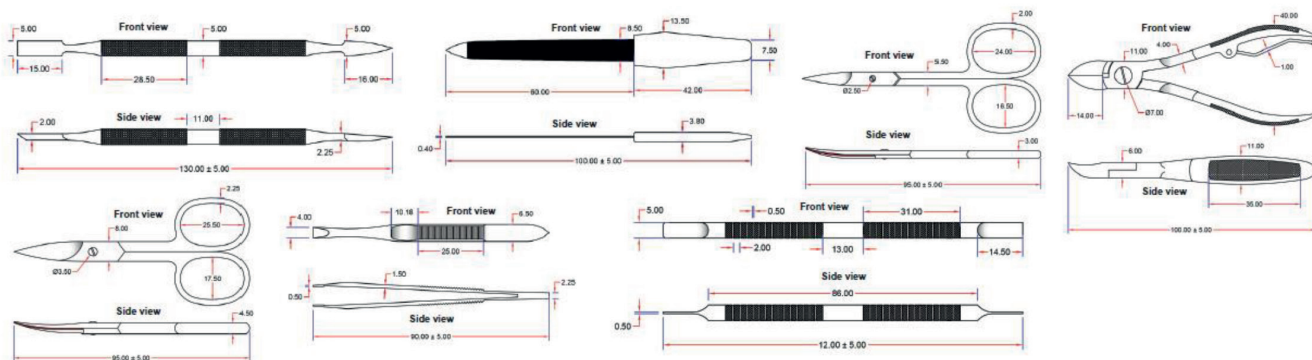

Descrição do dispositivo

Nome: Empurrador de cutícula e limpador, 13cm

Nome: Lima de unha com estojo de plástico branco, 10cm

Nome: Tesouras de cutícula de 9,5cm
Acabamento: Espelho/Cetim/Jato de Areia.

Nome: Pinça de unha de 10 cm

Nome: Tesouras de unhas de 9,5cm

Nome: Tesouras, 9cm

Nome: Empurrador de cutícula de extremidade dupla, 12cm

Indicação de uso

- Afaste do alcance da pessoa descontroladas.
- A pessoa treinada deve usar os dispositivos.
- Apenas para uso profissional - desinfete antes de usar.

Precauções, restrições, visos, cuidados especiais**Métodos de Limpeza adequados**

A limpeza adequada requer sabão líquido/detergente, água e o uso de uma escova de limpeza limpa e desinfetada para remover todos os detritos e restos visíveis.

Todos os itens devem ser esfregados com uma escova de limpeza limpa e desinfetada com água corrente.

A limpeza não é a desinfecção. A desinfecção é um passo completamente separado. Diferentes itens são limpos de diferentes maneiras. Isso muitas vezes depende do que o item é feito e como ele foi usado.

NOTA: a etapa da limpeza deve ser executada corretamente antes que um item possa ser desinfetado.

Todos os itens devem ser completamente enxaguados e secos com um pano limpo ou toalhas de papel antes de colocá-los em um desinfetante.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

REF 39805

Importato da / Imported by / Importé par /
Importiert von / Importado por / Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Pakistan