

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR. CONSULTE UM MÉDICO ANTES DE UTILIZAR.

CONTRAINDICAÇÕES: Não indicado para pessoas com mais de 242 lbs (110 kg). - Não indicado para condições geladas ou escorregadias. - Não indicado para pessoas com alergias ao látex.

GUIA DE INSTRUÇÕES: Para desdobrar a bengala, segure-a pelo punho e deixe os segmentos dobráveis da haste desdobrarem-se até ao chão. Para evitar quedas, deve verificar sempre se os segmentos individuais da haste (Fig. 1) estão bloqueados em segurança no lugar.

AVISO: NÃO desmonte o corpo da bengala. A bengala contém um cordão elástico interno. A libertação descontrolada do cordão elástico interno pode causar ferimentos graves em partes desprotegidas do corpo, especialmente nos olhos. Se o cordão elástico for cortado, desfiado ou danificado, interrompa a utilização.

NÃO estique o cordão mais do que o necessário para desmontar ou montar os segmentos.

PARA AJUSTAR A ALTURA DA SUA BENGALA: Desaperte o fecho rotativo rodando-o várias voltas no sentido horário. Pressione o botão de bloqueio e puxe o punho para cima para a alongar ou empurre-o para baixo para a encurtar. Lembre-se de reapertar o fecho rotativo após ajustar a bengala à sua altura desejada.

AVISO: Para prevenir quedas, certifique-se sempre de que os segmentos individuais da haste estão bloqueados em segurança no lugar e que o fecho está totalmente encaixado. Certifique-se sempre de que o pé de articulação da bengala está aparafusado em segurança à bengala para evitar quedas.

PARA DOBRAR A BENGALA: A sua bengala pode ser facilmente dobrada num tamanho prático para viagem, separando os 4 segmentos individuais da haste uns dos outros. Segure cada conjunto de segmentos da haste perto da junta e puxe-os para os apartar. Os segmentos individuais da haste dobrar-se-ão juntos perfeitamente.

PARA UTILIZAR AS LUZES DA SUA BENGALA: O botão na parte superior do punho da bengala ativa as luzes. Ao pressionar o botão uma vez ativará a luz na parte da frente da bengala; ao pressionar novamente acenderá também a luz vermelha na base do punho; ao pressionar uma terceira vez irá apagá-la. A luz frontal pode ser rodada para direcionar a luz para onde precisar.



SINAL DE SOS: Para ativar o sinal de SOS, pressione o botão na lateral do punho, a luz na base piscará e a vara emitirá um alarme sonoro.

TROCAR AS PILHAS: Abra o compartimento das pilhas na parte traseira do punho. Remova as pilhas gastas e elimine-as adequadamente.

Insira 2 pilhas AAA com a polaridade correta (polo positivo para fora, onde a mola está situada). Feche a tampa do compartimento das pilhas. Inspeccione regularmente a bengala à procura de sinais de desgaste, incluindo o desfiamento do cordão elástico ou o desgaste dos pés de borracha. Se vir sinais de desgaste, interrompa imediatamente a utilização.

AVISO: Não misture pilhas velhas com novas. Não misture pilhas alcalinas, padrão (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio).

TERMS DE GARANTIA DA GIMA: Aplica-se a garantia B2B padrão de 12 meses da Gima.

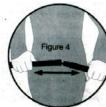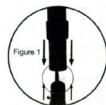

Gima 43050 - 43052

REF GB-806(1FOOT) GB-806(SKID PROOF)

Fabricato da/Manufactured by/Fabrique par/Fabricado por/Hergestellt von/
Fabricado por/Κατασκευάστηκε από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/
Tootja/Vaimistaja/Proizvodat/Gyártó/Ražots/Gamintojas/Produsert av/
Gefabriceerd door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/
Tilbered av/تصنيع بواسطة
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315514, China
Made in China

Importato da/Imported by/importé par/importado por/importiert von/
Importado por/Εισαγυγί από/Dovezeno od/Importat de/Importat de/
af/Importija/ Tuoja:/Uvezeno od strane/Importálta:/importēja/importavo/
Importert av/Geimporteerd door/importowane przez/importat de/Dovážal/
Uvozi/Importat av/توريد بواسطة
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

