



## PORTUGUESE

### CINTA DE CONTENÇÃO PARA CAMA

#### AVISOS

Antes de efetuar qualquer operação, inspecione visualmente a integridade do dispositivo. Caso o produto apresente anomalias, contacte imediatamente o ponto de venda onde foi efetuada a compra. A Erregi s.a.s. não assume qualquer responsabilidade pela utilização indevida do dispositivo. No caso de se verificar um acidente grave relacionado com a utilização do dispositivo, solicita-se que informe a ocorrência ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde o utilizador e / ou o paciente está estabelecido.

#### DESCRIÇÃO

**Art 24/07:** cinta de contenção para cama de casal em 100% algodão, composta por duas faixas, a mais interior deverá ser posicionada na cintura do paciente e fixada com botão de fixação, a mais exterior deverá ser fixada à estrutura da cama com as fitas e os botões de fixação. O sistema de fechamento é por botões de fixação, a chave magnética é usada para a abertura dos botões de fixação. 1 botão de fixação é utilizado para bloquear a faixa superior na cintura do paciente, os outros dois botões de fixação são utilizados para fixar as fitas na estrutura da cama. O dispositivo é utilizado para bloquear o paciente que não coopera e que precisa de terapias.

**A cinta permite ao paciente a posição de supina e lateral.**

**Art 24/07/01:** Cinta de contenção para cama individual em 100% algodão, composta por uma faixa que deverá ser posicionada na cintura do paciente e fixada com botão de fixação, mais duas fitas que deverão ser fixadas na estrutura da cama com fecho de gancho. O sistema de fechamento é por botão de fixação, a chave magnética é usada para a abertura do botão de fixação. O botão de fixação é utilizado para bloquear a faixa superior na cintura do paciente, as duas fitas com gancho são utilizadas para fixar a cinta na estrutura da cama. O dispositivo é utilizado para bloquear o paciente que não coopera e que precisa de terapias. **A cinta permite ao paciente apenas a posição de supina.**

#### INDICAÇÕES

Dispositivos utilizados para a contenção dos pacientes acamados.

#### CONTRAINDICAÇÕES

Não foram detetadas contra-indicações exceto em casos de sensibilidade verificada aos materiais constituintes.


#### CUIDADOS DE UTILIZAÇÃO

O dispositivo só pode ser aplicado exclusivamente por pessoal médico e paramédico. A cinta não deve ser utilizada sobre a pélvis ou sobre a caixa torácica. **Dispositivos com sistema de fecho magnético, não utilize em pacientes aos quais foi aplicado um estimulador para o coração, poderá provocar taquicardia.** Adapte bem a cinta ao paciente, deve passar uma mão espalmada entre o paciente e a cinta. Verifique sempre se os fechos estão bem engatados; se isso não ocorrer, a segurança do paciente poderá ser comprometida. Caso os fechos não se abram, as fitas podem ser cortadas com cortadores ou tesouras. Utilize sempre o dispositivo vestindo roupas de proteção pessoal. Dispositivo não ignífugo.

#### COMPOSIÇÃO

100% ALGODÃO.

#### MODO DE LAVAGEM

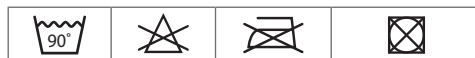

Atenção: remova as chaves e botões de fixação antes da lavagem, em contacto com líquidos a sua funcionalidade poderá ser afetada. O fabricante não responde por eventuais variações nas características técnicas do dispositivo em caso de não observância dos métodos de lavagem.

#### DESINFECÇÃO

Utilize produtos com supervisão médico-cirúrgica.

#### CONSERVAÇÃO

Conserve ao abrigo de fontes de luz, calor e humidade.

#### ELIMINAÇÃO

Elimine o dispositivo de acordo com os regulamentos em vigor relativos à proteção do ambiente e à recolha seletiva de resíduos.

	Código produto		Dispositivo médico
	Número de lote		Fabricante
	Dispositivo médico em conformidade com a regulamentação (UE) 2017/745		Consulte as instruções de uso
	Guardar ao abrigo da luz solar		Armazenar em local fresco e seco
	Data de fabrico		Sem látex de borracha natural
	Identificador exclusivo		

NÃO remova a etiqueta do Dispositivo Médico, pois permite a rastreabilidade do produto fornecido (Fabricante, IUD, número do lote, código do produto).

#### CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

**REF** 24/07/01 L-XL (Gima 43185)  
24/07 S-M (Gima 43186)  
24/07 L-XL (Gima 43187)

**Erregi S.a.s.**  
Via Adua 40  
21040 Vedano Olona (Va)  
commerciale@erregiasilimedi.it  
www.erregiasilimedi.it  
MADE IN ITALY

