



CABOS DE PACIENTE PARA ECG - INSTRUÇÕES DE USO

AVISO! Para evitar o risco de choque elétrico, não conecte a nenhuma fonte de energia.

Os cabos do paciente GIMA são compatíveis com os equipamentos indicados. O procedimento de conexão recomendado deverá ser seguido. Para desconectar o cabo, puxe cuidadosamente o conector, sem exercer qualquer esforço direto no cabo. Antes de utilizar o cabo, verifique cuidadosamente se este está intacto e é compatível com o dispositivo em questão.

Limpeza: Limpe o cabo de paciente e as terminações GIMA com uma solução de água morna e detergente neutro. Limpe com um pano macio. Nunca mergulhe o cabo de paciente e as suas terminações GIMA! Após a limpeza, seque o cabo de paciente e as terminações GIMA com um pano limpo. Ao secar o cabo, limpe na direção oposta à caixa de derivações, movendo o pano em direção ao conector, repita o mesmo processo para as terminações. Evite o contato com detergentes agressivos e com solventes aromáticos, cloratos, acetonas, éter ou ésteres. Soluções agressivas (como soluções alcoólicas ou fortemente alcalinas, solventes de resistência média, soluções de limpeza) danificam o cabo de paciente e as terminações GIMA.

Desinfecção: o cabo de paciente e as terminações GIMA podem ser tratados com desinfetantes contendo etanol (70% - 80%), propanol (70% - 80%), aldeídos (2% - 4%), dialdeídos ativados (Cidex) ou hipoclorito de Sódio (lixívia em solução aquosa 1:10). Não use solventes orgânicos. Após a lavagem, passe os cabos por água e seque-os com um pano limpo.

Esterilização: o cabo de paciente e as terminações GIMA podem ser esterilizadas com óxido de etileno (EtO). Após a esterilização, ventile adequadamente o cabo antes de usá-lo. Os cabos e terminações do paciente GIMA NÃO PODEM ser autoclavados.

Atenção!

- organize os cabos e as terminações para que o paciente ou os operadores não fiquem presos.
 - não exponha o cabo ou as terminações a radiação ultravioleta muito intensa.
 - verifique a integridade do cabo e as terminações antes de usar.
 - limpe e desinfete o cabo e as terminações antes de aplicá-los a um novo paciente.
 - não autoclave cabos de pacientes e terminações GIMA.
 - os produtos GIMA devem ser utilizados ou manipulados apenas por pessoal qualificado.
- Deve comunicar qualquer incidente grave relacionado com o dispositivo médico que forneceu ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde se encontra.