

PACKAGING




CONTÉM

1 Practi-Man Advance, 1 Manual do usuário e FAQ, 5 pulmões, 2 válvulas, 1 Saco de transporte

CPR MANIKIN PRACTI-MAN Advance

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES

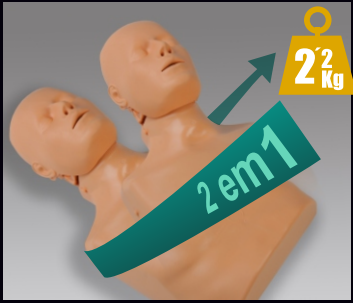

SIMULADOR DOIS EM UM
Treinamento de RCP adulto e criança com um único manequim.



MANOBRA DE ELEVAÇÃO DA MANDÍBULA



EXERCÍCIO DE RESPIRAÇÃO REALISTA
Sistema de respiração único, que inclui nariz com funcionamento real.

CERTIFICADO DE GARANTIA



Esse produto passou com sucesso nos controles de qualidade mais rigorosos antes de sair da fábrica. Porém, qualquer mau funcionamento devido à montagem e/ou falhas de componentes, por favor, leia a garantia e entre em contato com o distribuidor oficial da região.

ENFAVI, SL garante que este produto está livre de defeitos de fabricação e no material no momento da compra por um período de dois anos a partir da data da nota fiscal de compra.

Se durante o período de garantia, houver um produto defeituoso atribuído ao processo de fabricação, falha do material e/ou fabricação, o consumidor deve informar ao distribuidor oficial com 10 dias úteis após o conhecimento do defeito, e ao critério do distribuidor oficial, o produto poderá ser reparado ou substituído.


CONDIÇÕES DE GARANTIA:

Detalhes e documentação: Uma cópia da nota fiscal cobrindo a compra de seu produto é requerida para ter a cobertura da garantia. Além de especificidades da compra do produto, a nota fiscal precisa fornecer as seguintes informações: nome e endereço do comprador.


Exclusões: Essa garantia especialmente exclui o seguinte:
- Danos e/ou defeitos no produto resultante de mau uso ou negligência do usuário, incluindo a utilização do produto para outros fins que não o seu uso pretendido.
- Danos e/ou defeitos causados pelo uso de agentes externos, tais como calor ou outros químicos nocivos ou corrosivos.
- Danos e/ou defeitos devidos a manutenção inadequada e falta de limpeza.
- Danos e/ou defeitos decorrentes do uso de peças do manequim não feitas pelo fabricante do manequim.

Cobertura geográfica: A garantia é estendida para todos os países onde esse produto é vendido por um distribuidor, ENFAVI, S.L. ou atribuído pela ENFAVI, S.L.

Cancelamento da garantia: A garantia do produto é cancelada:
- Em casos de danos causados por reparos realizados por outras pessoas que não os agentes de serviço autorizado da ENFAVI S.L. e/ou se partes ou acessórios usados no manequim são outros que não as peças originais ou acessórios fabricados pela ENFAVI S.L.
- Ao mudar a data da nota fiscal, recibo de venda ou lista de embalagem.

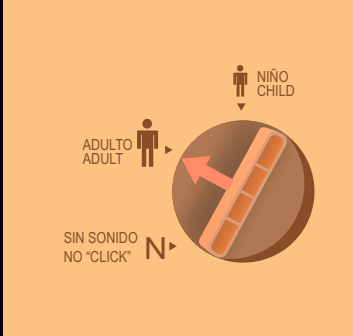

SETA DE SELEÇÃO DE TRÊS POSIÇÕES EXCLUSIVA
Adulto, criança e posição de teste (não clique)

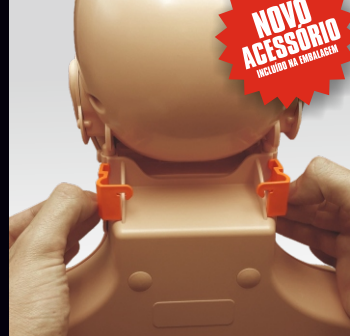

CLIPS DE FIXAÇÃO CABEÇA-TORSO



FORMAÇÃO DE DAE
A utilização de electrodos não deixa resíduos sobre a pele.

MONTAGEM DO PRACTI-MAN ADVANCE



1 Remova a pele do torso.



2 Remova a pele da face.



3 Certifique-se de que a cabeça está corretamente fixada nos dois encaixes de fixação do torso.




4 Mova o pulmão para baixo da mandíbula.



5 Conecte a válvula ao pulmão.



6 Certifique-se de que a válvula está corretamente fixada à cabeça.

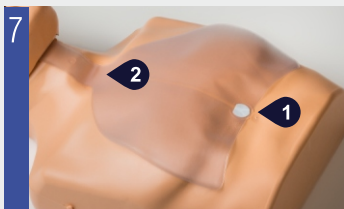

7 Coloque o pulmão no torso e verifique que:
1. Está posicionado sobre as marcas indicadas através do adesivo.
2. Descansa com folga sobre o pescoço.



8 Coloque a pele da face e verifique se o nariz, a boca e a aba da parte superior encaixam corretamente.



9 Coloque a pele do tórax e fixe-o aos pinos.

PEÇAS SOBRESSELENTES DO PRACTI-MAN ADVANCE



PULMÃO
(Ref. SP-001 (AD))



VÁLVULA
(Ref. SP-002 (AD))



PELE DA FACE
(Ref. Face-MB (AD))



PELE DO TÓRAX
(Ref. Chest-MB)

RECOMENDAÇÕES DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO


O fabricante recomenda a limpeza do Practi-Man Advance após cada utilização, para assegurar o máximo de higiene, seguindo as instruções que se seguem:




É necessário limpar o manequim, desinfetando os lábios e o rosto e separando a pele da face do resto da cabeça após os exercícios realizados pelo aluno.



Para uma desinfecção mais completa e posterior utilização correta, deve submergir a pele da face num recipiente com desinfetante, limpar cuidadosamente e secar.

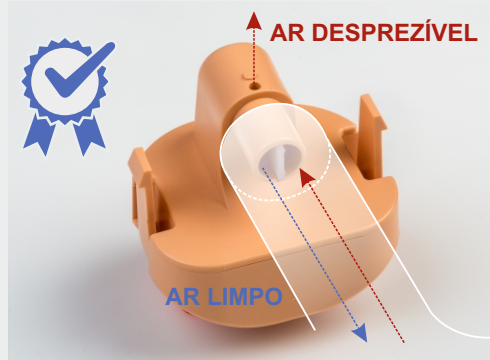

Após cada utilização, a válvula do Practi-Man Advance deve ser desinfetada e seca, para permitir o funcionamento correto.

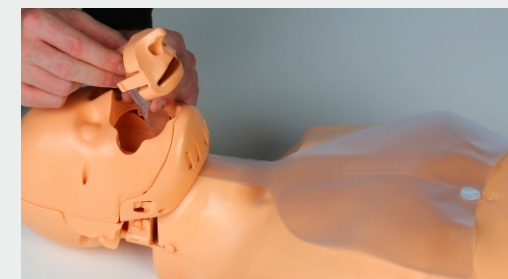

O pulmão do Practi-Man Advance é semidescartável e adequado para realizar sessões de treino constituídas por grupos de várias pessoas, sem ser necessário trocá-lo. Se, durante o exercício, o peito não se elevar, verifique se o pulmão não está humedecido, caso em que deve substituí-lo por um novo.

PROTEÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE RCP



A proteção durante a formação deve ser complementada com a utilização de máscaras de proteção respiratória.



Caixa dispensadora de 100 unidades

Utilize toalhetes desinfetantes para assegurar a limpeza correta do manequim.