



(RO) A se citi instrucțiunile cu atenție înainte de utilizare.



(RO) Mărimi disponibile: 4 & 7 mm



(RO) Steril. Numai pentru UNICĂ FOLOSINȚĂ.

Dacă pentru același pacient sunt necesare mai multe biopsii sau probe, de fiecare dată trebuie utilizat un nou dispozitiv.

→ Din cauza riscului de infectare nu resterilizați sau refolosiți.


→ Nu utilizați dispozitivul dacă ambalajul steril al acestuia este deteriorat.

1.

(RO) Chiureta este un dispozitiv pentru îndepărtarea țesutului, incluzând excizia leziunilor superficiale.


2. a.

(RO) Două tehnici sunt recomandate pentru folosirea chiuretei. Selectați tehnica potrivită pentru procedură.

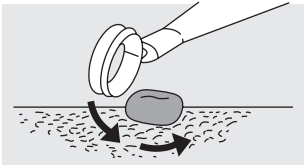


b.

(RO) Ghidați chiureta cu atenție, astfel încât o bucată de țesut să fie îndepărtată dintr-o incizie.

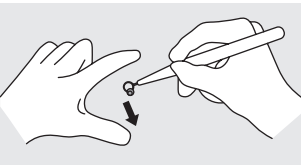

a.i.

(RO) Tehnica 1, care este cea mai des folosită. Întindeți pielea cu degetele mâinii non-dominante. Țineți chiureta între arătător, index și degetul mijlociu cu partea ascuțită spre marginea leziunii.

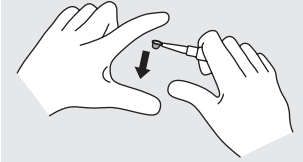

a.ii.

(RO) Tehnica 2, care datorită preciziei reduse poate fi mai potrivită pentru piele întărită sau groasă. Țineți chiureta în pliul format dintre degetele distale și index, susținut de celelalte degete ale mâinii chiuretante, având partea ascuțită spre marginea leziunii. Așezați degetele mari astfel încât să formați o bază stabilă.

3.



(RO) Sterilizat cu oxid de etilenă de către: sfm medical devices GmbH, Brückenstrasse 5, D-63607 Wächtersbach.



GSK Consumer Healthcare (GMDT)
Clocherane, Youghal Road,
Dungarvan,
Co. Waterford,
Ireland



4.

(RO) Vezi pachet sau cutie pentru:



5.

(RO) GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L., Opera Center One, Str. Costache Negri, Nr. 1-5, et. 5 și 6 (Zona 1), Sector 5, Cod 050552 București, ROMÂNIA.