

BIOPSY PUNCH



(RO) A se citi instrucțiunile cu atenție înainte de utilizare.





(RO) Steril. Numai pentru UNICĂ FOLOSINȚĂ.

Dacă pentru același pacient sunt necesare mai multe biopsii sau probe, de fiecare dată trebuie utilizat un nou dispozitiv.

- Din cauza riscului de infectare nu resterilizați sau refolosiți.
- Nu utilizați dispozitivul dacă ambalajul steril al acestuia este deteriorat.

(RO) Mărimi disponibile:
2; 3; 3.5; 4; 5; 6 & 8 mm


1.
&(RO) Biopsy Punch este o metodă standardizată pentru a executa biopsii cutanate.

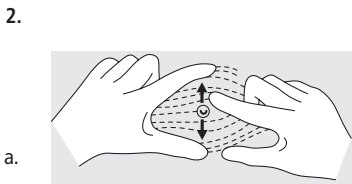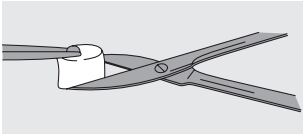

a. &(RO) Întindeți pielea pentru a relaxa liniile de tensiune ale pielii.

c.

(RO) Prindeți ușor și ridicați proba de piele cu ajutorul unei pense anatomice mici, evitându-se orice strivire. Separați cu foarfece sau bisturiu, la bază, dacă este necesar.

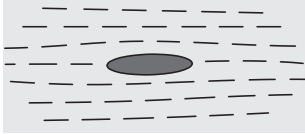

d.

(RO) Pentru răni ≤ 4 mm comprimați ușor sau închideți cu pansament cu hidrocoloid. Pentru răni ≥ 4 mm închideți cu suturi, clipuri sau plasturi adezivi, în funcție de ceea ce este mai adecvat din punct de vedere clinic.

b. &(RO) Țineți punch-ul între degetul mare și degetul index. Așezați pe suprafața pielii, apăsați cu presiune moderată în jos, în sensul acelor de ceasornic, într-o mișcare de "înșurubare".

3.



(RO) Sterilizat cu oxid de etilenă de către:
sfm medical devices GmbH, Brückenstrasse 5, D-63607 Wächtersbach.



GSK Consumer Healthcare (GMDT)
Clocherane, Youghal Road,
Dungarvan,
Co. Waterford,
Ireland



4.
(RO) Vezi pachet sau cutie pentru:



5.

(RO) GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L., Opera Center One,
Str. Costache Negri, Nr. 1-5, et. 5 și 6 (Zona 1), Sector 5,
Cod 050552 București, ROMÂNIA.