

OCCHIALI D'ISOLAMENTO MEDICALI
MEDICAL ISOLATION GOGGLES
LUNETTES MÉDICALES D'ISOLEMENT
GAFAS DE AISLAMIENTO MÉDICO
ÓCULOS DE ISOLAMENTO MÉDICO
MEDIZINISCHE ISOLATIONSBRILLE
ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ
MEDISCHE ISOLATIEBRIL
MEDICINSK ISOLATIONSBRILLE
MEDICINSK ISOLERINGSGLÖGONE
LÄÄKETIETEELLISET ERISTYSLASIT
MEDISINSKE ISOLASJONSBRILLE
OKULARY IZOLACYJNE MEDYCZNE
LÉKAŘSKÉ IZOLAČNÍ BRÝLE
MEDICINSKA IZOLACIJSKA OČALA
MEDICINSKE IZOLACIJSKE NAOČALE
ORVOSI SZEMÉVEZET
OCHEAREI DE IZOLAT MEDICAL
МЕДИЦИНСКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОЧИЛА
ةي ب ط ل ا ل ز ع ل ا ت ا ر ا ظ ن

REF **GDG02 (Gima 25266)**

Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd
No. 10 Beiyuan Ave., Huangyan Taizhou,
318020 Zhejiang China
www.chinagongdong.com
Made in China

EC**REP****ZOUSTECH S.L.**

Pso. Castellana, 141- Planta 19, 28046-Madrid,
Spain

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται
από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Maahantuoja / Importerad av /
Uvezao / Importälja / Importert av / Geïmporteerd door / Importeret af / Внесен от / داري ت س ا :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



ROMÂNĂ

Instrucțiuni de utilizare

Model: Complet închis cu aerisire

Rev. A/1 Valabilă din: 2020-4-

Descriere:

Ochelarii de protecție medicală au rolul de a crea o barieră fizică pentru ochi față de împrejurimile imediate. Acest dispozitiv previne contactul utilizatorului cu lichidele sau stropii de lichide. Ochelarii de protecție medicali sunt de unică folosință.

Indicații pentru Utilizare:

protecția membranelor mucoase asociate ochilor împotriva stropilor, pulverizărilor și a împrăștiilor de fluide corporale.

Contraindicații:

Niciuna.

Efecte adverse ale produsului:

Acest produs nu prezintă efecte adverse.

Avertisment:

1. Nu utilizați în cazul în care componentele prezintă semne de deteriorare.
2. Nu expuneți componentele la temperaturi mai mari decât cele indicate pe eticheta ambalajului.
3. Aruncați produsul ca deșeu biopericulos conform protocolului instituțional.

Folosire:

Scoateți ochelarii din punga de ambalare, confirmați că ochelarii sunt în stare bună și îndepărtați folia de protecție; ochelarii vor fixa banda elastică în spatele capului și vor regla dispozitivul de fixare moale pentru a se potrivi strâns cu fața.

Depozitare:

Depozitați produsul într-un loc uscat, la o temperatură cuprinsă între 0-30 °C. A se păstra departe de lumina soarelui. 1.

Semnificația simbolurilor:

	Valabil până la data de		Dispozitiv de unică folosință, a nu se refolosi
	Număr de lot		A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat
	Data fabricației		A se păstra ferit de razele soarelui
	Dispozitiv medical realizat în conformitate cu prevederile regulamentul (UE) 2016/425		A se păstra într-un loc răcoros și uscat
	Producător		Reprezentant autorizat pe teritoriul Comunității Europene
	Cod produs		

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni

CE PPE Cat.II eliberat de către:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH Organism notificat 0196 Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Germania conform Anexei II a Regulamentului (UE) 2016/425 - Armonizat EN 166: 2001 Directiva 2001/95/CE