

CALIBRO PER NEONATI
BABY MEASURING ROD WITH CALIPERS
JAUGE POUR BÉBÉ
CALIBRE PARA BEBÉS
MEDIDOR PARA RECÉM-NASCIDOS
MESSSCHIEBER FÜR NEUGEBORENE
PEDIOMETRU TIP RIGLĂ PENTRU NOU-NĂSCUȚI
KROPPSMÄTARE FÖR SPÄDBARN
SUWMIARKA DLA NOWORODKÓW
ΒΡΕΦΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Manuale utente - User manual - Mode d'emploi - Manual de uso - Manual do utilizador - Benutzerhandbuch -
Manual de utilizare și întreținere - Instruktioner för användning och underhåll
Instrukcja użytkownika - Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

CUIDADO: Os operadores devem ler e compreender este manual completamente antes de usar o produto.

VORSICHT: Bediener müssen dieses Handbuch vollständig lesen und verstehen, bevor sie das Produkt verwenden.

ATENȚIE: Operatorii trebuie să citească și să înțeleagă complet acest manual înainte de a utiliza produsul.

FÖRSIKTIGHET: Operatörer måste läsa och förstå denna manual helt innan de använder produkten.

UWAGA: Operatorzy muszą w całości przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję przed użyciem produktu.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χειριστές πρέπει να διαβάσουν και να κατανοήσουν πλήρως αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση του προϊόντος.

GIMA 27326



Metrica S.p.A.,
Via A. Grandi 18, 20097
San Donato Milanese (MI) - Italy
Made in Italy





10455



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



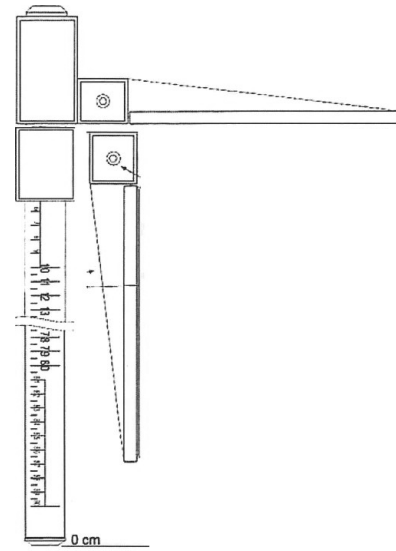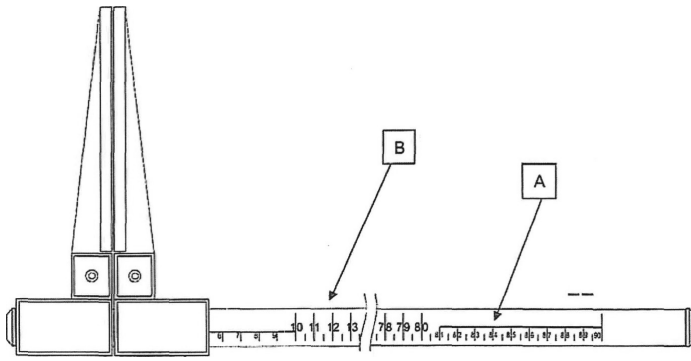

CONSIDERAȚII PRELIMINARE

Scopul acestui manual este de a oferi clientului toate informațiile posibile despre PEDIOMETRUL TIP RIGLĂ PENTRU NOU-NĂSCUȚI, precum și instrucțiunile de utilizare și întreținere care vă permit să mențineți în timp atât performanța, cât și eficiența PEDIOMETRULUI TIP RIGLĂ PENTRU NOU-NĂSCUȚI.

Manualul de utilizare trebuie păstrat în stare bună și într-un loc accesibil pentru o consultare rapidă.

DESTINAȚIE DE UTILIZARE

PEDIOMETRUL TIP RIGLĂ PENTRU NOU-NĂSCUȚI este un instrument cu funcție de măsurare în cm, cu o precizie de ± 1 cm, a lungimii corpului unui nou-născut, sau părți ale corpului acestuia.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Apropiati cele două fălci ale pedimetruului de partea corpului de măsurat și citiți valoarea indicată de index pe scara gradată.

Dispozitivul dispune de o tijă gradată cu două tipuri de scară de măsurare: în cm

A) scară cu cel mai mic caracter de la 0-90 cm, diviziune de 0,5 cm - toleranță $\pm 0,5$ cm

B) cea mai mare scară de la 0-90 cm, diviziune de 0,5 cm – toleranță $\pm 0,5$ cm

Poate fi folosit și pe verticală prin orientarea gurii interioare cu 90°, aducând-o către rigla gradată

AVERTIZĂRI/ÎNȚREȚINERE

PEDIOMETRUL TIP RIGLĂ PENTRU NOU-NĂSCUȚI trebuie utilizat numai de către personalul calificat.

Nu utilizați dispozitivul dacă acesta este deteriorat. Evitați să efectuați reparații pe cont propriu; dacă este necesar, contactați producătorul.

După deschiderea ambalajului, verificați toate piesele și părțile care compun produsul. Verificați dacă toate sunt prezente și dacă se află în stare perfectă.

Curățarea PEDIOMETRULUI TIP RIGLĂ PENTRU NOU-NĂSCUȚI trebuie realizată cu o cârpă umedă cu substanțe care nu afectează aluminiul, precum alcool și/sau soluție de curățare pentru sticlă. Orice accident grav produs, privitor la dispozitivul medical fabricat de firma noastră, trebuie semnalat producătorului și autorității competente în statul membru pe teritoriul căruia își are sediul utilizatorul

PEDIOMETRUL a fost conceput pentru a rezista în timp: este rezistent la majoritatea substanțelor chimice, cu excepția metil etil cetonelor (M.E.K.), a diluanților și a solvenților pentru unghii.

PEDIOMETRUL trebuie păstrat întotdeauna în carcasă într-un mediu uscat.

DESCRIEREA PIESELOR DE SCHIMB

Nr. de identificare	Descriere piesă
1	Fălci
2	Suport mobil
3	Suport fix
4	Tijă din aluminiu gradată
5	Capac de închidere din plastic

În vederea înlocuirii componentelor, instrumentul trebuie trimis producătorului.

REF	Cod produs	LOT	Număr de lot
	A se păstra ferit de razele soarelui		A se păstra într-un loc răcoros și uscat
CE	Dispozitiv medical realizat în conformitate cu prevederile Directivei 93/42/CEE		Producător
MD	Dispozitiv medical		Data fabricației
	Atenție: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare		Citiți instrucțiunile de utilizare
SN	Număr de serie		Distribuit de
UDI	Identificator unic de dispozitiv		

WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima.