



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**ALTIMETRO DA PARETE
WALL MOUNTED HEIGHT METER
TOISE MURALE
ALTÍMETRO DE PARED
ALTÍMETRO DE PAREDE
WANDBEFESTIGTES ROLLMESSBAND
NAŚCIENNY WYSOKOŚCIOMIERZ
MĂSURĂTOR ÎNĂLȚIME MONTAT PE PERETE
FALRA SZERELHETŐ MAGASSÁGMÉRŐ
SEINÄASENTEINEN PITUUSMITTA
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ
مقياس طول حائطي التثبيت**

Incertezza di 9 mm a 2 metri

Uncertainty of 9 mm at 2 m

Au-delà de 2 mètres la valeur peut osciller de 9 mm

Oscilación de 9 mm a una distancia de 2 metros

Incerteza de medição (desvio-padrão) de 9 mm a 2 metros

Schwankung von 9 mm bei einer Distanz von 2 m

Niedokładność 9 mm na 2 m

Diferență de 9 mm la 2 m

2 méteren 9 mm-es pontatlanság előfordulhat

Epätarkkuus 9 mm 2 metrissä

Αβεβαιότητα 9 mm στα 2 μέτρα

نسبة الشك في القياس 9 ملم لكل 2 متر

M27335-M-Rev.10-01-22

REF 27335



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in China

CE 0476



CARACTERISTICI

Măsurătorul de înălțime GIMA montat pe perete (cod 27335) este un instrument de măsurare a înălțimii unei persoane. Poate fi fixat pe perete și poate măsura până la 2 m. Nu ocupă mult spațiu și permite o citire rapidă.

INSTRUCȚIUNI



Nu trageți glisorul brusc, deoarece banda gradată se poate rupe.

Produsul trebuie utilizat numai de către personalul calificat.



Nu utilizați echipamentul dacă este deteriorat. Adresați-vă comerciantului de la care l-ați cumpărat. Evitați reparațiile de proastă calitate.

Reparațiile vor fi efectuate numai cu piese de schimb originale, care trebuie instalate conform destinației.

Deoarece produsul este fabricat din materiale rezistente la coroziune, potrivite pentru condițiile de mediu adecvate utilizării sale normale, nu necesită îngrijire specială.

Cu toate acestea, trebuie depozitat în condiții etanșe, asigurându-vă că este protejat de praf și murdărie pentru menținerea igienei. Mai mult, se recomandă ca produsul să fie depozitat într-un loc care poate fi ușor accesibil de către personal în caz de necesitate.

ÎNDEPĂRTAREA AMBALAJULUI



Amintiți-vă întotdeauna că elementele de ambalare (hârtie, celofan, capse, bandă adezivă etc.) pot tăia și/sau răni dacă nu sunt manipulate cu grijă. Acestea vor fi îndepărtate cu mijloace adecvate de către personalul responsabil; același lucru este valabil și pentru instrumentele utilizate pentru îndepărtarea ambalajelor (foarfece, cuțite etc.).

După deschiderea ambalajului, verificați mai întâi toate piesele și părțile care alcătuiesc produsul. Verificați să fie toate prezente și în stare perfectă.

INSTALARE

Pentru a ridica măsurătorul de înălțime montat pe perete, cursorul trebuie poziționat pe perete exact la o înălțime de 2 metri față de suprafața podelei și, menținând produsul compact, fixați plăcuța cu ajutorul diblurilor furnizate. Acum, măsurătorul de înălțime montat pe perete este gata de utilizare.

FUNCȚIONARE

Pentru a măsura înălțimea, pur și simplu luați cursorul cu o mână și trageți-l în jos până când acesta atinge capul persoanei care se măsoară, apoi citiți rezultatul aflat în linie cu bara roșie din fereastră.

ÎNȚREȚINERE









Produsul a fost conceput pentru a fi durabil. Vă recomandăm ca instrumentul să fie curățat cu un detergent slab.



Curățați periodic banda dispozitivului de măsurare a înălțimii montat pe perete cu o cârpă umezită cu dezinfectant. Acordați o atenție deosebită cursorului.

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni.

	Cod produs		Număr de lot
	A se păstra ferit de razele soarelui		A se păstra într-un loc răcoros și uscat
	Citiți instrucțiunile de utilizare		Producător
	Atenție: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare		Dispozitiv medical realizat în conformitate cu prevederile Directivei 93/42/CEE