

***POLTRONA PODOLOGIA MECCANICA
PODOLOGY MECHANICAL CHAIR
FAUTEUIL DE PODOLOGIE MÉCANIQUE
MECHANIKUS PODOLÓGIAI SZÉK
SCAUN DE PODOLOGIE MECANIC
MEKANISK PODOLOGISTOL***

GIMA 28021

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Gyártó / Producent / Tillverkare:

SILVERFOX CORPORATION LIMITED

No. 18, 1st TongLe Road, TangXia Town, Pengjiang District,

JiangMen City, GuangDong Province, China

amy.liang@silverfox.cn

Made in China

REF 2231A

Importato da / Imported by / Importé par / Importálta / Importat de / Importerad av:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

1 INTRODUCERE ÎN CE PRIVEȘTE UTILIZAREA ACESTUI MANUAL


Acest manual este destinat doar ca referință pentru utilizarea acestui model special. În cazul în care manualul este utilizat în alte scopuri, nu vom suporta nicio consecință și nu ne vom asuma nicio răspundere. Toate informațiile conținute în acest manual sunt protejate prin drepturi de autor și nu trebuie reproduse, copiate sau traduse, chiar și parțial, fără acordul prealabil scris al societății.

2 ATENȚIONĂRI


- Deconectați produsul de la sursa de alimentare când înlocuiți componentele electrice sau în timpul procedurilor de întreținere și curățare.
- Ștecărul trebuie introdus într-o priză instalată și împământată corespunzător pentru a evita riscul de incendiu și electrocutare.
- Nu stați în picioare pe produs.
- Nu permiteți copiilor să se joace cu produsul și nu-l lăsați la îndemâna acestora; vă rugăm să reglați spătarul în poziția cea mai înaltă atunci când nu este utilizat.
- Nu așezați produsul în locuri umede, cum ar fi baie, pentru a evita electrocutările sau alte defecțiuni; comenzile nu trebuie să intre în contact cu apa.
- Nu amplasați și utilizați produsul în medii caracterizate de suprafețe acoperite/vopsite sau în care se efectuează proceduri de alimentare cu oxigen.
- Copiii și persoanele cu probleme fizice, tulburări tactile, tulburări mintale și fără experiență sau simțuri comune pot folosi aparatul numai dacă au fost instruiți corespunzător sau sub supravegherea personalului responsabil de siguranța lor.
- Vă rugăm să contactați distribuitorul, centrul de service sau personalul aflat în posesia abilităților și cu experiența corespunzătoare pentru a efectua reparații în cazul unui ștecăr deteriorat sau periculos.
- Asigurați-vă că nu există obiecte accesibile în apropiere în timp ce utilizați scaunul.
- Scaunul trebuie utilizat numai de către profesioniști calificați.

3 PRECAUȚII

- Echipamentul trebuie utilizat de către personalul expert care este familiarizat cu structura, performanța și metodele de utilizare a produsului. În plus, se recomandă efectuarea periodică a operațiunilor de întreținere programate.
- Citiți cu atenție acest manual înainte de a continua cu instalarea, utilizarea și reglarea produsului. Păstrați produsul în stare bună.
- Acest produs nu trebuie folosit încărcându-l lateral sau într-un singur punct.
- Urmați instrucțiunile de utilizare în siguranță, nu supraîncărcați produsul în timpul utilizării și asigurați-vă că dispozitivele de protecție de siguranță ale produsului sunt intacte și fiabile, astfel încât să eliminați cu promptitudine orice factori de risc.
- Strângeți șuruburile și piulițele în mod regulat pentru a evita posibilele defecțiuni cauzate de piesele slăbite care se pot deplasa, genera vibrații sau cădea.
- În timpul întreținerii, operatorul nu trebuie să demonteze nicio parte a scaunului.
- Acest produs nu poate fi utilizat în caz de defecțiune. Dacă este detectat un fenomen anormal sau un zgomot, opriți imediat utilizarea și efectuați o inspecție amănunțită, reluând lucrul numai după rezolvarea problemelor.
- Operatorul trebuie să cunoască măsurile de precauție descrise în fiecare secțiune a manualului, pentru a garanta siguranța persoanei și a produsului.
- Scaunul electric pentru centrele spa este echipat cu un cablu de alimentare cu trei fire. Cablul de alimentare trebuie să fie conectat la o priză cu trei găuri instalată și împământată corespunzător. Această acțiune nu numai că previne riscul de electrocutare, dar asigură și funcționarea corectă a scaunului.
- Se recomandă utilizarea aparatului cu respectarea instrucțiunilor de siguranță afișate pe eticheta de avertizare aplicată produselor.
- La ridicarea întregului scaun, butonul trebuie ținut continuu apăsat până când scaunul ajunge în poziția dorită.
- Vă rugăm să rețineți că scaunul trebuie utilizat continuu timp de maximum 2 minute, iar apoi trebuie lăsat staționar 18 minute, dacă se folosește motorul.
- Întreținerea trebuie efectuată de către profesioniștii calificați.
- După fiecare tratament, utilizați un reactiv neutru pentru a îndepărta praful, petele de pe piele sau de pe bucățile de lemn.
- Când reglați spătarul, perna scaunului sau suportul pentru picioare sau ridicați întregul scaun folosind comanda manuală sau piciorul instalat pe produs, se recomandă să țineți mâinile, picioarele și capul departe de echipamentul aflat în mișcare (a se vedea figura din dreapta).

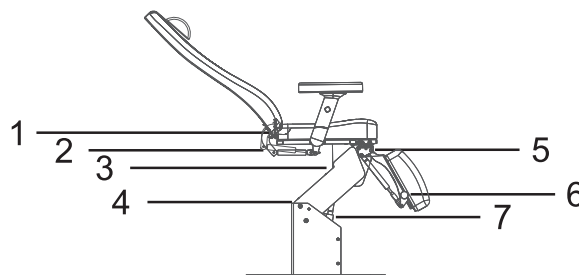

ESTE INTERZIS!

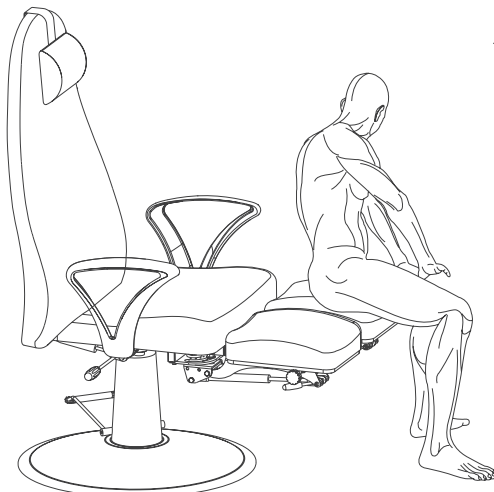

4 DOMENIUL DE APLICARE


Aceste produse sunt concepute pentru tratamente de înfrumusețare, masaje și manichiură.

5 INSTALARE

1. Așezați scaunul într-o poziție potrivită, ținând cont de aspectul general, lumina soarelui sau luminile artificiale și condițiile de funcționare ale salonului sau ale locuinței. A se păstra într-un mediu curat, uscat și răcoros.
2. Deschideți cutia de ambalaj pentru a verifica dacă scaunul este intact și dacă accesoriile sau piesele de schimb sunt complete. Vă rugăm să contactați distribuitorul sau producătorul pentru orice fel de problemă.
3. Instalare
Asigurați-vă că scaunul este așezat pe o podea plată și stabilă, pentru a evita eventualele accidente.

6 STRUCTURA SCAUNULUI PENTRU CENTRELE SPA


- Puteți regla unghiul spătarului, pernei, suportului pentru picioare și puteți ridica întregul scaun, deoarece este o structură compactă și integrală.

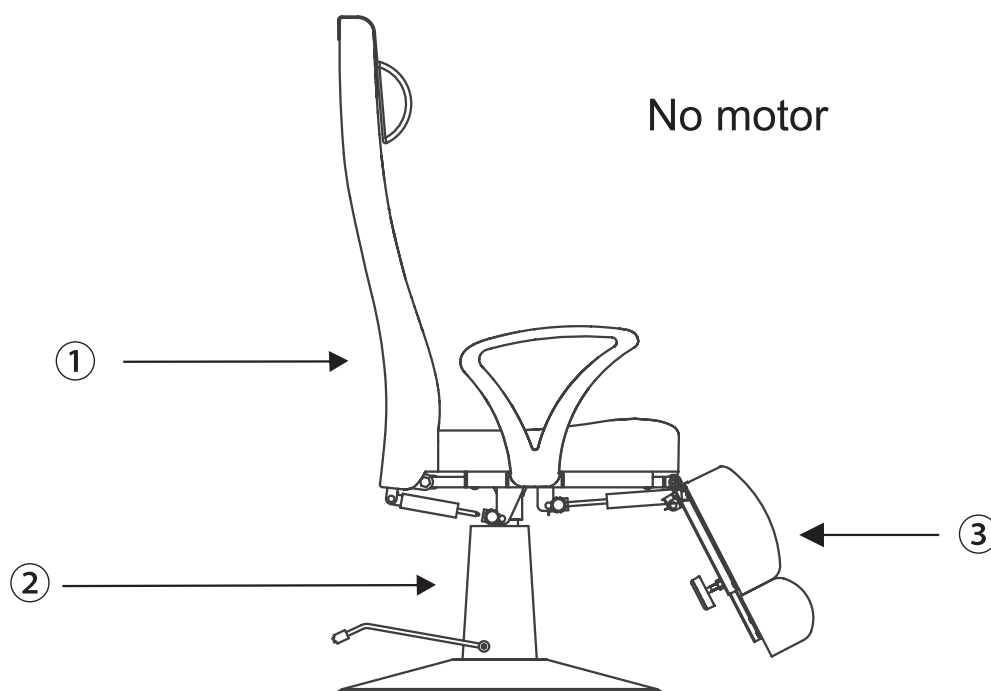

- ① reglarea unghiului spătarului (reglare manuală)
- ② reglarea poziției de ridicare a întregului scaun (reglare manuală)
- ③ reglarea unghiului suportului pentru picioare (reglare manuală)

7 PARAMETRI TEHNICI

Temperatura mediului ambiant	0°C~+40°C
Umiditate relativă	30%~90%
Sarcina nominală de ridicare	175 kg

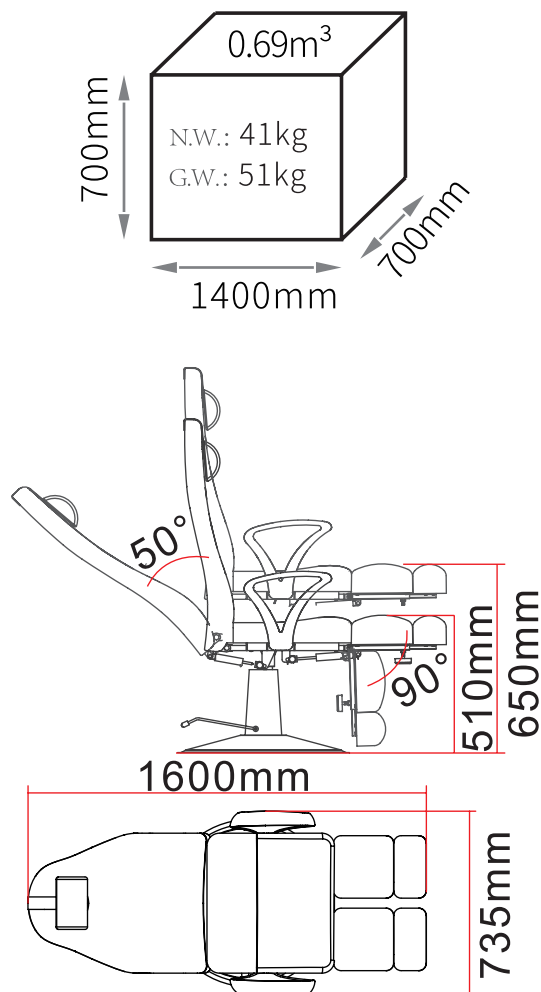

8 ÎNTREȚINERE

1. După fiecare tratament, utilizați o soluție neutră pentru a îndepărta praful, petele de pe piele, părțile metalice sau învelișul din plastic. Nu utilizați soluții dezinfectante precum alcool, acizi sau soluții alcaline. Această acțiune ar putea reduce durata de viață a pieselor din piele și a învelișului din plastic.
2. Vă rugăm să lubrifiați piesele mobile în mod regulat (o dată pe an).

9 SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

DEFECȚIUNE	MOTIV	SOLUȚIE
Zgomot anormal	1. Părțile rotative nu sunt lubrifiate corespunzător	1. Adăugați ulei de lubrifiere
	2. Îmbinările de rotație (cum ar fi balamalele, seturile de componente POM) nu sunt lubrifiate corespunzător	2. Adăugați ulei de lubrifiere

Dacă problema persistă chiar și după efectuarea operațiunilor descrise mai sus, contactați centrul de service sau furnizorul pentru a o rezolva.

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni.