



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SCALDALETTO ELETTRICO
HEATING UNDERBLANKET
CHAUFFE-LIT
AQUECEDOR DE COLCHÃO
VÄRMEUNDERFILT
VUOTEENLÄMMITIN
WÄRMEUNTERBERR
SALTEA ELECTRICĂ
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
VYHŘÍVANÁ PODLOŽKA
PODGRZEWANY PODKŁAD
ELEKTRISCHE ONDERDEKEN

REF **SS02(160*120) (GIMA 28664)**

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /
Maahantuoja:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



ROMÂNĂ

Manual de instrucțiuni

Pături electrice UB29103B

SS29 (150*080)-1X

INFORMAȚIE IMPORTANTĂ! PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ!

Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a utiliza acest dispozitiv, în special instrucțiunile de siguranță și păstrați manualul de instrucțiuni pentru a-l consulta pe viitor.

În cazul în care acest dispozitiv este cedat unei alte persoane, este esențial să se înmâneze și acest manual de instrucțiuni.



Nerecomandat copiilor mai mici de 3 ani.



Nu găuriți perna încălzită!



Nu folosiți produsul pliat sau înfășurat



Nu uscați în mașina de uscat rufe



Nu curățați chimic!



Nu călcați perna încălzită cu fierul de călcat!
Puteți călca cu fierul de călcat fața de pernă, la o temperatură scăzută!



Nu înălbiți



Spălați numai la mână



Aparat încadrat în clasa a II-a



Produs conform cu Directiva Europeană



Respectați instrucțiunile de utilizare

REF

Cod produs



Atenție: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare

LOT

Număr de lot



Eliminare DEEE

DESCRIERE



1. Buton OFF

2. Poziția 1 – nivelul 1 de temperatură

3. Poziția 2 – nivelul al 2-lea de temperatură

4. Poziția 3 – nivelul al 3-lea de temperatură

5. Ecran cu afișaj

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

- ceață pătură cu încălzire electrică nu trebuie folosită de persoane insensibile sau intolerante la căldură, deoarece este posibil ca acestea să nu reacționeze în caz de supraîncălzire a păturii.
- Această pătură cu încălzire electrică nu trebuie folosită de copiii foarte mici (cu vârstă cuprinsă între 0 și 3 ani), deoarece este posibil ca aceștia să nu reacționeze în caz de supraîncălzire a păturii.
- Această pătură cu încălzire electrică nu trebuie folosită de copiii mici (cu vârstă cuprinsă între 3 și 8 ani), decât dacă comutatorul a fost setat de un părinte sau un supraveghetor și dacă copilul a fost suficient de bine informat cu privire la utilizarea în siguranță a păturii cu încălzire electrică.
- Această pătură cu încălzire electrică poate fi folosită de copii de la 8 ani în sus și persoane cu capacități psihice, senzoriale sau mentale reduse, sau care nu dețin experiența sau cunoștințele necesare, numai dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la folosirea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg riscurile ce pot să apară.
- Nu permiteți copiilor să se joace cu pătura cu încălzire electrică.
- Operațiunile de curățare și întreținere ce sunt în sarcina utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- Această pătură cu încălzire electrică nu este destinată utilizării în spitale.
- Nu perforați cu acul.
- Nu folosiți pătura cu încălzire electrică dacă este pliată sau încrețită.
- Nu folosiți pătura electrică dacă este umezită.
- Această pătură cu încălzire electrică trebuie utilizată cu ajutorul comutatorului, conform indicațiilor de pe etichetă.
- Câmpurile electrice și magnetice pe care le produce această pătură electrică pot compromite funcționarea stimulatoarelor cardiace. Cu toate acestea, aceste câmpuri sunt mult sub limitele permise; puterea câmpurilor electrice: 5 000 V/m max., puterea câmpurilor magnetice: 80 A/m max., inducție magnetică: 0,1 mT max. Așadar, vă rugăm să vă consultați cu medicul dvs. și cu producătorul stimulatorului dvs. cardiac, înainte de a folosi această pătură cu încălzire electrică.
- Componentele electronice din comutator se înfierbântă în timpul folosirii păturii electrice.
- Așadar, nu acoperiți comutatorul și nu îl așezați peste pătura încălzită, în timpul folosirii acesteia.
- Nu trageți, nu răsușiți și nu îndoiți prea mult cablurile.
- Această pătură cu încălzire electrică trebuie verificată cu regularitate, pentru a sesiza eventualele semne de uzură sau deteriorare. În cazul în care această pătură cu încălzire electrică a fost folosită în mod necorespunzător sau dacă se încălzește prea mult, pătura trebuie

verificată de către producător, înainte de a fi folosită din nou.

- În caz de avariere a cablului de alimentare a păturii electrice, acesta trebuie înlocuit de către producător, de un agent de service al acestuia sau de persoane cu calificare similară, în vederea evitării oricăror pericole.

- Dacă doriți să depozitați sau să pliați pătura electrică:

- Lăsați-o să se răcească înainte de a o plia

- Nu o încrețiți, așezând obiecte peste aceasta, în timpul depozitării.

- Nu folosiți produsul pe un pat reglabil, sau verificați ca pătura electrică sau cablul să nu se înțepenească sau răsucescă.

- În caz de folosire a păturii cu încălzire electrică timp de mai multe ore, se recomandă setarea comutatorului pe nivelul cel mai jos de temperatură, pentru a evita supraîncălzirea.

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

- Conectați fișa la mufa de la baza vestei încălzite și celălalt capăt la o sursă de alimentare cu curent (CA220-240V). Asigurați-vă că aveți o priză de alimentare cu curent în apropiere și că poziționați corect cablul de alimentare, pentru a evita pericolul de împiedicare.

- Pentru a preîncălzi pătura, selectați pragul al treilea, timp de 15 minute.

Temperatura va crește treptat.

- După preîncălzire, rotiți butonul de control pe setarea de căldură dorită.

- Pentru a închide dispozitivul, rotiți butonul pe poziția „Off”.

Observații: Pătura electrică are o protecție de siguranță la supraîncălzire și este setată pentru a funcționa pe modul continuu timp de 90 de minute. Dacă doriți să prelunghiți acest timp, se recomandă să lăsați pătura electrică să se răcească timp de 5 minute, înainte de a o folosi din nou.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Atunci când nu folosiți pătura electrică și înainte de a o curăța, urmați instrucțiunile de mai jos:

- Asigurați-vă că butonul de control este pe poziția „OFF”.

- Deconectați alimentarea electrică.

- Deconectați fișa ce conectează controlerul la dispozitiv.

- Lăsați pătura electrică să se răcească, înainte de a o curăța.

Curățare

Petele mici pot fi curățate cu o lavetă sau un burete umezit și, la nevoie, cu foarte puțin detergent lichid pentru țesături delicate.

Avertisment: pătura electrică nu trebuie curățată chimic, nu trebuie îndoită, uscată în mașina de uscat rufe și nu trebuie călcată cu fierul de călcat.

Dacă pătura electrică este foarte murdară, aceasta poate fi spălată numai la mână, la 30°C (maxim). Spălatul la mașină, curățarea chimică sau uscarea în mașina de uscat rufe pot avaria cablul intern de încălzire, din cauza vitezei ridicate.

Folosiți un detergent pentru țesături delicate și dozați-l conform instrucțiunilor producătorului.

Nu spălați prea des pătura electrică, pentru a evita uzura precoce a acesteia.

Atunci când uscați pătura electrică, nu o agățați cu cârlige de rufe sau cu alte obiecte similare.

Nu expuneți pătura electrică la surse de căldură cum ar fi razele directe ale soarelui, radiatoare etc.

Reconectați cablul de alimentare la pătură, numai după ce fișa și țesătura s-au uscat complet.

Nu porniți niciodată pătura electrică, pentru a o usca.

DEPOZITARE

Dacă urmează să nu utilizați pătura electrică pentru o lungă perioadă de timp, se recomandă depozitarea acesteia în ambalajul original, într-un loc uscat și fără a așeza alte obiecte peste pătură

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni



Eliminare: Produsul nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Utilizatorii trebuie să elimine acest echipament prin aducerea acestuia la un punct de reciclare specific pentru echipamentele electrice și electronice