



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SCALDAPIEDI CON MASSAGGIO
FOOT WARMER WITH MASSAGE
CHAUFFE-PIEDS AVEC MASSAGE
CALIENTA PIES CON MASAJE
AQUECEDOR DE PÉS COM MASSAGEM
FUSSWÄRMER MIT MASSAGE
ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΠΟΔΙΩΝ ΜΕ ΜΑΣΑΖ
OGRZEWACZ DO STÓP Z MASAŻEM
OHŘÍVAČ CHODIDEL S MASÁŽÍ
ÎNCĂLZITOR PICIOARE CU APARAT PENTRU MASAJ
FOTVÄRMARE MED MASSAGE
VOETENWARMER MET MASSAGE
JALANLÄMMITIN HIERONTATOIMINNOLLA

REF FW403 (GIMA 28668)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /
Maahantuoja:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Manual de instrucțiuni Încălzitor picioare cu aparat pentru masaj



Aparat încadrat în clasa a II-a



Produs conform cu Directiva Europeană



Respectați instrucțiunile de utilizare



Cod produs



Atenție: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare



Număr de lot



Eliminare DEEE



Acest produs nu trebuie utilizat de copiii foarte mici (0-3 ani)!



Nu găuriți încălzitorul pentru picioare!



Nu utilizați încălzitorul pentru picioare când acesta este pliat!



Nu uscați încălzitorul pentru picioare în mașina de uscat rufe! Husa poate fi uscată într-un uscător!



Nu curățați chimic!



Nu călcați cu fierul de călcat încălzitorul pentru picioare! Husa poate fi călcată cu fierul de călcat, la o temperatură joasă!



Nu înălbiți!



Nu spălați încălzitorul pentru picioare! Husa poate fi spălată printr-o spălare normală la max. 30°C!

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a utiliza acest dispozitiv, în special instrucțiunile de siguranță și păstrați manualul de instrucțiuni pentru a-l consulta pe viitor. În cazul în care acest dispozitiv este cedat unei alte persoane, este esențial să se înmâneze și acest manual de instrucțiuni.

- Dispozitivul trebuie utilizat exclusiv pentru scopul pentru care a fost prevăzut, conform indicațiilor din manualul de instrucțiuni. Folosirea aparatului pentru alte scopuri se soldează cu anularea garanției.
- Dispozitivul nu este destinat uzului comercial sau în scopuri medicale.
- O utilizare prelungită a încălzitorului pentru picioare la o temperatură ridicată poate cauza arsuri ale pielii.

Despre alimentarea electrică

- Înainte de a conecta dispozitivul la alimentarea dvs. electrică, asigurați-vă că tensiunea de alimentare indicată pe plăcuța de valori nominale este compatibilă cu rețeaua dvs. de alimentare principală.
 - Introduceți unitatea de alimentare electrică în priză, numai când aparatul este oprit.
 - Acest aparat este destinat utilizării exclusiv cu unitatea de alimentare electrică din dotarea aparatului (tip: GQ12-120060-AG).
 - Păstrați unitatea de alimentare electrică, aparatul și cablul la distanță de orice sursă de căldură, suprafețe fierbinți, lichide și umezeală.
 - Nu atingeți unitatea de alimentare electrică atunci când vă aflați în apă sau dacă aveți mâinile ude sau umezite.
 - Nu atingeți dispozitivul dacă acesta a căzut în apă. Scoateți imediat din priză ștecherul de alimentare și unitatea de alimentare electrică.
 - Introduceți ștecherul dispozitivului în priză, numai dacă accesul la ștecher este posibil.
 - Închideți întotdeauna aparatul după folosire, folosind butoanele de pe unitatea de comandă și scoateți din priză unitatea de alimentare electrică.
 - Pentru a deconecta unitatea de la rețeaua de alimentare electrică, scoateți întotdeauna ștecherul din priză. Nu trageți de cablu!
 - Nu transportați, nu trageți și nu întoarceți dispozitivul apucând de cablu sau de unitatea de alimentare electrică.
 - În caz de avariere a cablului sau unității de alimentare electrică, întrerupeți imediat utilizarea aparatului. Din motive de siguranță, aceste piese pot fi înlocuite numai de tehnicieni de întreținere autorizați. Pentru evitarea riscurilor, trimiteți întotdeauna aparatul unui centru de service autorizat.
 - Asigurați-vă că nicio persoană nu se poate împiedica în cablu. Cablul nu trebuie să fie îndoit, prins sau răsucit.
- grupuri specifice de persoane
- Nu utilizați dispozitivul în cazul copiilor sau persoanelor cu dizabilități, în cazul persoanelor care au adormit sau sunt insensibile la căldură (persoane incapabile să reacționeze în caz de supraîncălzire).
 - Se interzice folosirea acestui dispozitiv de către copiii mai mici de 3 ani, deoarece aceștia nu sunt capabili să reacționeze în caz de supraîncălzire.
 - Acest dispozitiv nu trebuie utilizat de copiii mici care au împlinit vârsta de 3 ani, decât dacă unitatea de comandă a fost corect setată de părinți sau de persoanele care îi supraveghează și dacă copilul a fost corespunzător instruit cu privire la utilizarea corectă a unității de comandă.
 - Acest aparat poate fi folosit de copii de la 8 ani în sus și persoane cu capacități psihice, senzoriale sau mentale reduse, sau care nu dețin experiența sau cunoștințele necesare, numai dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la folosirea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg riscurile ce pot să apară.
 - Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
 - Nu utilizați acest aparat pentru a suplimenta sau înlocui tratamentele medicale. Simptomele și problemele cronice se pot acutiza.
 - Dacă simțiți durere sau disconfort în timpul masajului, întrerupeți imediat și adresați-vă medicului dvs.
 - Înainte de a utiliza dispozitivul, consultați-vă cu medicul dvs. cu privire la eventualele dureri suspecte, în cazul în care urmați un tratament medicamentos sau folosiți echipamente medicale.
- ### Înainte de a utiliza aparatul
- Înaintea fiecărei utilizări, verificați cu atenție unitatea de alimentare electrică, aparatul pentru masaj și cablul, pentru a sesiza eventualele daune. Nu încercați să folosiți o unitate defectă.
 - Nu folosiți aparatul dacă aparatul sau cablul de alimentare prezintă semne de avarie, dacă nu este în perfectă stare de funcționare, dacă a fost scăpat pe jos sau dacă este umezit. Pentru evitarea riscurilor, trimiteți întotdeauna aparatul unui centru de service autorizat.

- Nu pătrați și nu așezați niciun dispozitiv electric pe o suprafață de unde poate să cadă într-o cadă sau chiuveță.
- Utilizați aparatul numai într-un loc adecvat, conform indicațiilor din prezentul manual de instrucțiuni.
- Nu utilizați aparatul atunci când dormiți sau stați întins în pat.
- Timpul maxim de funcționare pentru o sesiune este de 15 minute. O utilizare mai lungă scurtează durata de viață a dispozitivului și poate cauza tensionarea mușchilor, în loc să-i relaxeze.
- Perioadele foarte lungi de utilizare pot cauza supraîncălzirea. Lăsați întotdeauna aparatul să se răcească, înainte de a-l folosi din nou.
- Nu depzitați și nu utilizați niciodată aparatul în apropierea unui aragaz electric sau în apropierea altor surse de căldură.
- Nu lăsați niciodată unitatea nesupravegheată, dacă este conectată la rețeaua de alimentare electrică.
- Nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu obiecte ascuțite sau tăioase.
- Nu acoperiți aparatul, când acesta este pornit. Nu îl folosiți niciodată sub pătură sau perne. Apare riscul de incendiu, electrocutare sau accidentare.
- Nu utilizați un comutator extern cu temporizator, sau un sistem separat de telecomandă, pentru a acționa aparatul.
- Nu utilizați dispozitivul în timp ce folosiți spray-uri cu aerosoli sau concomitent cu folosirea oxigenului.

Întreținere și curățare

- Unitatea nu necesită întreținere. În caz de apariție a unei defecțiuni, verificați doar dacă adaptorul de alimentare cu curent este corect conectat.
- Puteți curăța chiar dumneavoastră dispozitivul. În caz de funcționare defectuoasă a dispozitivului, nu încercați să îl reparați. O astfel de manevră se soldează cu anularea oricărui drept la garanție. Adresați-vă distribuitorului dvs. specializat și solicitați efectuarea reparațiilor într-un centru de service autorizat.
- Nu scufundați dispozitivul în apă sau în alte lichide.
- Dacă totuși lichidul a pătruns în dispozitiv, scoateți imediat cablul din priză.
- Operațiunile de curățare și întreținere ce sunt în sarcina utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- Evitați pliarea excesivă a aparatului, deoarece obiectele așezate peste acesta în timpul depozitării pot cauza avarii.
- Aparatul nu trebuie utilizat dacă prezintă semne de deteriorare.
- Aparatul nu trebuie utilizat pentru încălzirea animalelor.
- Scoateți-vă încălțăminta de exterior, înainte de a utiliza aparatul.

Utilizare prevăzută

Acest dispozitiv se utilizează pentru a vă încălzi și masa picioarele, pentru a vă relaxa și spori starea de bine. Nu este destinat utilizării în scopuri medicale și terapeutice. Nu este recomandat pentru folosirea în clinici, cursuri de masaj, cabinete de îngrijire personală etc. Dispozitivul nu este un dispozitiv medical și nu a fost conceput pentru terapia durerii. Dacă aveți neclarități sau nelămuriri, adresați-vă medicului dvs. înainte de a utiliza dispozitivul.

AVERTISMENT

Asigurați-vă că nu ați lăsat ambalajul din polietilenă la îndemâna copiilor! Pericol de sufocare!



DISPOZITIV ȘI COMENZI

1. Husă (interioară)
2. Încălzitor pentru picioare
3. Comutator glisant pentru încălzire
4. Comutator glisant pentru masaj
5. Racord de alimentare electrică

Comandă livrată

Înainte de toate, verificați dacă dispozitivul este intact și nu a suferit niciun fel de daune. Dacă aveți îndoieli, nu îl folosiți și adresați-vă distribuitorului dvs. sau centrului dvs. de service. Comanda include următoarele componente:

- 1 Încălzitor pentru picioare FW403
- 1 Unitate de alimentare electrică
- 1 Manual de instrucțiuni

Dacă, în faza de scoatere din ambalaj, sesizați daune produse în timpul transportului, adresați-vă imediat distribuitorului dvs.

FOLOSIRE

Asigurați-vă întotdeauna că încălzitorul pentru picioare nu este încălețat sau pliat, în timpul utilizării. Încălzitorul pentru picioare trebuie utilizat întotdeauna cu husa.

- Conectați unitatea de alimentare și perna pentru masaj la racordul pentru alimentare electrică 5 și introduceți unitatea de alimentare electrică în priză. Asigurați-vă că adaptorul de alimentare este ușor de accesat.
- Porniți funcția de încălzire, glisând comutatorul 3 pe poziția „HI” (încălzire puternică) sau „LO” (încălzire ușoară).
- Porniți funcția de vibrație, glisând comutatorul 4 pe poziția „HI” (vibrație puternică) sau „LO” (vibrație ușoară).
- După fiecare utilizare, închideți dispozitivul glisând ambele comutatoare pe OFF și scoțând unitatea de alimentare din priză.

Curățare și întreținere

- Înainte de a curăța unitatea, asigurați-vă că aceasta este închisă și deconectată de la rețeaua de alimentare. Curățați unitatea numai după ce s-a răcit, folosind o lavetă moale umezită.
- Sub nicio formă nu utilizați detergenți agresivi, perii tari, solvenți sau alcool, deoarece acestea pot deteriora suprafața aparatului.
- Atunci când îl curățați, nu introduceți niciodată aparatul în apă și asigurați-vă că apa nu pătrunde în aparat.
- Așteptați până când dispozitivul s-a uscat complet, înainte de a-l folosi din nou.
- Îndreptați eventualele îndoituri ale cablului.
- Se recomandă păstrarea dispozitivului în ambalajul său original, într-un loc curat și uscat.

Căptușeală internă (interioară)

- Înainte de a curăța încălzitorul pentru picioare, căptușeala internă trebuie scoasă.
- Husa poate fi curățată conform instrucțiunilor de îngrijire de pe etichetele acesteia.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Denumire și model: FW403

Alimentare electrică: 100 - 240 V~ 50/60 Hz
12V 1,5A

Consum: 18 Watt

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni



Eliminare: Produsul nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Utilizatorii trebuie să elimine acest echipament prin aducerea acestuia la un punct de reciclare specific pentru echipamentele electrice și electronice