



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CINTURA RISCALDANTE

WAIST WRAP HEATING PAD

CEINTURE CHAUFFANTE

ALMOFADA D AQUECIMENTO D ENROLAR À CINTURA

HEIZWICKELKISSEN FÜR DIE HÜFTE

ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΜΕΣΗΣ

**PAS LĘDŹWIOUY ELEKTRYCZNY
ROZGRZEWAJĄCY**

ZAHŘÍVACÍ BEDERNÍ PÁS

SĂCULEȚ ÎNCĂLZITOR CU CUREA PE TALIE

VÄRMEDYNA MED MIDJEBAND

WARMTEGORDEL BUIK EN RUG

VYÖTÄRÖLLE KIEDOTTAVA LÄMPÖTYYNY

REF SS02A(29*69) (GIMA 28675)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja

Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.

No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China

Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /
Maahantuoja:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com



ROMÂNĂ

Manual de instrucțiuni SS02A(29*69)

INFORMAȚIE IMPORTANTĂ! PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ!

Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a utiliza acest dispozitiv, în special instrucțiunile de siguranță și păstrați manualul de instrucțiuni pentru a-l consulta pe viitor.

În cazul în care acest dispozitiv este cedat unei alte persoane, este esențial să i se înmâneze și acest manual de instrucțiuni.

Acest manual de instrucțiuni aparține acestui dispozitiv. Conține informații importante privind pornirea și funcționarea acestuia. Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni. Nerespectarea acestor instrucțiuni se poate solda cu grave leziuni, sau cu avarierea dispozitivului.



AVERTISMENT

Aceste note de avertizare trebuie respectate, pentru a evita accidentarea utilizatorului.



ATENȚIONARE

Aceste note trebuie respectate, pentru a evita avarierea dispozitivului.



NOTĂ

Aceste note vă oferă informații suplimentare privind instalarea sau funcționarea.



Aparat încadrat în clasa a II-a



Produs conform cu Directiva Europeană



Respectați instrucțiunile de utilizare



Cod produs



Atenție: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare



Număr de lot



Eliminare DEEE



Nu găuriți perna încălzită!



Nu folosiți perna încălzită când aceasta este pliată!



Acest produs nu trebuie utilizat de copii foarte mici (0-3 ani)!



Folosiți perna încălzită numai la interior!



Săculețul încălzitor poate fi spălat la mână! Puteți spăla husa pernuței printr-o spălare normală la max. 30°C!



Nu băgați în clor!



Nu uscați pernuța încălzită în mașina de uscat rufe! Husa pernuței nu poate fi introdusă în uscător!



Nu călcați perna încălzită cu fierul de călcat! Puteți călca cu fierul de călcat fața de pernă, la o temperatură scăzută!



Nu curățați chimic!

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

- Verificați cu atenție săculețul încălzitor înaintea fiecărei utilizări, pentru a sesiza eventualele semne de uzură.
- Nu îl folosiți dacă sesizați semne de uzură, deteriorare sau semne de utilizare necorespunzătoare asupra dispozitivului, sau dacă comutatorul, cablurile sau dispozitivul nu funcționează.
- Înainte de a conecta dispozitivul la alimentarea dvs. electrică, asigurați-vă că tensiunea de alimentare indicată pe plăcuța de valori nominale este compatibilă cu rețeaua dvs. de alimentare principală.
- Nu pliați și nu încrețiți săculețul încălzitor în timpul utilizării.
- Nu perforați săculețul și nici nu prindeți ace de siguranță sau alte obiecte ascuțite pe săculeț.
- Nu utilizați dispozitivul în cazul copiilor sau persoanelor cu dizabilități, în cazul persoanelor care au adormit sau sunt insensibile la căldură (persoane incapabile să reacționeze în caz de supraîncălzire).
- Se interzice folosirea acestui dispozitiv de către copiii mai mici de 3 ani, deoarece aceștia nu sunt capabili să reacționeze în caz de supraîncălzire.
- Acest dispozitiv nu trebuie utilizat de copii mici care au împlinit vârsta de 3 ani, decât dacă unitatea de comandă a fost corect setată de părinți sau de persoanele care îi supraveghează și dacă copilul a fost corespunzător instruit cu privire la utilizarea corectă a unității de comandă.
- Acest aparat poate fi folosit de copii de la 8 ani în sus și persoane cu capacități psihice, senzoriale sau mentale reduse, care nu dețin experiența sau cunoștințele necesare, numai dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la folosirea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg riscurile ce pot să apară.
- Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

- Operațiunile de curățare și întreținere ce sunt în sarcina utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- Nu folosiți niciodată saculețul fără supraveghere.
- Dispozitivul este destinat exclusiv uzului privat și nu poate fi folosit în spitale.
- Nu adormiți în timp ce saculețul încălzitor este pornit.
- O utilizare prelungită a pernuței încălzite la o temperatură ridicată poate cauza arsuri ale pielii.
- Nu acoperiți saculețul cu alte perne. Comutatorul de comandă nu trebuie acoperit și nu trebuie așezat peste sau dedesubtul saculețului, în timp ce dispozitivul este în funcțiune.
- Nu vă așezați pe saculețul încălzitor. Din contră, întindeți saculețul peste partea corpului pe care doriți să o încălziți. Utilizarea prevăzută a acestuia este de a încălzi numai spatele și gâtul.
- Nu atingeți niciodată un saculeț încălzitor care a căzut în apă. Scoateți imediat unitatea din priza de alimentare electrică.
- Țineți cablul de alimentare la distanță de suprafețele fierbinți.
- Nu transportați, nu trageți și nu întoarceți niciodată saculețul încălzitor apucându-l de cablul de alimentare și nu lăsați cablul să se răsucească.
- Nu utilizați saculețul încălzitor când este umezit și folosiți-l numai în încăperi uscate (nu în baie sau în alte încăperi similare).
- Controlerul și cablurile trebuie ferite de orice sursă de umezeală.
- În caz de avariere, nu încercați să reparați dispozitivul de unul singur. Reparațiile trebuie efectuate exclusiv de un distribuitor specializat autorizat, sau de personal calificat autorizat.
- În caz de deteriorare a cablului de alimentare, pentru evitarea riscurilor cablul trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau de o persoană autorizată în acest sens.
- Un cablu de alimentare avariat trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare de același tip.
- Saculețul încălzitor poate fi pus în funcțiune numai cu unitatea de comandă (SS02) din dotare.
- Atunci când depozitați saculețul încălzitor, lăsați-l să se răcească înainte de a-l plia.
- În cazul în care aveți îndoieli legate de probleme de sănătate, consultați-vă cu medicul dvs. înainte de a utiliza saculețul încălzitor.
- Nu folosiți saculețul încălzitor pe părți ale corpului umflate, rănite sau inflamate.
- În cazul în care simțiți dureri persistente la nivelul mușchilor și articulațiilor, informați-vă medicul. Durerile persistente pot fi un simptom al unei boli grave.
- Dacă simțiți durere sau disconfort în timpul folosirii dispozitivului, întrerupeți imediat folosirea acestuia

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Săculeț încălzitor

- Înainte de a curăța saculețul, scoateți-l din priza de alimentare și lăsați-l să se răcească complet, sau timp de cel puțin zece minute.
- Saculețul încălzitor este echipat cu un cablu detașabil. Deconectați fișa și scoateți cablul din saculețul încălzitor.
- Puteți spăla saculețul încălzitor ușor, la mână. Cea mai bună metodă de a spăla saculețul încălzitor este de a-l pune la înmuiat în apă caldă cu puțin detergent delicat și de a-l storce apoi cu delicatețe.
- Clătiți saculețul încălzitor de mai multe ori, pentru a îndepărta orice urmă de detergent.
- Depozitați aparatul într-un loc curat și uscat, așezat pe orizontală, fără a-l acoperi și fără a așeza alte obiecte deasupra acestuia.
- Folosiți aparatul numai după ce s-a uscat complet.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY GIMA

Platí 12 měsíční standardní záruka Gima B2B



Eliminare: Produsul nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Utilizatorii trebuie să elimine acest echipament prin aducerea acestuia la un punct de reciclare specific pentru echipamentele electrice și electronice