

Aplicatii: hartia pentru inregistrari medicale este utilizata pentru inregistrarea traseelor parametrilor fiziologici monitorizati de echipamentele medicale in timpul efectuarii unei investigatii medicale.

Utilizarea este permisa numai operatorilor medicali si paramedicali autorizati avand competente in folosirea echipamentelor medicale de inregistrare.

De identificare a produsului: codul dispozitivului, LOTul de productie si marca sunt prezente pe eticheta de identificare lipita pe ambalajul exterior.

Utilizare si instalare:

- ✓ Inaintea utilizarii acestui produs este necesar sa se verifice daca dimensiunea si caroiajul hartiei (daca este cazul) sunt conforme cu specificatiile aparatului.
- ✓ Evitati folosirea unui obiect taios atunci cand deschideti ambalajul.
- ✓ Inaintea utilizarii produsului este intotdeauna necesar sa consultati instructiunile aparatului medical.
- ✓ Hartia (rola sau evantai) trebuie sa fie asezata corect in locul special amenajat din interiorul aparatului medical pentru a nu fi obstrucionat fluxul hartiei. Nu foratati niciodata introducerea hartiei in aparat!!
- ✓ Caroiajul, daca este prezent si exceptand alte indicatii, are o scala de ordinul mm si o precizie de $\pm 1\%$.

Conditii de depozitare:

- ✓ inainte de utilizare , depozitati hartia intr-un spatiu uscat si aerisit..
Expuneri indelungate la umiditate si la alte temperaturi decat cele indicate pe eticheta pot conduce la deteriorari ale hartiei.
Evitati expunerea la lumina directa a soarelui si la lumini puternice (UV).
- ✓ Dupa inregistrare:
pentru a asigura o conservare indelungata a inregistrarilor
Depozitati hartia intr-un loc aerisit si uscat.
Evitati expunerea la lumina directa a soarelui si la lumini puternice (UV).
Evitati contactul cu lichide si solventi cum ar fi alcool, cetone, etc.
Evitati contactul cu alte tipuri de hartie termica sau chimica.
Nu introduceti hartia in invelitori fabricate din PVC , folositi invelitori corespunzatoare.

Conditii de scoatere din uz

Utilizarea, depozitarea si scoaterea din uz a hartiei nu conduce la poluarea mediului.
Scoaterea din uz se poate realiza prin plasarea in locurile special amenajate pentru reciclare.
Caracterul inflamabil al acestui produs este similar cu cel al unei hartii obisnuite. Pentru a stinge eventualele incendii accidentale in care este implicat acest produs se poate utiliza apa sau un extinctor normal.

Contraindicatii: Pe baza experientelor anterioare si a rezultatelor unor analize, s-a constatat faptul ca o folosire corecta a produsului nu poate cauza efecte adverse.

RAPOARTE:

Orice accident grav produs, privitor la dispozitivul medical fabricat de firma noastra, trebuie semnalat producatorului si autoritatii competente in statul membru pe teritoriul caruia isi are sediul utilizatorul.

