



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Distribuit de - Levererad av:

Gima S.p.A


Via Marconi, 1

20060 Gessate (MI) - Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com


www.gimaitaly.com

VIZIERĂ DE PROTECȚIE GIMA - ANSIKTSSKÄRM GIMA

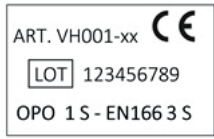

Bandă de închidere cu scai
Band med tillslutning med kardborrband

Accesorii de blocare interschimbabil
Utbytbar låsetillbehör

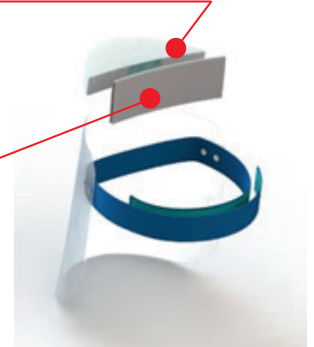

Cserélhető elülső párna
Wymienna wyściółka przednia

RO

MARCAJ ȘI SIMBOLURI DE UTILIZARE

VH001: Model produs, xx cod de culoare a benzii. **LOT**: număr de lot. OPO: Identificarea producătorului; 1: Clasă optică; S: Simbol de impact cu energie mică; -EN166 Standard tehnic de referință, 3: simbol pentru lichide; S: simbol de impact cu energie mică, CE: omologare CE. Viziera este realizată în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 425/2016 și este omologată CE de către Organismul Notificat Nr. 0426 (Italcert Srl, Viale Sarca 33, Milano) și este în conformitate cu standardul EN 166:2001. Declarația de conformitate CE este disponibilă pe site-ul web al producătorului și al companiei Gima www.gimaitaly.com

APLICARE ȘI REGLARE

- 1) Aplicați suportul frontal și strângeți-l cu banda de închidere cu scai.
- 2) Așezați masca pe frunte, în poziție centrală.
- 3) Întindeți curelușele și fixați-le cu banda de închidere cu scai, în poziția dorită.

ÎNȚREȚINERE ȘI REFOLOSIRE

Examinați viziera, înaintea fiecărei utilizări: verificați dacă este curată, transparentă, dacă nu prezintă fisuri și dacă toate cusăturile sunt intacte. De asemenea, verificați ca banda ce se aplică de jur-împrejurul capului să nu fie uzată și, o dată aplicată pe cap, să nu se lărgească. Dacă viziera este deteriorată, înlocuiți-o

- În caz de contaminare cu substanțe străine, efectuați operațiunile de curățare

- Înlocuiți viziera, în caz de deteriorare sau de contaminare a acesteia cu substanțe ce nu pot fi curățate.

Curățare: Echipamentul individual de protecție trebuie curățat cu un detergent neagresiv și cu apă caldă, aplicată cu o lavetă moale, ce se va folosi și în faza de clătire. Pentru operațiunile de dezinfectare, folosiți soluții dezinfectante pe bază de alcool. Suportul frontal poate fi spălat în mașina de spălat la 40° pentru o igienă normală, dar dacă este necesară igienizarea, acesta trebuie înlocuit.

Refolosire: Viziera poate fi refolosită, cu condiția să fi fost în prealabil dezinfectată și după înlocuirea prealabilă a suportului frontal și orice accesoriu de închidere opțional.

PĂSTRARE, DEPOZITARE, AMBALARE ȘI TRANSPORT

Produsul trebuie protejat de raze directe ale soarelui, de lămpi fluorescente, de raze X și de ozon. Produsul trebuie păstrat într-un loc uscat, în propria cutie și trebuie protejat pentru a nu se deforma. Temperatură: +5°C ÷ +40°C, Umiditate relativă: < 60%. Transportați produsul în punga închisă și perfect sigilată.

Termen de valabilitate: 5 ani de la vânzarea către utilizatorul final, cu condiția păstrării în ambalajul original și în condițiile sus-menționate

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA



Materialele ce pot intra în contact cu pielea purtătorului pot provoca reacții alergice, în cazul persoanelor sensibile

Viziera de protecție, dacă este purtată peste ochelari de vedere, poate transmite un impact, ducând astfel la apariția unui pericol pentru purtător

Schimbați echipamentul de protecție, dacă ecranul acestuia este zgâriat sau deteriorat

Viziera de protecție nu asigură protecție împotriva particulelor de mare viteză, nici la temperatura camerei și nici la temperaturi extreme

