



CONTRAINDICAȚII
Nu sunt descrise contraindicații.

AVERTISMENTE
Dacă dispozitivul este reutilizat, contrar prezentelor instrucțiuni, se pot produce următoarele:

- Deteriorarea materialelor
- Murdărirea dispozitivului și posibila prezentă a unor reziduuri biologice care pot cauza infecții încrucișate
- Pierderea caracteristicilor funcționale inițiale ale produsului.

Înainte de conectarea la sursa de oxigen, verificați funcționarea acesteia. Aplatizarea accidentală a tubului de conectare nu permite fluxul corespunzător de oxigen și poate cauza desfacerea conectorului. Prin urmare, se recomandă ca utilizatorii să procedeze cu atenție. Aceeași atenție trebuie să fie acordată inclusiv în cazul modelelor care sunt furnizate cu un tub Sure Flow care prezintă totuși un risc de deconectare, chiar dacă în mai mică măsură.

Acest produs conține ftalați (DEHP). Chiar dacă riscurile pentru sănătatea umană nu sunt confirmate, utilizarea dispozitivului la femei însărcinate/care alăptează sau la copii trebuie evaluată de medicul dumneavoastră.

Utilizarea canulelor nazale poate fi asociată cu epistaxis la subiecți predispuși la sângerări și/sau care urmează un tratament cu anticoagulante.

Oxigenul concentrat poate cauza aprinderea materialelor combustibile. Pentru a evita riscul de incendiu sau de explozie, țineți dispozitivul departe de sursele de aprindere și consultați precauțiile de utilizare a echipamentului utilizat pentru administrarea de oxigen.

DEPOZITARE
Produsul trebuie depozitat în ambalajul său original în încăperi caracterizate de condiții de mediu, temperatură și umiditate relativă, specificate pe eticheta de pe ambalaj. Suprapunerea greutateilor pe ambalaje ar putea deteriora produsul.

OBSERVAȚII GENERALE
Dacă, pe durata utilizării acestui dispozitiv sau ca urmare a utilizării sale, se produce un incident grav, raportați acest lucru producătorului și autorității naționale din țara dvs. Pentru orice defecțiune sau defect al dispozitivului, informați serviciul de calitate al producătorului.

ELIMINAREA DEȘEURILOR
Deșeurile provenite de la instituțiile medicale trebuie eliminate în conformitate cu reglementările în vigoare.

СИМВОЛИ - VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ - ZNAČENJE SIMBOLA - JELMAGYARÁZAT - SIMBOLIŲ LEGENDA - SIMBOLU APZĪMĒJUMI - LEGENDĂ DE SIMBOLURI

	BG	CS	HR	HU	LT	LV	RO	SR
	Съответства на действащото европейско законодателство относно медицинските изделия	Vyhovuje současně evropské legislativě o zdravotnických prostředcích	U skladu s važećim europskim zakonodavstvom o medicinskim proizvodima	Megfelel az orvosi eszközökre vonatkozó jelenlegi európai jogszabályoknak	Atitinka galiojančius Europos teisės aktus dėl medicinos priemonių	Atbilst pašreizējiem Eiropas tiesību aktiem par medicīnas ierīcēm	Conform cu legislația europeană în vigoare privind dispozitivele medicale	Usaglašeno sa tekućim evropskim propisima o medicinskim sredstvima
	Медицинско изделие	Zdravotnický prostředek	Medicinski proizvod	Orvostechnikai eszköz	Medicinos priemonė	Medicīniska ierīce	Aparat medical	Medicinsko sredstvo
	Уникален идентификатор на изделията	Jedinečným identifikátorem prostředku	Jedinstvena identifikacija proizvoda	Egyedi eszközazonosító	Unikalasis priemonės identifikatorius	Ierīces unikālais identifikators	Identificator unic al unui dispozitiv	Jedinstveni identifikator uređaja
	Направете справка с инструкциите за употреба	Čtěte uživatelskou příručku	Proučite upute prije korištenja	Consult használati utasítás	Žr. naudojimo instrukcijas	Skatīt lietošanas instrukciju	Consultați instrucțiunile de utilizare	Konsultujte instrukcije za upotrebu
	Производител	Výrobce	Proizvođač	Gyártó	Gamintojas	Ražotājs	Producător	Proizvođač
	Дистрибутор	Distributor	Distributer	Forgalmazó	Platintojas	Izplatītājs	Distribuito	Distributer
	Каталожен номер	Katalogové číslo	Kataloški broj	Katalógus száma	Katalogo numeris	Kataloga numurs	Număr de catalog	Kataloški broj
	Партиден номер	Číslo šarže	LOT	Batch kód	Partijos kodas	Partijas kods	Cod de Lot	Serijski broj
	Дата на производство	Datum výroby	Datum proizvodnje	Gyártás dátuma	Pagaminimo data	Ražošanas datums	Data de fabricație	Datum proizvodnje
	Използвай при	Spotřebujte do	Használata által	Használata által	Tinka iki	Izmantošanai	Data limită de utilizare	Rok upotrebe
	Температурни ограничения	Omezení teploty	Temperaturni raspon	Hőmérséklet korlátozás	Temperatūros apribojimas	Temperatūras ierobežojums	Limite de temperatură	Ograničenje temperature
	Ограничения на влажността	Omezení vlhkosti	Raspon vlažnosti zraka	Páratartalom korlátozás	Drėgnio apribojimas	Mitruma ierobežojumi	Limite de umiditate	Ograničenje vlažnosti vazduha
	Пазете от пряка слънчева светлина	Nevystavujte slunečnému záření	Štititi od direktnog sunčevog svjetla	Tartsa távol a napfénytől	Saugoti nuo saulės spindulių	Nepaļaut produkta atrašanos tiešā saules gaismā	A se feri de razele soarelui	Držati dalje od sunčeve svetlosti
	Mennyisége darabok	Počet kusů	Količina komada	Mennyisége darabok	Dalių kiekis	Vienumu daudzums	Număr de bucăți	Količina komada
	Не съдържа естествен гумен латекс	Neobsahuje přírodní latex	Ne sadrži prirodnu gumu i lateks	Nem tartalmaz természetes gumi latex	Sudėtyje nėra latekso	Nesatur dabīgās gumijas lateksu	Nu conține cauciuc natural (latex)	Ne sadrži prirodnu gumu lateks
	Не се допуска повторна употреба	Nepoužívat opakovaně	Nemojte ponovno koristiti	Ne használja újra	Pakartotinai nenaudoti	Nelietot atkārtoti	A nu se reutiliza	Zabranjena ponovna upotreba
	Съдържа фталати	obsahuje ftaláty	Sadrži ftalate	Tartalmazza ftalátok	Sudėtyje yra ftalatų	Satur ftālātus	Conține ftalați	Sadrži ftalate