

surgifix®

SINGLEFIX

رباط طبي واقى معقم للإصبع جاهز للاستعمال.

Стерилна предпазна превръзка за пръст,
готова за използване

Sterilní ochranná zdravotnická pomůcka na prst
připravena pro použití

Steril fingerbandage parat til brug

Sörme kaitsev sterilne kasutusvalmis haavaside
Suojaava, steriili, valmiskäyttöinen sidos sormelle

Pansement stérile protecteur pour doigt prêt à
l'usage

指の殺菌・保護、すぐにご使用できます。

Άσηπτη θεραπευτική αγωγή για το δάχτυλο
έτοιμη προς χρήση

Sterile ready-to-use finger medication

Medicazione sterile protettiva per dito pronta per l'uso
Aizsargājošs ārstnieciskais līdzeklis pirkstam

gatavs lietošanai

Sterilus parengtas naudoti apsauginis tvarstis pirštui

Steriele, beschermende vingermedicatie, klaar
voor gebruik

Steril forbinding for finger, klar til bruk

Sterylny środek ochronny na palec, gotowy do użycia

Medicação estéril protectora para os dedos
pronta para uso

Pansament steril pentru protecția degetului gata
de utilizare

Стерильная защитная перевязка для пальца,
готовая к использованию

Sterilný ochranný liečebný prostriedok na prst
pripravený na použitie

Zaščitno sterilno zdravljenje prsta, pripravljeno
za uporabo

Medicación estéril para dedo lista para usar

Steril skyddsomläggning för fingret. Klar för
användning

Gebrauchsfertiges steriles Verbandmaterial für
Finger

Kullanıma hazır, steril koruyucu sargı bezi

Használatra kész védő, steril ujjkötés

RO





Utilizare: pansament steril pentru protecția degetului

Instrucțiuni:

- Tratați rana înainte de a utiliza dispozitivul.
- Se recomandă folosirea unui tifon steril dacă rana sângerează.
- Se vor evita utilizările improprii.
- Nu se va lăsa la îndemâna copiilor.
- Nu strângeți în mod excesiv corzile la încheietura mâinii.
- Nu se va ingera.
- Nu utilizați dacă ambalajul prezintă iregularități.



Via delle Poste, 16
14010 Dusino San Michele (AT) - Italy
www.fraproduction.it

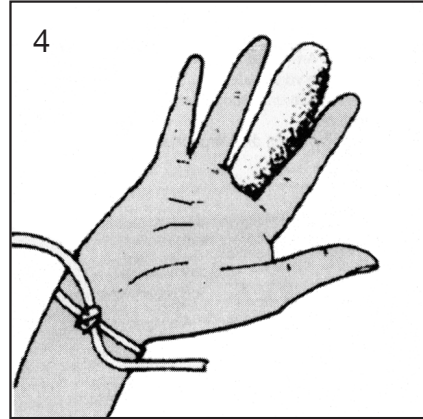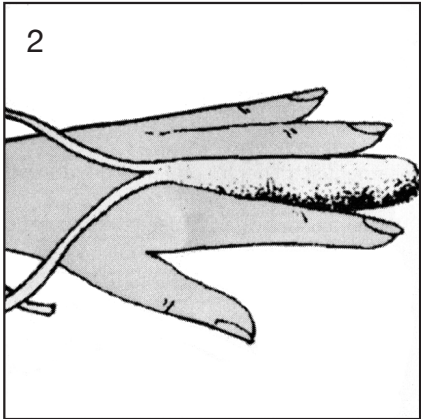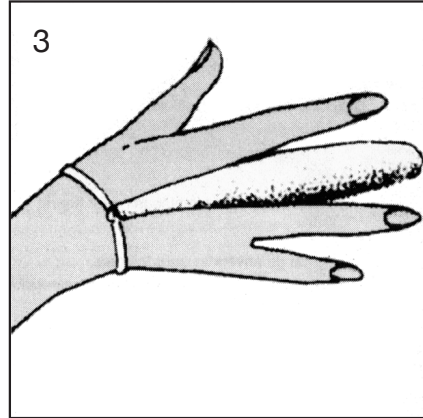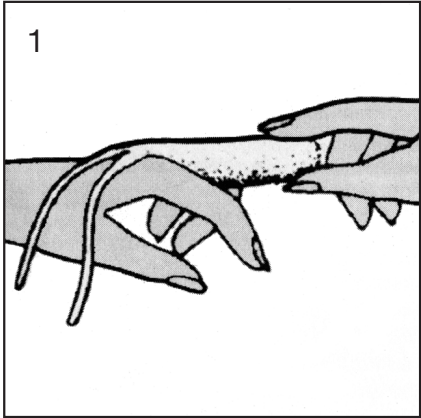

PAP 22
Carta
Raccolta differenziata
Verifica le disposizioni del tuo Comune

MD



CE 0373



STERILE