

RO INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE:

Desfaceti ambalajul si aplicati compresa pe zona afectata, fixati apoi cu un bandaj lejer.

Produse sub forma de gel, aplicati din abundenta pe zona afectata. Nu masati.

Atentie:

Pentru uz extern. A nu se folosi pe arsuri profunde. Daca nu se observa modificari in aspectul arsurii in cel mult 7 zile, sau daca iritatie, roseata persista sau se extind, ori in cazul in care apare o infectie, intrerupeti utilizarea produsului si consultati medicul.