

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE. CONSULTAȚI UN MEDIC ÎNAINTE DE UTILIZARE.

CONTRAINDICAȚII: Nu este destinat persoanelor cu o greutate de peste 242 lbs (110 kg) - Nu este destinat în condiții de gheață sau alunecoase. - Nu este destinat persoanelor cu alergii la latex.

GHID DE INSTRUCȚIUNI: Pentru a desface bastonul, țineți de mâner și lăsați segmentele pliabile ale tijei să se deschidă spre podea. Pentru a preveni căderile, este necesar să verificați întotdeauna dacă segmentele individuale ale tijei (Fig. 1) sunt fixate în siguranță.

AVERTISMENT! NU dezasamblați corpul bastonului. Bastonul conține un cablu elastic în interior. Eliberarea necontrolată a cablului elastic din interior poate provoca leziuni grave pentru părțile corpului neprotejate, în special pentru ochi. În cazul în care cablul elastic este tăiat, uzat sau deteriorat, întrerupeți utilizarea.

NU întindeți cablul mai mult decât este necesar pentru a dezasambla sau asambla segmentele.

PENTRU A REGLA ÎNĂLȚIMEA BASTONULUI: Slăbiți sistemul de închidere prin răsucire, rotind în sens orar de câteva ori. Apăsăți butonul de blocare și trageți în sus de mâner pentru a-l lungi sau împingeți în jos de mâner pentru a-l scurta. Nu uitați să strângeți din nou sistemul de închidere prin răsucire după ce reglați bastonul la înălțimea dorită.

AVERTISMENT! Pentru a preveni căderile, asigurați-vă întotdeauna că segmentele individuale ale tijei sunt fixate în siguranță pe poziție și că butonul de blocare este complet acționat. Asigurați-vă întotdeauna că piciorul pivotant al bățului este fixat bine pe baston pentru a evita căderile.

PENTRU A PLIA BASTONUL: Bastonul dumneavoastră se pliază ușor la o dimensiune convenabilă pentru călătorii, separând cele 4 segmente individuale ale tijei unul de celălalt. Țineți fiecare set de segmente de tijă lângă îmbinare și trageți-le separat. Segmentele individuale ale tijei se vor plia perfect împreună.



PENTRU A UTILIZA LUMINILE DE PE BASTON: Butonul din partea superioară a mânerului bastonului activează luminile. Apăsarea butonului o dată va activa lumina din fața bastonului, o nouă apăsare va aprinde, de asemenea, lumina roșie de la baza mânerului, iar a treia apăsare o va stinge. Lumina din față poate fi rotită pentru a direcționa lumina acolo unde aveți nevoie.

SEMNAL SOS: Pentru a activa semnalul SOS, apăsați butonul de pe lateralul mânerului; lumina de la bază va clipi, iar mânerul va emite un sunet de alarmă.

ÎNLOCUIREA BATERIILOR: Deschideți compartimentul bateriilor din spatele mânerului. Scoateți bateriile descărcate și aruncați-le în mod corespunzător. Folosind 2 baterii AAA, introduceți-le cu polaritatea corectă (polul pozitiv spre exterior, unde se află arcul). Închideți capacul compartimentului bateriei. Verificați periodic bastonul pentru a depista semne de uzură, inclusiv orice uzură a cablului elastic sau uzură a picioarelor de cauciuc. Dacă observați semne de uzură, întrerupeți imediat utilizarea.

AVERTISMENT! Nu amestecați baterii vechi cu baterii noi. Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau reincărcabile (nichel-cadmium).

TERMENI DE GARANȚIE GIMA: Se aplică garanția standard Gima de 12 luni B2B.

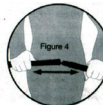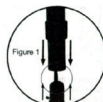

Gima 43050 - 43052

REF GB-806(1FOOT) GB-806(SKID PROOF)

Fabricato da/Manufactured by/Fabrique par/Fabricado por/Hergestellt von/
Fabricado por/Κατασκευάστηκε από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/
Tootja/Vaimistaja/Proizvodat/Gyártó/Ražots/Gamintojas/Produsert av/
Geïfabriceerd door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/
Tilbered av/تصنيع بواسطة
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315514, China
Made in China

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por/Importiert von/
Importado por/Εισαγυγί από/Dovezeno od/Importat de/Importat de/
af/Importija/ Tuoja:/Uvezeno od strane/Importálta:/Importēja/Importavo/
Importert av/Geïmporteerde door/Importowane przez/Importat de/Dovážal/
Uvozi/Importat av/توريد بواسطة
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

