


GIMA 43430

 Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.
Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
Made in China

REF **KDB-506**

EC **REP** SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands

 **Gima S.p.A.**
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

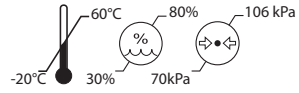

după fiecare utilizare.

PRECAUȚII ȘI AVERTISMENTE

Vă rugăm să citiți și să urmați măsurile de siguranță enumerate mai jos, care ar putea face operarea mai simplă și fără probleme.

Citiți și înțelegeți aceste instrucțiuni înainte de utilizare.

AVERTISMENT - Informații importante privind siguranța pentru pericolele care ar putea cauza vătămări grave.

ATENȚIE - Informații pentru prevenirea deteriorării produsului.

OBSERVAȚIE - Informații cărora ar trebui să le acordați o atenție deosebită.

AVERTISMENT

- *Planificați ÎNTOTDEAUNA operațiunile de ridicare înainte de a începe.
- * ÎNTOTDEAUNA efectuați LISTA DE VERIFICARE ZILNICĂ înainte de a utiliza dispozitivul.
- * Familiarizați-vă ÎNTOTDEAUNA cu comenzile și caracteristicile de siguranță ale dispozitivului înainte de a ridica pacientul.
- *NU utilizați un dispozitiv deteriorat.
- * Instalați ÎNTOTDEAUNA dispozitivul conform instrucțiunilor.
- *Verificați ÎNTOTDEAUNA dacă volumul de lucru sigur al dispozitivului este potrivit pentru greutatea pacientului
- * Urmați ÎNTOTDEAUNA instrucțiunile din manualul utilizatorului pentru a folosi dispozitivul.
- *Ridicați ÎNTOTDEAUNA pacientul cu roțile blocate. Asigurați-vă că aliniați schimbătorul cu centrul de greutate corect.
- *NU încercați să mutați dispozitivul împingând asupra actuatorului, barei de agățare sau a pacientului.
- *Deplasați ÎNTOTDEAUNA dispozitivul cu mânerul de împingere.
- *Mențineți ÎNTOTDEAUNA pacientul într-o poziție minim confortabilă înainte de transfer.
- *NU mutați dispozitivul încărcat peste viteza de 3 km/h 0,8 m/s.
- *NU vă deplasați pe teren neregulat sau accidentat. Mai ales dacă în el se află un pacient.
- *NU impuneți controale de siguranță. Toate comenzile sunt ușor de utilizat și nu necesită forță excesivă.
- *NU lăsați dispozitivul în pantă când se află un pacient în el.
- *NU ridicați pacientul decât dacă sunteți instruit și capabil să faceți acest lucru.

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Mediul de transport și depozitare al dispozitivului trebuie să fie după cum urmează:

- a) Interval de temperatură: -20°C~+60°C.
- b) Umiditatea relativă variază de la 30% la 80%.
- c) Presiunea atmosferică variază de la 70 kPa la 106 kPa.

AMBALAJ:

La confezione è composta da un set all'interno di 1 cartone.

ELIMINARE

Restricțiile de eliminare depind de contaminarea survenită în timpul utilizării și sunt supuse legislației naționale sau locale.

Toate incidentele grave legate de dispozitivul medical furnizat de noi trebuie raportate producătorului și autorității competente din statul membru în care se află sediul dumneavoastră.

ETICHETE, AMBALAJE DESIGN LOGO:

Simbol	Sens	Simbol	Sens
	Dispozitiv medical conform Regulamentului (UE) 2017/745		Dispozitiv medical
	Producător		Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană
	Data fabricatiei		A se păstra departe de lumina soarelui
	Numărul lotului		Nu este steril
	Avertisment: Citiți și urmați cu atenție instrucțiunile (avertismente) de utilizare		Cod produs
	Citiți instrucțiunile de utilizare		A se pastra într-un loc racoros si uscat
	Importat din		Limită de temperatură
	Limită de umiditate		Limită de presiune atmosferică
	Identificator unic		

TERMENI DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția standard Gima de 12 luni B2B.

ROMÂNĂ

NUMELE PRODUSULUI

Dispozitiv de ridicare și transfer

Număr model: KDB-506

Capacitate de greutate: 125 Kg.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ:

Dispozitivul de ridicare și transfer este folosit pentru transferul pacienților cu paralizie a zonei inferioare a corpului, pacienții cu probleme ale picioarelor sau vârstnicii aflați la pat, în scaun cu rotile, cadru sau scaun de toaletă. Acest dispozitiv a ușurat foarte mult munca îngrijitorilor. Îmbunătățește eficiența muncii asistenței medicale și reduce riscul de asistență medicală.

INDICAȚII

A se folosi doar pentru oameni.

METODE DE CURĂȚARE/ÎNȚEȚINERE

Atunci când este necesar, curățați dispozitivul cu apă caldă sau alcool pentru frecții și asigurați-vă că roțile nu prezintă murdărie și păr. Nu utilizați agenți de curățare care conțin fenol sau clor, deoarece acest lucru poate deteriora materialele din aluminiu și poliamidă.

Pentru a evita posibila formare de rugină, acordați atenție următoarelor puncte pentru o întreținere mai bună și pentru a îmbunătăți ridicarea de serviciu:

* Îndepărtați substanțele corozive precum gelul de duș, șamponul etc. de fiecare dată după utilizare.

*Apoi lăsați produsul într-un loc uscat și ventilat; de asemenea, este bine să procedați astfel și