



CABLURI PENTRU PACIENȚI ECG - INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE

ATENȚIE! Pentru a preveni riscul de electrocutare, nu conectați nicio sursă de alimentare.

Cablurile pacientului GIMA sunt compatibile cu instrumentele indicate. Procedura de conectare recomandată trebuie respectată. Pentru a deconecta cablul, trageți ușor de conector, fără a depune eforturi direct pe cablu. Înainte de a utiliza un cablu, verificați cu atenție dacă cablul în sine este intact și compatibil cu aparatul respectiv.

Curățare: tratați cablurile pacientului și terminațiile GIMA cu o soluție de apă caldă și detergent ușor. Curățați cu o cârpă moale. Nu scufundați niciodată cablurile pacientului și terminațiile GIMA! După curățare, ștergeți cablurile pacientului și terminațiile GIMA cu o cârpă curată. Pentru a usca cablul, țineți-l de divizorul de ramură mișcând cârpa spre conector, ditto pentru terminări. Evitați contactul cu detergenți agresivi și cu solvenți aromatici, clorați, cetone, eter sau esteri. Soluțiile agresive (cum ar fi soluții alcoolice sau puternic alcaline, solvenți de rezistență medie, soluții de curățare) deteriorează cablurile pacientului și terminațiile GIMA.

Dezinfecție: cablurile pacientului și terminațiile GIMA pot fi tratate cu dezinfectanți care conțin etanol (70% -80%), propanol (70% -80%), aldehide (2% -4%), dialdehide activate (Cidex) sau hipoclorit de Sodiu (Bleach în soluție apoasă 1:10). Nu folosiți solvenți organici. După spălare, clătiți cablurile cu apă și uscați-le cu o cârpă curată.

Sterilizare: cablurile pacientului și terminațiile GIMA pot fi sterilizate cu Oxid de Etilenă (EtO). După sterilizare, ventilați corespunzător cablul înainte de utilizare. Cablurile și terminațiile pacientului GIMA NU pot fi autoclavate.

Atenție!

- aranjați cablurile și terminațiile astfel încât pacientul sau operatorii să nu fie prinși.
- nu expuneți cablul sau terminațiile la radiații ultraviolete prea intense.
- verificați integritatea cablului și a terminațiilor înainte de utilizare.
- curățați și dezinfectați cablul și terminațiile înainte de a le aplica unui pacient nou.
- nu autoclavează cablurile pacientului și terminațiile GIMA.
- produsele GIMA pot fi utilizate sau manipulate doar de personal calificat.

Trebuie să raportați orice incident grav survenit în legătură cu dispozitivul medical pe care l-ați furnizat producătorului și autorităților competente din statul membru în care vă aflați.