

**RU ⚠ Внимание!**

*Указания по технике безопасности при использовании и работе с микрокюветами для определения содержания гемоглобина*

Микрокюветы к анализаторам гемоглобина предназначены исключительно для определения содержания гемоглобина в капиллярной и венозной крови на следующих анализаторах: Hemo\_Control, Hemo\_Control Manager, Hemo\_Vet, Hemo\_Vet Manager. Кюветы должны использоваться только квалифицированным персоналом.

За дополнительной информацией обратитесь к инструкции по эксплуатации соответствующего прибора.

Хранить кюветы только в оригинальной упаковке при температуре от 15°C до 30°C. Содержимое упакованных на заводе коробок годно к употреблению до указанного на них срока. После вскрытия коробки кюветы могут быть использованы в течение 3 месяцев, при условии соблюдения всех условий эксплуатации.

За один раз берите из коробки только одну кювету. Сразу после взятия кюветы тщательно закройте коробку (**см. рис. 1.**). Всегда проверяйте, плотно ли закрыта крышка коробки с кюветами по всему периметру (**см. рис. 2.**).

Если крышка закрыта не полностью (**см. рис. 3.**), в коробку может проникнуть влага и разрушить реактивы в кювете. Использование таких кювет может дать неправильные результаты. Ни в коем случае не используйте кюветы из неправильно закрытой коробки!

