


STATIVWAAGE 7830/7831

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Ⓜ OPERATING INSTRUCTIONS
- Ⓜ MODE D'EMPLOI
- Ⓜ BEDIENINGSHANDLEIDING
- Ⓜ INSTRUCCIONES DE USO
- Ⓜ ISTRUZIONI PER L'USO
- Ⓜ KÄYTTÖOHJE
- Ⓜ BRUKSANVISNING
- Ⓜ BRUKSANVISNING
- Ⓜ Οδηγίες χρήσης
- Ⓜ KULLANIM KILAVUZU
- Ⓜ NÁVOD NA OBSLUHU
- Ⓜ NÁVOD K OBSLUZE
- Ⓜ Instrukcja obsługi
- Ⓜ Руководство по эксплуатации

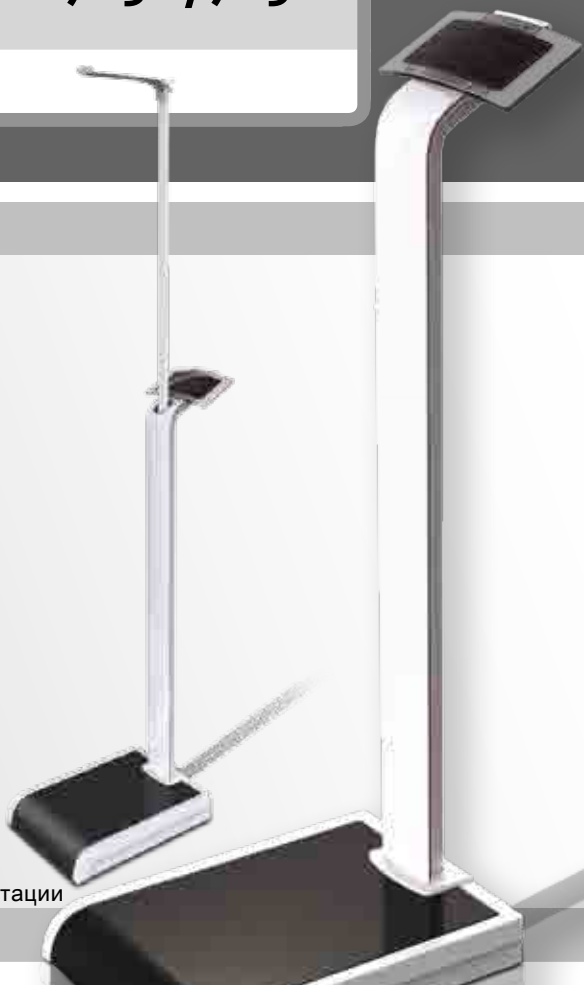

RU русский язык **CE**
ВЕСЫ СО ШТАТИВОМ 7830/31

Ввод в эксплуатацию

Воткнуть провод сетевого блока питания, интегрированного в вилку, с задней стороны платформы, чтобы обеспечить питание весов током.

Взвешивание

Просто стать на весы (включение или касание клавиши не требуется).

Измерение длины с индикацией индекса массы тела (BMI)

Осторожно откинуть вверх измеритель длины и переместить его вверх. Затем положить верхнюю часть на голову пациента. На дисплее появится величина в сантиметрах, а затем автоматически – индекс массы тела.

Тарированное взвешивание

С помощью функциональной клавиши на задней стороне дисплея весы могут тарироваться. Нажать клавишу, на дисплее появится «0,0 кг», и весы готовы к взвешиванию.

Функция мать/ребенок

Взрослый человек становится на весы.

> Индикация, например, «47,6 кг»

• Нажмите функциональную клавишу.

> Индикация устанавливается на «0,0 кг»

• Мать может сойти с весов ...

> Индикация «-47,6 кг»

• ... и стать вместе с ребенком еще раз на весы.

> Вы получите вес ребенка, например, «5,1 кг»

Когда оба вновь покидают весы, на дисплее в примере отображается «-47,6 кг». С помощью функциональной клавиши Вы можете вновь установить весы на «0,0 кг». Весы не переходят автоматически на «0,0 кг», чтобы можно было провести последовательно несколько оттарированных взвешиваний.

Выключение

Весы выключаются автоматически, когда индикация прибл. 15 секунд стоит на «0,0 кг».

Переключение единиц измерения

Стандартно установлена единица измерения кг. Если Вы хотели бы переключить весы на другую единицу измерения, поступайте следующим образом.

- Вытащить сетевую вилку.
- Нажать функциональную клавишу, удерживать ее нажатой и одновременно воткнуть сетевую вилку.
- Индикация сменится на фунты (lb).

Чтобы вновь переключить индикацию на кг, просьба повторить описанный выше процесс

