

ثوب SMMS القياسي للاستخدام مرة واحدة

اسم المنتج ثوب SMMS القياسي للاستخدام مرة واحدة

رمز المنتج

FGNS-SG-SM40-M, FGNS-SG-SM40-L,
FGNS-SG-SM40-XL, FGNS-SG-SM40-XXL

وحدة مقياس المنتج: سم

الانحراف	طول الكم	طول الحزام	العرض (أحادي الطبقة)	الطول (من نقطة الكتف إلى الحواف)	المقاسات	رمز المنتج	رمز GIMA
±2	58	65	140	120	M:120X140	FGNS-SG-SM40-M	21040
±2	59	65	150	120	L:120X150	FGNS-SG-SM40-L	21041
±2	59	65	150	130	XL:130X150	FGNS-SG-SM40-XL	21042
±2	61	69	160	140	XXL:140X160	FGNS-SG-SM40-XXL	21043

موديل المنتج نوع الثوب. M/L/XL/XXL

الهيكلة والتكوين المنتج يستخدم قماش 40جم SMMS غير منسوج. يتألف من المقدمة والمؤخرة والأكماد وربطة عنق وياقة. تتم العملية التكنولوجية عن طريق القص، اللحام بالموجات فوق الصوتية، الأربطة، الفيلكرو، السوار، الطي، اللحام.

الاستخدام المقصود تستخدم المنتجات بشكل أساسي للعزل العام في العيادات الخارجية والأجنحة وغرف الفحص وغرف التنظيف والمختبر وما إلى ذلك. ويُقصد استخدامها من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية في المستشفيات والعيادات للحفاظ على مستوى جيد من النظافة والمساهمة في مكافحة العدوى.

المحاذير يمكن استخدام المنتجات مرة واحدة فقط، ويجب استخدامها فور فتح العبوة. في حالة تلف العبوة أو أن أصبح المنتج رطباً أو متعفنًا، لا تستخدمه.

كيفية استخدام المنتج افتح العبوة وأخرج المنتج، وقم بهز الثوب برفق، وارفع جوانب الياقة، وأدخل اليدين في الأكمام، وقم بتمديد الذراعين للأمام، واربط الأحزمة.

التخزين يجب أن يتم تخزينه في غرفة نظيفة برطوبة نسبية لا تزيد عن 80٪، ولا توجد غازات مسببة للتآكل، ويتم تخزينه في مكان بارد وجاف وجيد التهوية.

⚠ تحذير

- هذا المنتج للاستخدام مرة واحدة، لا تعد استخدامه.
 - هذا المنتج للاستخدام مرة واحدة، ولا تشارك منتجك مع آخر.
 - يُمنع الاستخدام عند تلف العبوة أو المنتجات.
- تنويه يجب الإبلاغ عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز إلى الشركة المصنعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقيم فيها المستخدم أو المريض.

تاوون3 قديم ءحلاص

تاريخ الإنتاج انظر التاريخ المدون على العبوة

تاريخ انتهاء الصلاحية انظر التاريخ على العبوة

شروط ضمان جيم GIMA

يُطبق ضمان B2B القياسي جيم GIMA لمدة 12 شهر.

REF	كود المنتج	☀	يحفظ بعيداً عن ضوء الشمس	☂	يحفظ في مكان بارد وجاف
LOT	رقم الدفعة	CE	جهاز طبي يتوافق مع التوجيه (UE) 2017/745	⚠	الحذر: قراءة التعليمات (التحذيرات) بعناية
🏭	الشركة المصنعة	📅	تاريخ التصنيع	MD	الجهاز الطبي
🧼	لبس معقم	⌚	تاريخ انتهاء الصلاحية	⊗	لا تستخدم في حالة تلف الحزمة
🔄	حد نسبة الرطوبة	📖	اقرأ بدقة وحرص تعليمات الاستخدام	⊗	أداة أحادية الاستخدام، لا تستخدم من جديد
🌡	حد درجة الحرارة	EC REP	ممثل معتمد في الاتحاد الأوروبي	🍷	هشة ، والتعامل معها بحذر
↑↑	هذا الجانب	UDI	معرف فريد للجهاز		

IM2 1040-M-Rev.4-02.25

GIMA 21040
GIMA 21041
GIMA 21042
GIMA 21043



Xianning Full Guard Medical Products Co., Ltd
Yongan East Road Wenquan Economic
Development Zone, Xianning City, Hubei
Province, China
Made in China



FGNS-SG-SM40-M
FGNS-SG-SM40-L
FGNS-SG-SM40-XL
FGNS-SG-SM40-XXL



Humiss Beratung
GmbH Gneisenaustraße 8.40477,
Düsseldorf, Deutschland

مستورد عن طريق
Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

